

Kinetec Spectra Quick Reference Guide

MISSION	ACTION	REMARQUE
BLOCAGE / DÉBLOCAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE	Appuyer simultanément sur  et 	Télécommande est débloquée lors de mise en marche/arrêt
MANUAL SET UP MODE	Mettre l'attelle sous tension Appuyer sur  sur la télécommande Modifier la limite d'extension avec le bouton  Appuyer sur  ou  pour changer l'amplitude. Pour modifier la limite de flexion, appuyer sur  Appuyer sur  ou  pour changer l'amplitude. La vitesse peut être réglée par appuyer sur  Appuyer sur  ou  accélérer ou ralentir. Pour configurer la puissance, appuyer sur le bouton  Appuyer sur  ou  la puissance augmente ou diminue Le temps de séance peut être modifiée avec le bouton  Appuyer sur  ou  la durée augmente ou diminue.	La valeur d'extension clignote. (Appuyer sur  ou  pendant 3 secondes.) La valeur de flexion clignote. (Appuyer sur  ou  pendant 3 secondes.) Le valeur clignote de nouveau pour introduire des nouvelles valeurs, Attendez pendant 3 secondes.
MINUTEUR 	Le temps de séance sera affichée en appuyant sur le minuteur 	Ce compteur de temps est remis à zéro à chaque remise sous tension.
WARM - UP 	Appuyer sur STOP  Puis, appuyer sur le bouton  Appuyer sur START 	Le Spectra démarre le mouvement à 70% de la plage angulaire maximum et augmente de 5% à chaque cycle complet jusqu'à atteindre l'amplitude maximum programmée.



MISSION

ACTION

REMARQUE

MODE MODULATION



Appuyer sur STOP



Appuyer sur MODULATION



Maintenir le bouton  jusqu'à l'obtention de la flexion souhaitée.

Mémoriser le seuil de douleur par appuyer sur 

OU

Maintenir le bouton  jusqu'à l'obtention de l'extension souhaitée.

Mémoriser le seuil de douleur par appuyer sur 

Appuyer sur  pour commencer avec les nouvelles limites de mouvement.

Cette fonction permet de définir et d'enregistrer les limites maximales supportées par le patient.

BY-PASS MODUS



L'appareil doit être en mouvement avant d'appuyer sur 

Appuyer sur BY-PASS.



Ensuite appuyer sur . La valeur programmée de flexion est dépassée.

Mémoriser le seuil de douleur par appuyer sur 

OU

Ensuite appuyer sur . La valeur programmée d'extension est dépassée.

Mémoriser le seuil de douleur par appuyer sur 

Pour dépasser les limites maximales supportées par le patient au cours de l'exercice.

PROGRAMMES

Mettre l'attelle hors tension,

Appuyer simultanément sur  et  et mettre sous tension

Le mot PROGRAMMA s'affiche sur la télécommande. Relâchez  et 

Dès que ce mot s'affiche.

Choisissez 1 des 16 programmes avec les boutons  et 

CHOIX DU MODE DE TRAITEMENT

WARM UP - Appuyer 1 fois sur . Manual set up: Appuyer 2 fois sur 

Ajuster flexion/extension, vitesse, force et pause. Appuyer sur 

Sauvegarder le programme:  en appui. Effacer:  en appui.

Stopper l'appareil et mettre en route de nouveau pour accéder aux programmes enregistrés.