



CONSIGNES DE SECURITE

TOUJOURS lire ces instructions d'installation avant de procéder à l'installation de ce produit et laisser les consignes à l'utilisateur final.

TOUJOURS faire installer les sièges par un installateur formé et compétent.



TOUJOURS Fixez ce siège à une surface en utilisant des fixations adaptées au type de surface et aux conditions de chargement à appliquer.

TOUJOURS Utiliser les bouchons de trous si le coussin de siège n'est pas utilisé.



JAMAIS **Dépasser la capacité de poids de 158 kg.**



JAMAIS Installez des vis à tête fraisée aux trous de fixation.

JAMAIS Se tenir debout sur le siège.
Cela peut réduire la résistance du siège de douche et rendra nulle toute garantie ou capacité de poids déclaré.



NE PAS Placer d'allumettes ou des cigarettes sur ou à proximité de ce produit. Les matières plastiques suivantes sont utilisées dans ce produit: Polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC-U) et Caoutchouc thermoplastique (TPR).



ATTENTION Il peut y avoir un risque de pincement lorsque le siège est relevé vers le mur.

ATTENTION Agrandir les trous de fixation diminue la solidité de votre barre d'appui, sa résistance et annule toute garantie.



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive pour les dispositifs médicaux 93/42/EEC et des échantillons représentatifs ont été évalués dans le cadre EN12182: 1999 et EN12727: 2000. Pour utilisation comme un siège de douche (d'assistance de classe 1). Déclaration émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et va affecter la sécurité du produit.

Ces instructions sont fournies pour conseiller sur les normes minimales d'installation et recommande la meilleure installation possible. En raison de la très grande variabilité des conditions d'installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les modalités d'installation. AKW ne peut accepter toute responsabilité relative à cette information ou à son utilisation. Ces informations sont fournies à la condition que la personne qui le reçoit fait ses propres tests pour déterminer l'aptitude à l'usage particulier. Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et peut compromettre la sécurité du produit.


Pour plus de détails à ce sujet et d'autres produits AKW, veuillez contacter votre distributeur - voir détails sur l'emballage extérieur

AKW International, Zone industrielle Tournai Ouest - 20 Rue de la terre à briques - 7522 Marquain - Belgique

Tel.+32 (0) 68 33 48 99 - Fax. +32 (0) 68 33 16 58 - www.akw-medicare.com

ism@akw-medicare.com

AKW®

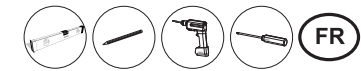

Sièges rabattables Série 2000

Instructions d'installation et d'entretien



Veillez lire attentivement toutes les instructions AVANT de procéder à l'installation et les laisser à disposition de l'utilisateur final

Couleur : Blanc RAL 9016 / Gris RAL 7035 ou bleu haut contraste RAL 5005

Utilisation à l'intérieur


INFORMATIONS ESSENTIELLES D'INSTALLATION

Ne jamais aller au-delà du poids maximum de 158kg.

Ajuster les pieds de support et s'assurer que les pieds soient sur une surface plane quand le siège est en position abaissée. Les surfaces courbées comme les angles de baignoire ne sont pas acceptables.

Ce siège doit être fixé sur une surface verticale à l'aide des fixations appropriées pour le type de surface et de poids qui seront appliqués.

Les fixations en acier inoxydable sont recommandées. Assurez-vous que tous les trous de fixation sont utilisés. Veillez à ne pas endommager la surface. Ne pas ajouter de fraises ou de percer des trous plus grands. Cela peut réduire la résistance du cadre et annuler toute garantie ou capacité de poids déclaré.

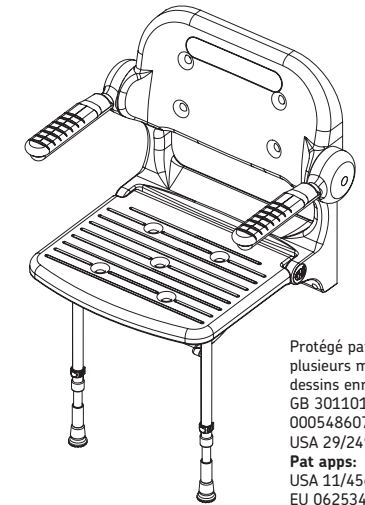


Protégé par un ou plusieurs modèles/dessins enregistrés :
GB 3011017, EU 000548607
USA 29/249106
Pat apps:
USA 11/456352,
EU 06253480

Assemblage du coussin

1 Assembler le coussin au siège
Notez que la face avant est indiquée.

2 Le dispositif de retenue du coussin est monté sous le siège.


Chaque bouchon de positionnement a une retenue (4 au total)

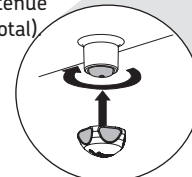

3 Pour adapter la retenue, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appliquant une pression ferme vers le siège.

Il est peut-être nécessaire de maintenir en position le coussin de siège tandis que le dispositif de retenue est installé.


4 Le dispositif de retenue doit être serré à la main afin de bien l'ajuster. **Faites attention de ne pas trop serrer le dispositif de retenue.**

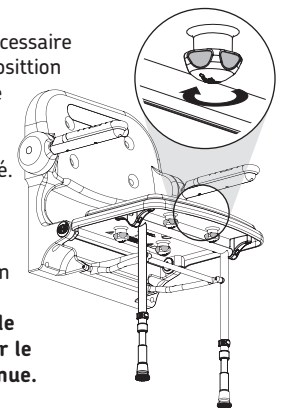


Si le coussin n'est pas équipé sur le siège, assurez-vous que les bouchons soient mis dans tous les trous.

02130/P - 02230/P Dimensions des sièges


Dimensions des sièges (coussin non affiché)

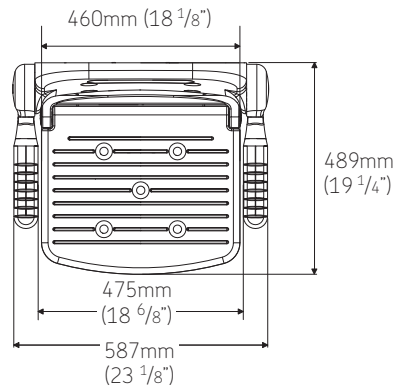


Dimensions du siège plié

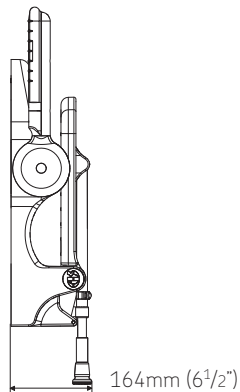



Dimensions des trous de montage

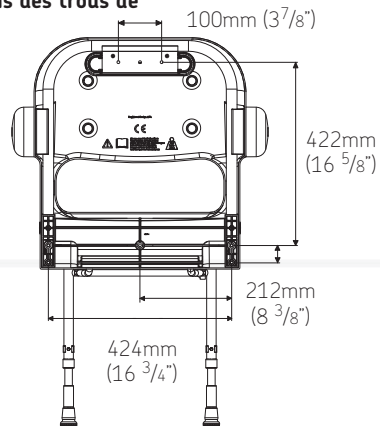

Dimensions hauteur minimum

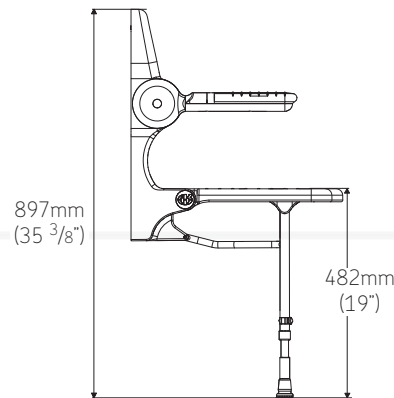

Dimensions hauteur maximum

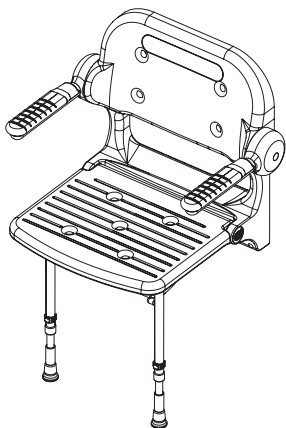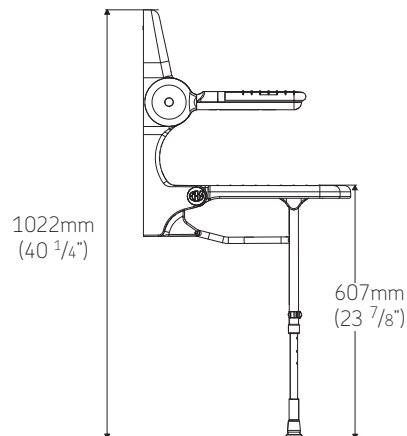

Instructions d'installation

Placez le siège sur son dos sur le sol.

Lorsqu'il est placé sur le sol, les pieds sont verrouillés par le mécanisme.

Ce siège doit être fixé à une surface verticale à l'aide de fixations appropriées pour le type de conditions de surface et de chargement à appliquer.


Ajuster les pieds de support et s'assurer que les pieds soient sur une surface plane quand le siège est en position abaissée. Les surfaces courbées comme les angles de baignoire ne sont pas acceptables.

Des fixations en acier inoxydable sont recommandées.

Si vous n'êtes pas sûr du type de visserie à utiliser, veuillez consulter un spécialiste de visserie en lui indiquant le type et la construction de la surface verticale ainsi que la version du siège. Nous ne sommes pas en mesure de stipuler le type de fixation à utiliser en raison du très grand nombre de types et états possibles de surfaces verticales sur lesquelles le siège de douche peut être fixé.

Veillez à utiliser tous les trous de fixation.

N'agrandissez pas les trous car ceci peut avoir pour effet de réduire la résistance du cadre et d'annuler toute garantie ou capacité de charge stipulée.

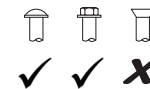

Ne pas utiliser des fixations à tête fraisée.

Installez le siège. Une fois installé, vérifiez que les bouchons en plastique sont bien en place.

Instructions d'entretien

Utilisation du siège de douche

Le siège de douche peut uniquement être utilisé pour les tâches auxquelles il est destiné. Ne pas se tenir debout sur le siège. Cela peut réduire la résistance du siège de douche et rendra nulle toute garantie ou capacité de poids déclaré. Le siège de douche doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié.

Les enfants et les autres utilisateurs peuvent demander une surveillance lors de l'utilisation de ce produit.

Veillez à conserver votre siège de douche AKW propre.

Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage pour salle de bains domestique. Après nettoyage, rincez toujours à l'eau, puis essuyez à l'aide d'un tissu humide pour retirer tout résidu de produit de nettoyage avant de la sécher.

Désinfection

Si une désinfection est nécessaire, suivez avec précaution les procédures normales de désinfection et respectez les avertissements relatifs aux effets possibles de produits chimiques agressifs sur le plastique.

Après nettoyage, rincez toujours à l'eau, puis essuyez à l'aide d'un tissu humide pour retirer tout résidu de produit de nettoyage avant de la sécher.

N'utilisez pas de produits de nettoyage présentant une forte concentration acide, alcaline ou abrasive, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit.

AKW n'approuve et ne recommande pas le nettoyage par autoclave en raison des détériorations qu'une telle méthode peut entraîner au niveau des plastiques industriels spéciaux utilisés pour la réalisation de ce produit.

Emballage

Le siège de douche est fourni dans des sacs en polypropylène (PP) afin de conserver le produit propre jusqu'à son installation ; les pièces peuvent éventuellement être emballées en vrac dans une boîte en carton. Les deux types d'emballage peuvent être recyclés et doivent être jetés conformément à la réglementation locale en matière de recyclage.