

LIFECLEAN DESINFEKSJON

Ferdig blandet ClO₂-løsning til desinfeksjon av flater og utstyr.
BRUKERVEILEDNING

Effektiv mot

Vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier, f.eks. TB og endosporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis*.

Klar til bruk

LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

Innhold

| | |
|------------------|------------------|
| ClO ₂ | Nominell 200 ppm |
| pH | Sur løsning |
| Tensider | <0,2 % |

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon

| Flater | Utstyr |
|---|--|
| 1 Fjern synlig forurensning og organisk materiale som blod, oppkast, avføring etc. | 1 Rengjør utstyret på forhånd. Fjern synlig forurensning og organisk materiale. |
| 2 Påfør rikelig med LifeClean løsningen på ønsket flate. Virketid 2 minutter. | 2 Utstyr som kan dynkes legges i en beholder og dekkes med LifeClean. Utstyr som kan desinfiseres med klut - følg instruksjon for flater. |
| 3 Til påføring anvend rengjøringsutstyr som f.eks en ren klut eller lignende eller påfør direkte fra flaske. | 3 Virketid 2 minutter. |
| 4 Bruk beskyttelses hansker for å beskytte huden mot uttørring og mot smitterisiko. Ellers følg lokale anbefalinger. | 4 Skylles og tørkes godt. Utstyr som er i kontakt med slimhinner bør skylles med sterilt vann. |
| 5 Lukk LifeClean flasken og merk med åpningsdag. En åpent flaske er holdbar i 4 uker fra åpningsdag. | Informasjon om håndtering, stabilitet og materialkompatibilitet, se sikkerhetsdatablad. |
| 6 Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering. | PartnerMed www.partnermed.no |

PartnerMed AS
Tlf: 468 15 117

Mail: info@partnermed.no

LifeClean Desinfeksjon

Desinfeksjon av overflater i henhold til gjeldene prosedyre. Full effekt på bakterier, virus og sopp innen 1 minutt. Ved sporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis* er virkningstiden 2 minutter. Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.