

Indikasjons Guide for Enterale Sonder

Vekt	Indikasjon	FG	CM	Materiale Rød gummi	Materiale PVC	Materiale PUR	Materiale Silikon
------	------------	----	----	---------------------	---------------	---------------	-------------------

				Liggetid			
	Nese/NG-sonde	Bredde	Lengde	3-7 dager	5 dager	30 dager	
0,2 kg		4	40-50				
3-4 kg		5	40-50				
5-6 kg		6	50-75				
7-10 kg		6,7,8	50-75				
10-25 kg		8	75-150				
25-50 kg		8,10	100-150				

	Øsofagal	Bredde	Lengde			30 dager	>30 dager
0,2 kg		10	20-30				
3-4 kg		12-14	30-40				
5-6 kg		12-14	40-50				
7-10 kg		14-16	40-50				
10-25 kg		16-18	40-50				
25-50 kg		18+	70-80				

	Ventrikkel	Bredde	Lengde	Minutter	Minutter		
0,2 kg		12	75-100				
3-4 kg		14	75-100				
5-6 kg		16	75-100				
7-10 kg		16	100				
10-25 kg		16-18	100-150				
25-40 kg		18 -25	150				
40-60 kg		25-30	150				
60+ kg		30+	200+				

1 FR = 0,33mm. FG = ytre diameter /bredde Polypropylen

- Lengde: lengden er veiledende.
- Man kan bruke lengre sonde og feste overskuddslengde på utsiden
- Det er store rasevariasjoner i dyrets lengde relativ til vekt

Forklaring:

- Nese/NG-sonde: nasogastrisk via nesehule
- Øsofagal: plasseres kirurgisk via øsofagostomi
- Ventrikkel: plasseres oro-gastrisk for kortvarig skylning og/eller tømning av ventrikkel