



VETNORDIC
walking the extra mile

Urinkateterguide



Vetnordics utvalg av urinveiskatetre består av differensierte katetre slik at du finner noe for alle kliniske bruksområder innen urologi. Ulike materialer og egenskaper sikrer optimal pasientkomfort, sikkerhet og brukervennlighet. Vi har utarbeidet en praktisk guide slik at du kan velge det kateteret som passer best til den prosedyren du skal utføre.

Urinkateter til katt

Til katt har vi urinveiskatetre i tre ulike materialer med både åpne ender og sidehull. Nedenfor følger en beskrivelse av egenskapene til de ulike materialene og hvordan dette påvirker valg av kateter i ulike kliniske situasjoner.

Jo lenger kateteret sitter i, desto mykere bør det være.

Felles egenskaper for alle Vetnordic-katetre:

- ✓ Luerhette for å sikre ukontrollert urindrenasje under inngrepet
- ✓ Fargekode på hetten indikerer størrelse
- ✓ Myk og fleksibel bunnplate forhindrer traumer når kateteret festes med suturer til preputium
- ✓ Kateteret kan rotere fritt uavhengig av bunnplaten, noe som forhindrer traumer og gir bedre komfort
- ✓ FSC-sertifisert ytteremballasje

Urinkateter til katt, åpen ende:

Kateteret er stivt noe som gjør det enkelt å føre inn uten stylett og spesielt egnet for blæreskylling.

Den åpne enden gjør kateteret spesielt godt egnet for spyling ved obstruksjon.

Polert kant på kateteret for å unngå traumer.

Egnet for blæreskylling og urindrenasje.

Egnet for kortvarig bruk fra 0-1 dag.



Urinkateter til katt, sidehull: Polyetylen

Kateteret er litt stivt ved romtemperatur, men materialet blir mykere ved kroppstemperatur og former seg etter kroppens anatomi. Dette sammen med polerte sidehull forbedrer komforten og forebygger traumer.

Styletten gjør kateteret enkelt å sette inn, og hette festet til styletten forhindrer ukontrollert urindrenasje under prosedyren.

Egnet for blæreskylling, urindrenasje og som kateter for inneliggende bruk i 0-3 dager.



Urinkateter til katt, barium: Polyuretan

Et mykt og komfortabelt kateter med høy biokompatibilitet.

Polerte sidehull forbedrer komforten og forhindrer traumer.

Styletten gjør kateteret enkelt å sette inn, og hette festet til styletten forhindrer ukontrollert urindrenasje under prosedyren.

Barium gjør kateteret røntgentett.

Egnet for blæreskylling, urindrenasje og som kateter for inneliggende bruk i 0-7 dager.





VETNORDIC
walking the extra mile

Urinkateterguide



Vetnordics utvalg av urinveiskatetre består av differensierte katetre, slik at du finner noe for alle kliniske bruksområder innen urologi. Ulike materialer og egenskaper sikrer optimal pasientkomfort, sikkerhet og brukervennlighet. Vi har utarbeidet en praktisk guide slik at du kan velge det kateteret som passer best til den prosedyren du skal utføre.

Urinkateter til hund

Polypropylen med sidehull:

Katetrene er stive, noe som gjør dem enkle å sette inn uten stylett.
Polerte sidehull forbedrer komforten og forhindrer traumer.
Fargekodete luer lock-hunnhyuser indikerer størrelsen.
Katetret er egnet for blæreskylling og urindrenasje.
Kateteret er egnet for kortvarig bruk fra 0-1 dag.



Foley-kateter i silikon:

Kateteret er mykt og har høy biotilgjengelighet.
Bariumlinjen gjør det synlig på røntgen.
Styletten gjør det enkelt å sette inn.
Kateteret kan brukes inneliggende i opptil 30 dager.
Leveres i et praktisk pakket sterilt sett med alt du trenger for prosedyren, noe som sparer tid og sikrer asepsis.



Urinepose:

Urinposer for oppsamling av urin hos hunder eller katter med kateter.
Bruk av et lukket urinoppsamlingsystem har den fordel at urinen ledes bort fra kroppen og holdes lukket, og dermed unngår man skålding av urinen, stress, ubehag og forebygger infeksjon.
I tillegg har du et objektivt system for måling av urinproduksjon og makroskopisk overvåking av urinen, samt enkel tilgang til for prøvetaking.
Posene er tilgjengelige med luer lock eller Foley-kobling.
100 cm slange laget av et mykt og lett materiale som er motstandsdyktig mot knekk i slangen, noe som sikrer god drenering fra blæren.
Mulighet for å velge mellom 200 ml og 500 ml posestørrelse for å tilpasse størrelsen til pasienten, noe som sikrer lavest mulig trekkraft i kateteret.
Slangen/posen har et motinntak som forhindrer at urinen renner fra posen og tilbake i blæren.
Posen har en tømmeventil.
Det følger med stropper for å feste posen til buret, bordet eller direkte til pasienten.
Urinposen skal alltid plasseres lavere enn blæren for å sikre tyngdekraften og god drenering.
Posen kan brukes i opptil 7 dager, deretter bør den skiftes ut.





VETNORDIC
walking the extra mile

Urinkateterguide



Materiale og maksimal anbefalt brukstid

Polypropylene	Polyethylene	Polyurethane	Silicone
0-1 dager	0-3 dager	0-7 dager	0-30 dager



Urinkekateter,
åpen ende

Urinkekateter,
sidehull

Urinkekateter,
barium, sidehull

Katt

Materialegenskaper

Materialegenskaper

Materialegenskaper

Stiv - lett å føre inn
(uten stylett)

Stylett - lett å føre inn

Stylett - lett å føre inn

Stiv ved romtemperatur

Myk

Mykner ved kroppstemperatur
- tilpasser seg anatomien

Høy biokompatibilitet

Røntgentett

Kliniske bruksområder

Kliniske bruksområder

Kliniske bruksområder

Obstruksjon

Urindrenering

Urindrenering

Urindrenering

Blæreskylling

Blæreskylling

Blæreskylling

For umiddelbar bruk

Kort liggetid

Medium liggetid



Urinkekateter for hund,
sidehull

Silikon Foley
Katetersett

Hund

Materialegenskaper

Materialegenskaper

Stiv - lett å føre inn

Myk

Høy biokompatibilitet

Røntgentett

Kliniske bruksområder

Kliniske bruksområder

Obstruksjon

Urindrenering

Urindrenering

Blæreskylling

Blæreskylling

Lang liggetid

For umiddelbar bruk