



KIILTO

KIILTO HYGIENELØSNINGER FOR
VETERINÆRKLINIKKER



KIILTO PRO



REDUSER INFEKSJONER MED **PROFESJONELL HYGIENE**

Gode hygieniske rutiner på en veterinærklinikk sikrer et høyt hygienenivå, noe som er avgjørende for hvert dyr som behandles, uavhengig av sykdomshistorie. Eventuelle sykdommer, bakterier eller virusinfeksjoner dyret har, kan være ukjent for personalet eller dyrets eier.

Overflater i behandlingsrommet blir kontaminert under behandlingen, og mikrober kan overføres via personalets hender til instrumenter, andre overflater i behandlingsrommet, andre dyr og behandlingspersonalet.

Infeksjoner forhindres gjennom hygieniske arbeidsmetoder, god håndhygiene, overflatedesinfisering og profesjonell pleie av instrumenter. Hver klinikk bør ha en skriftlig og oppdatert hygieneplan. En klar og enkel hygieneløsning effektiviserer daglige rutiner og gir veiledning om aseptiske og sikre arbeidsmetoder.

Kiilto Pro- og Antibac-produktene består av effektive hygieneløsninger for hånd- og overflatehygiene, samt instrumentpleie for veterinærklinikker og dyresykehus.

Hygiene i behandlingsmiljøer

Kiilto Pro

Et høyt nivå av hygiene og riktige arbeidsmetoder forhindrer spredning av smittsomme sykdommer under veterinærprosedyrer. Veterinærklinikker arbeider systematisk med å forebygge behandlingsrelaterte, smittsomme sykdommer.

Standard forholdsregler må følges for alle dyr, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor det er nødvendig med ytterligere forholdsregler i forbindelse med kontakt. Riktig utført rengjøring og desinfisering av utstyr, sammen med korrekt bruk av kjemikalier, er avgjørende for å sikre dyrenes sikkerhet.

Rengjøringstrinn mellom dyr:

1. Sorter engangsutstyr og -enheter i avfallsbeholdere. Plasser skarpt avfall i den tilhørende beholderen.
2. Plasser instrumentene i en beholder med lokk. Spray Kiilto Pro Hydragel forbehandlingsmiddel på de kontaminerte instrumentene.
3. Fjern eventuelle sekreter med desinfeksjonsmiddel fra behandlingsmiljøet. Vi anbefaler produktene Antibac Overflatedesinfeksjon+ 75 % med tensid (alternativt Oxivir Excel alkoholfrie wipes).
4. Tørk alle overflater med et desinfiserende rengjøringsmiddel. Bruk en ren klut for hvert område. Følg en aseptisk rekkefølge når du arbeider, fra rent til skittent:
I) Skapdører og overflater, tastaturer og mus, bordplater osv.
II) Lampehåndtak
III) Forsyningspakker og forsyninger som ble tatt ut under behandlingen
IV) Behandlingsbord V) Områder i umiddelbar nærhet av dyret.
5. Desinfiser hendene dine til slutt.

Desinfisering av overflater:

I henhold til EU-lovgivningen MDR (2017/745) skal alle produkter som brukes til rengjøring, desinfisering eller sterilisering av medisinsk utstyr anses som medisinsk utstyr i seg selv. Dette betyr at for eksempel desinfeksjonsmidler som brukes til å desinfisere instrumenter, tannlegestoler osv., må være CE-merket.

Kiiltos CE-merkede produkter er grundig testet og dokumentert. Når du velger Kiilto CE-merkede produkter, kan du være trygg på at de er nøye utviklet, testet og dokumentert for bruk i helse- og tannpleiefasiliteter.

MASKINELLE PROSESSER

De fleste instrumentene rengjøres med instrumentvaskemaskiner. Rengjøringsmidlene som brukes må være egnet for ulike materialer og sikre et hygienisk resultat. Riktig bruk av utstyret krever ikke bare effektive rengjøringsmidler, men også kompetanse om gjenbruk og håndtering av instrumenter.

Automatisert rengjøring og vedlikehold av utstyr og instrumenter er den sikreste og mest effektive måten å opprettholde hygien på:



Maskinvaskemidler for instrumenter



KIILTO PRO INNOVA 100

Vaskemiddel for maskinell vask og dekontaminering

5 l • 8235


Effektiv, ikke-skummende og skånsom mot materialer ved maskinvask av instrumenter og vedlikehold av utstyr. Egnet for plast, rustfritt stål, silikon og gummi. Også egnet for behandling av tannlegeutstyr og instrumenter.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse I



MANUELLE PROSESSER

Hvis du ikke har tilgang til en vaskedekontaminator, kan du utføre en manuell instrumentbehandling. For å sikre at sluttresultatet er på samme nivå som med en automatisert prosess, er det viktig å følge trinnene nedenfor nøye.

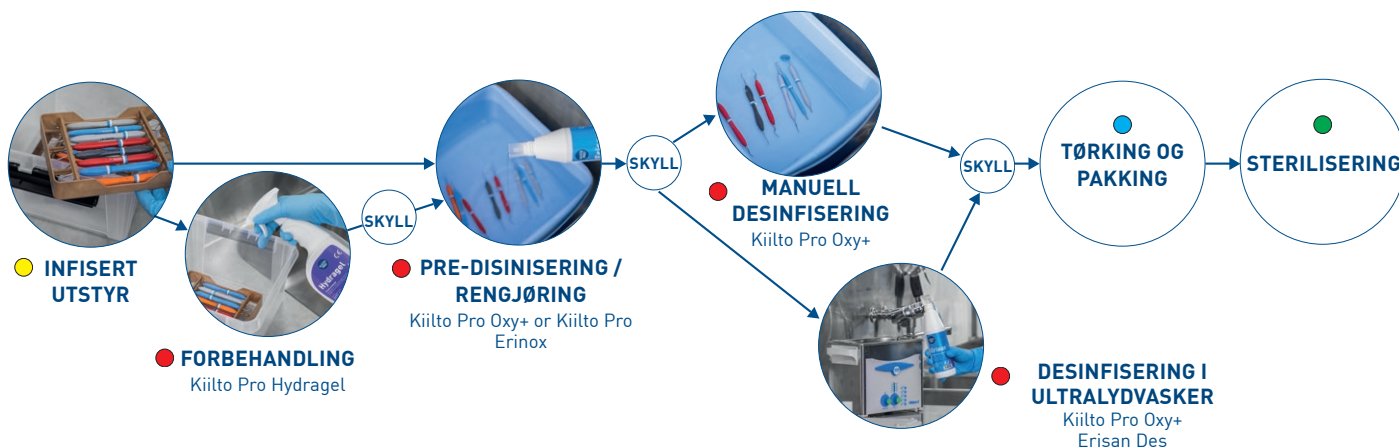

KIILTO PRO HYDRAGEL

Forbehandlingsgel

750 ml • 8222

Forhindrer mikrobiell vekst og hindrer væsker i å feste seg til instrumentoverflaten. Egnert for kontaminerte instrumenter som ikke skal vaskes umiddelbart etter bruk. Egnert for de mest brukte materialene. Ikke egnert for bruk med kobber- eller messingutstyr. Vannløselig, lett å skylle av.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse I



KIILTO PRO ERINOX

Spesialrengjøringsmiddel

1 l • 8113 | 5 l • 8114

Spesialrengjøringsmiddel for manuell rengjøring av instrumenter. Produktet kan også brukes i ultralydvaskere. Lavtskummende. Fjerner fett og organisk materiale effektivt.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse I



KIILTO PRO ERISAN OXY+

Desinfeksjon

50 g • 8116

Et effektivt desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksid og pereddiksyre i engangsposer. Gir utmerkede rengjøringsresultater. Egnert for bløtlegging av instrumenter, overflatedesinfisering av medisinsk utstyr og desinfeksjon av helsetekstiler som ikke tåler termisk desinfisering.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse II (NB 0537)

DOKUMENTERT EFFEKT:
EN 13727 (bacteria)
EN 13697 (bacteria and fungi)
EN 14348 (tuberculosis and mycobacteria)
EN 13624 (yeasts / fungi)
EN 14476 viruses (norovirus, adenovirus and polio)
EN 16615 (bacteria / yeast)
EN 16616 (bacteria, fungi, mycobacteria – textile disinfection)
EN 17126 (spores, Clostridioides difficile)
EN 14561 (bacteria – soaking of instruments)
EN 14562 (yeasts – soaking of instruments)
EN 14563 (mycobacteria – soaking of instruments)



KIILTO PRO ERISAN DES

500 ml • 8126 | 3 l • 8127

Den synergistiske virkningen av kvaternært ammonium og amino-fenoksyetanol er effektiv for overflatedesinfisering av medisinsk utstyr, bløtlegging av instrumenter og som desinfeksjonsmiddel ved ultralydrenngjøring. Også egnert for sensitive materialer. Den fortynnede løsningen er holdbar i opptil 4 dager.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse IIa (NB 0537)

DOKUMENTERT EFFEKT:
EN 13727 (bacteria)
EN 13697 (bacteria / yeasts)
EN 13624 (yeasts)
EN 14476 (Enveloped virus / Murine Norovirus)
EN 16615 (bacteria / yeast)
EN 14561 (bacteria / soaking of instruments)
EN 14562 (yeasts / soaking of instruments)

BEHOLD DENNE BROSJYREN

See andre siden for hygieneplan ->

Personlig hygiene

Håndvask



ANTIBAC HÅNDSÅPE
603024 / 750 ml

Mild såpe uten farge og parfyme. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Svanemerket og AllergyCertified. Til manuell ståldispenser art. 601006.



ANTIBAC HÅNDSÅPE
600867 / 600 ml

Mild såpe uten farge og parfyme. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Svanemerket og AllergyCertified. Med trykkpumpe. Kan også brukes med manuell ståldispenser med lang hendel art. 601009.



ANTIBAC HÅNDSÅPE
600865 / 700 ml

Mild såpe uten farge og parfyme. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Svanemerket og AllergyCertified. Til berøringsfri bag-in-box-dispenser art. 600861.

Hånddesinfeksjon



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON
85 %, FLYTENDE
601637 / 700 ml

Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Uten parfyme. AllergyCertified dispenserart. 600861.



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON
85 %, SOFTGEL
603007 / 700 ml

Softgel med dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Uten parfyme. AllergyCertified. Til berøringsfri bag-in-box-dispenser art 600861.



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON
85 %, FLYTENDE
601658 / 600 ml

Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Uten parfyme. AllergyCertified. Med trykkpumpe. Kan brukes med manuell ståldispenser med lang hendel, art. 601009.



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON
85 % FLYTENDE, MED
DOSEINGSKAPSEL
601638 / 750 ml

Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Uten parfyme. AllergyCertified. Til manuell ståldispenser med lang hendel, art. 601006.

Kirurgi

Hånddesinfeksjon 75 %



ANTIBAC KIRURGISK
HÅNDDDESINFEKSJON 75 %
603044 / 750 ml

Tilfredsstiller krav til kirurgisk prosedyre og har 3 timers effekt. Dokumentert effekt med 3 min. påføring. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Til manuell ståldispenser art. 601006.



ANTIBAC KIRURGISK
HÅNDDDESINFEKSJON 75 %
603045 / 600 ml

Tilfredsstiller krav til kirurgisk prosedyre og har 3 timers effekt. Dokumentert effekt med 3 min. påføring. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Med trykkpumpe. Kan også brukes med manuell ståldispenser med lang hendel art. 601009.



ANTIBAC KIRURGISK
HÅNDDDESINFEKSJON 75 %
601191 / 700 ml

Tilfredsstiller krav til kirurgisk prosedyre og har 3 timers effekt. Dokumentert effekt med 3 min. påføring. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Til berøringsfri bag-in-box-dispenser art. 600861.

Hånddesinfeksjon 85 % med klorhexidin



ANTIBAC KIRURGISK
HÅNDDDESINFEKSJON 85 %
603030 / 600 ml

Tilsatt 0,5 % klorhexidin. Tilfredsstiller krav til kirurgisk prosedyre og har 3 timers effekt. Dokumentert effekt med 90 sek. påføring. Tilsatt fuktighetsgivende middel. Med trykkpumpe. Kan også brukes med manuell ståldispenser med lang hendel art. 601009.



Instrumenter

Automatisert desinfisering og vasking



KIILTO PRO INNOVA 100
8235 / 5 l • pH 11

Effektiv, ikke-skummende og skånsom mot materialer ved maskinvask av instrumenter og vedlikehold av utstyr. Egnet for plast, rustfritt stål, silikon og gummi. Også egnet for behandling av tannlegeutstyr og instrumenter. Anbefalt dosering er en konsentrasjon på 0,2 til 0,5 %. Anbefalt vasketemperatur er ca. 55 °C.

Forbehandling av instrumenter



KIILTO PRO HYDRAGEL
8222 / 750 ml • pH 9

Forbehandlingsprodukt for instrumenter som ikke blir vasket umiddelbart etter bruk. Påfør gel-en og oppbevar i beholder med lokk i opptil 5 dager.

Andre instrumenter (dentale instrumenter)



KIILTO PRO ERISAN OXY+
8116 / 50 g • pH 7,5

Desinfisering med bløtlegging:
2 %-bruksløsning = 30 min bløtlegging.
5 %-bruksløsning = 15 min bløtlegging

Dentale sugesystemer:
2 ½ l vann / 1 pose = 2 %. Sug gjennom sugeslangene, la det ligge i slangene over natten. Skyll neste morgen.

Manuell rengjøring



KIILTO PRO ERINOX
8113 / 1 l & 8114 / 5 l • pH 10
Effektivt spesialrengjøringsmiddel for manuell rengjøring av instrumenter og for vask med ultralydvaskere.



KIILTO PRO STEEL
8224 / 1 l • pH 3

Gir glans og fjerner kalk og oksidfilm på instrumenter. 30-min bløtlegging + manuell rengjøring og avkalkingsprogram i dekontaminator.

Tekstiler



KIILTO PRO TEXTILE WASH
63274 / 4 kg • pH 10,5

Uparfymert vaskepulver for fargede tekstiler 30–95 °C. Også egnet for rengjøringstekstiler.



KIILTO PRO NEUTRAL SOFTENER
63256 / 5 l • pH 8

Uparfymert tømyknér for tekstiler. Gjør vasken myk og fresh og fjerner statisk elektrisitet.



KIILTO PRO ERISAN OXY+
8116 / 50 g • pH 7,5

For desinfisering av helsetekstiler. Dosering: 1 pose Erisan Oxy+ -desinfiserende pulver sammen med vaskemiddel (1/2 mengde vaskemiddel / 5–7 kg vask.

Overflater

Desinfisering



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
600642 / 1000 ml

Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. For synlig rene overflater av ikke-invasivt medisinsk utstyr.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON+ 75 % MED TENSID
603000 / 750 ml

Både desinfiserende og rengjørende. Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. For synlig rene overflater av ikke-invasivt medisinsk utstyr.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
600643 / 4 liter

Effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 75 % KLUTER
603047 / 300 stk

Effektive mot bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 95 %
600523 / 750 ml

Effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Egner seg spesielt til desinfisering av overflater som lett korroderer. Væsken fordampes raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.



OXIVIR EXCEL WIPES ALKOHOLFRIE
603055 / 100 stk

Effektive mot bakterier, virus og gjærsopp. Basert på hydrogenperoksid. Bruksklare servietter til overflater som tåler vann og syre.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 75 % STORE KLUTER
601672 / 12 stk

Effektive mot bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Hver klut dekker inntil 10 m².



ANTIBAC KEYBOARD WIPES
603025 / 80 stk

Enkeltpakke servietter med effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. Utviklet spesielt for desinfisering av tastaturer, datamus, analoge telefoner, kalkulatorer og lignende utstyr.



ANTIBACT
63241 / 1 l & 61242 / 5 l • pH 10

Effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Har både desinfiserende og rengjørende effekt. Kvartærbasert.



ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON 75 % SERVIETTER
603011 / 150 stk

Effektive mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Brukes på overflater som tåler alkohol. Etterlater ingen stoffer på flaten.



Overflater Rengjøring



KIILTO PRO VIENO UPARFYMERT
41080 / 1 l & 41081 / 5 l • pH 8,5
Uparfymert univiersalrengjørings-
middel. Dosering: 1-5 ml / 1 l vann



KIILTO PRO SUPERQUICK SPURT
410462 / 750 ml • pH 10
Bruksklar universalrengjøring.
Ingen avskylling nødvendig.



KIILTO PRO VIENO
T7504.001 / 1 l & / 5 l • pH 8,5
Univiersalrengjøringsmiddel.
Dosering: 1-5 ml / 1 l vann



ANTIBAC TOUCHSCREEN WIPES
603026 / 95 stk.
Enkeltpakke servietter for
rengjøring av berøringsskjermer.
Etterlater en ren og blank skjerm
uten skjolder. Væskemengden er
tilpasset for elektroniske
skjermer.



KIILTO PRO PROBIO
41301 / 1 l & 41305 / 5 l • pH 7,5
Et effektivt, probiotisk universal-
rengjøringsmiddel. Rengjør harde
overflater samtidig som det etterlater
gunstige, probiotiske mikrober som
fjerner skadelige mikrober, biofilm
og organiske materialer på overflaten
med langvarig effekt. Dosering:
Daglig rengjøring 10 ml/1l vann,
grunnrengjøring 30 ml/1 l vann



ANTIBAC GULVKLUTER
601657 / 20 stk.
Bruksklare engangskluter som
kan festes til en mopp eller
annet passende utstyr.
Frisk sitronduft.

Luktkontroll



KIILTO PRO ODOR STOP
41046 / 750 ml • pH 10
Bruksklart, biologisk middel som fjerner lukt
forårsaket av organisk materiale. Middelet er basert
på effektive bakteriesporer, og luktfjernings-
effekten begynner 12 timer etter påføring på grunn
av sporenes naturlige effekt. Produktet er parfymert.

Pauserom Oppvaskmidler



KIILTO PRO GREEN EASY TABS
63223 / 1,8 kg (100 stk) • pH 10,5
Maskinoppvasktabletter.
Dosering 1 tablett per vask.



KIILTO PRO BIODISH
63102 / 1 l • pH 7
Skånsomt, manuelt oppvask-
middel. Dosering 1 ml / 1 l vann.
Også egnet til vask av overflater.

Andre overflater og inventar



KIILTO PRO SUPERQUICK SPURT
410462 / 750 ml • pH 10
Bruksklart universalrengjørings-
middel for overflater, f.eks.
kjøleskap.



KIILTO PRO WINDOW SPURT
411252 / 750 ml • pH 8
Bruksklart rengjøringsmiddel
for glass, speil og metallover-
flater. Fjerner effektivt smuss
og fett, og tørker raskt.



KIILTO PRO EASYDES SPRAY
8183 / 750 ml • pH 10
Et bruksklart, alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som
også har rengjørende egenskaper. For overflater og
kjøleskap, f.eks. Effektiv mot mikrober og fjerner synlig
smuss og fett.

Toaletter

Rengjøring av overflater



KIILTO PRO ROSITA
T7048.001 / 1 l
& T7084.005 / 5 l • pH 5,5
Svakt surt rengjøringsmiddel.
Dosering 1-5 ml / 1 l vann. Fukt en
klut med middelet og tørk av.



KIILTO PRO VIENO UPARFYMERT
41080 / 1 l & 41081 / 5 l • pH 8,5
Uparfymert universal-
rengjøringsmiddel.
Dosering: 1-5 ml / 1 l vann.



KIILTO PRO WC GEL
41113 / 750 ml • pH 0,7
Toalettrens som effektivt fjerner
kalk, rust og urinavleiringer.
Inneholder fargestoff. Behagelig
parfymert. La virke i 5-10 min.



KIILTO PRO SANI SPURT
41002 / 750 ml • pH 3
Surt og brukervennlig rengjørings-
middel. Produktet skummer, hvilket
gir lengre virketid og forenkler
rengjøringen av overflaten.
Behagelig parfymert.



Sluttrengjøring

Etter at det siste dyret er behandlet, må det utføres en avsluttende rengjøring. Denne starter med den vanlige rengjøringen som alltid gjøres mellom behandlingen av hvert dyr.

Stegene i sluttrengjøringen:

1. Tørk av overflatene på behandlingsutstyret, behandlingsbordet, nærliggende flater og eventuelt gulvet.

Rengjør sanitærområdene med et desinfeksjonsmiddel. Vi anbefaler produktene Antibac® Overflatedesinfeksjon eller alkoholfrie Oxivir Excel Wipes.

Husk til slutt god håndhygiene.

Overflater på veterinærklinikken blir alltid tørket gjentatte ganger med desinfeksjonsmidler, så under avsluttende rengjøring anbefaler vi å bruke et lett alkalisk universalrengjøringsmiddel som Kiilto Pro Superquick Spurt eller Kiilto Pro Vieno.



Overflaterengjøring

Vedlikeholdsrengjøring må utføres regelmessig, for eksempel daglig eller ukentlig. Hensikten er å opprettholde et avtalt hygien nivå og sikre at lokalene fungerer godt mellom rengjøringene. Hvor ofte det må rengjøres avhenger av lokalets formål og ønsket hygien nivå.



KIILTO PRO SUPERQUICK SPURT

Universalrengjøringsmiddel

750 ml • 410462 | 5 l • 410463

Bruksklar universalrengjøring for alle overflater som tåler vann, også voksede og malte flater. Overflaten tørker raskt. Svært godt egnet til fjerning av fettflekker og fingeravtrykk. Laget av fornybare og biologisk nedbrytbare råvarer. Effektiv rengjøring, krever ikke skylling.



VIENO NON-PERFUMED

Universalrengjøringsmiddel

41080 | 1 l & 41081 | 5 l

Svakt alkalisk universalrengjøringsmiddel med meget bra rengjøringssegenskaper for daglig rengjøring av alle typer harde overflater. Laget av fornybare og biologisk nedbrytbare råvarer.

Overflatedesinfisering



ANTIBAC®

OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %

Overflatedesinfeksjon

1000 ml • 600642

Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Brukes på synlig rene flater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol, samt andre overflater.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse IIa (NB 0537)

EFFEKT TESTDOKUMENTASJON:

EN 13727 (bakterier)
EN 16615 (bakterier/gjærsopp)
EN 13624 (gjærsopp)
EN 14476 (kappekleddet virus, adenovirus, murine norovirus)
EN 14348 (tuberkulose / mykobakterier)



OXIVIR EXCEL WIPES

Alkohol frie desinfeksjonsservietter

100 stk. / boks • 603055

Effektiv mot bakterier, virus og gjærsopp. Basert på hydrogenperoksid. Bruksklare servietter til overflater som tåler vann og syre.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse IIa (NB 0044)

EFFEKT TESTDOKUMENTASJON:

EN 13727 (bakterier)
EN 13624 (gjærsopp)
EN 14476 (alle virus)
EN 16615 (bakterier/gjærsopp)



ANTIBAC®

OVERFLATEDESINFEKSJON+ 75 % MED TENSID

Overflatedesinfeksjon med rengjørende effekt

750 ml • 603000

Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Brukes på synlig rene flater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol, samt andre overflater.

CE-merket medisinsk utstyr, klasse IIa (NB 0537)

EFFEKT TESTDOKUMENTASJON:

EN 13727 (bakterier)
EN 16615 (bakterier/gjærsopp)
EN 13624 (gjærsopp)
EN 14476 (kappekleddet virus, adenovirus, murine norovirus)
EN 14348 (tuberkulose / mykobakterier)

Pleieende produkter for personlig hygiene - Antibac®

Rene og velstelte hender er den beste beskyttelsen mot infeksjoner.

Antibac-produktene er utviklet for profesjonelle for å sikre god personlig hygiene og håndhygiene. Produktene er beregnet for hyppig bruk, og det er derfor lagt spesiell vekt på deres egenskaper. De uparfymerte og fuktighetsgivende produktene er egnet selv for den mest sensitive hud.

Mild hudvask



ANTIBAC HÅNDSÅPE

Mild, flytende såpe
600 ml • I 600867



Den svanemerkede såpen har en hudvennlig pH og inneholder ikke parfyme eller fargestoffer. Den egner seg derfor godt der man vasker hendene ofte. Såpen har en behagelig, tyntflytende konsistens som er lett å fordele. Den skummer lett og skylles lett av for å redusere risikoen for såperester på hendene. Såpen er ikke antibakteriell. Svanemerket og AllergyCertified. Pumpeflaske.



ANTIBAC HÅNDSÅPE

Mild, flytende såpe
750 ml • 603024



Den svanemerkede såpen har en hudvennlig pH og inneholder ikke parfyme eller fargestoffer. Den egner seg derfor godt der man vasker hendene ofte. Såpen har en behagelig, tyntflytende konsistens som er lett å fordele. Den skummer lett og skylles lett av for å redusere risikoen for såperester på hendene. Såpen er ikke antibakteriell. Svanemerket og AllergyCertified. Brukes med manuell ståldispenser.

Hånddesinfeksjon



Antibac® Hånddesinfeksjon er utviklet for å ha størst mulig effekt på bakterier, virus og gjærsopp, samtidig som den skal skåne huden mest mulig. Den er sertifisert av AllergyCertified, en uavhengig internasjonal ordning som stiller strenge krav til produktets innhold. Alkoholbasert desinfeksjon som Antibac gir ikke resistente bakterier. I motsetning til antibiotika og enkelte andre desinfeksjonsmidler ødelegger alkohol mikrobenes protein (arvestoff) slik at de ikke kan utvikle resistens. Antibac Hånddesinfeksjon er testet etter gjeldende EN-standarder og har god dokumentasjon på virkning og effekt.



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE

Hånddesinfeksjon
600 ml • 601658



Dokumentert effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden, slik at den etterlates myk og sunn selv ved hyppig bruk. Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer. AllergyCertified. Pumpeflaske.



ANTIBAC HÅNDDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE

Hånddesinfeksjon
750 ml • 601638



Dokumentert effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden, slik at den etterlates myk og sunn selv ved hyppig bruk. Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer. AllergyCertified. Brukes med manuell ståldispenser.



Hudpleie

Hyppig håndvask og desinfeksjon tørker ut huden, spesielt i den kalde årstiden. Regelmessig hudpleie og fuktighetstilførsel bidrar til å holde huden sunn og smidig, der hudens lipidlag gir beskyttelse mot urenheter og værforhold.

Huden må fuktes etter vask, spesielt dersom du må vaske hendene ofte og huden allerede er tørr. Kremenes viktigste egenskaper er å beskytte og tilføre fuktighet. Å ta vare på huden og bruke krem regelmessig bidrar også til å forebygge hudproblemer. Uparfymerte kremer er det tryggeste valget for alle hudtyper.



PLUTECT DUAL

Hudkrem uparfymert
100 ml • 2541



Hudpleiekrem med beskyttende effekt.

Inneholder 25 % fett. Uten parfyme. Kremene er fremstilt av 97 % naturlige ingredienser. Andelen av naturlige ingredienser er beregnet ved hjelp av Natural Origin Index i henhold til ISO 16128.

Dermatologisk testet. Svanemerket og sertifisert av AllergyCertified.



Hvordan velge riktige produkter:

																		
Håndvask																		
Hånddesinfisering																		
Hudpleie																		
Overflaterengjøring																		
Overflatedesinfisering																		
Forbehandling av instrumenter																		
Instrument rengjøring																		
Manuell desinfisering av instrumenter																		
Automatisk vask av instrumenter																		

Dine kontaktpersoner:

Pia Sveistrup

Regional Manager Rogaland/Øst
Tel. 948 85 647
pia.sveistrup@kiilto.com

Jørgen F. Gorseth

Regional Manager Midt-Norge
Tel 400 76 517
jorgen.gorseth@kiilto.com

Inge Andre Bakke

Regional Manager Vest
Tel +47 919 03 303
inge.andre.bakke@kiilto.com

Hans Erik Jakobsen

Regional Manager Øst
Tel +47 919 08 233
hans.jakobsen@kiilto.com