



## ARTIKEL-NR. DE903LMHE0

### Material:

- dreilagig (zwei Lagen non-woven, eine Lage schmelzgeblasener Stoff)
- Nasenbügel aus Stahl/Metall

### Spezifika:

- volle Nasen- und Mundbedeckung
- Einweg-Maske, nicht waschen!
- leicht, geringer Atemwiderstand, hohe Filtration
- Produktfarbe: variabel
- Ohrenschlaufen ermöglichen einfaches Anlegen und hohen Tragekomfort
- Nasenbügel für optimalen Sitz
- Maße: 17,5 x 9,5 cm (Länge x Breite)
- Produktgewicht: ca. 2 g
- Lieferung: ab 5 Werktagen (ab Auftragsklarheit)

## Anwendung und Gebrauchsanweisung:

Die Mund-Nasen-Maske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einer Schadstoffbelastung ausgesetzt ist.


Vor dem Aufsetzen der Maske die Hände waschen!



Achten Sie darauf, dass die Maske richtig herum liegt und der blaue Stoff nach außen zeigt. Formen Sie den Nasenbügel vor und legen Sie die Maske über Mund und Nase.




Ziehen Sie die Halterung über die Ohren. Die Maske muss dicht und bequem sitzen.

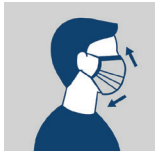

Ziehen Sie die Maske oben über die Nase und unten über den Unterkiefer, damit keine Luft von außen eindringen kann.



Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis die Maske bequem sitzt und abdichtet. Wenn Sie die Anpassung nur mit einer Hand vornehmen, könnte die Leistung der Maske weniger wirkungsvoll sein.

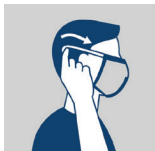

Ziehen Sie die Maske nur mit sauberen Händen aus und zwar indem Sie die Ohrenschlaufen entfernen. Vermeiden Sie, mit den Fingern außen auf die Maske zu fassen (während und nach dem Gebrauch).



## Lagerung und Haltbarkeit:

Das Produkt sollte kühl, sauber und trocken im Temperaturbereich von -20 °C bis + 25 °C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent gelagert werden. Die Masken sollten innerhalb von 24 Monaten aufgebraucht werden, das Produktionsdatum ist auf dem Beipackzettel angegeben. Vor Gebrauch bitte stets überprüfen, ob das Produkt noch haltbar ist.

## Warnhinweise:

Überzeugen Sie sich stets, dass die Mund-Nasen-Maske folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:

- für die Anwendung geeignet sein
- korrekt sitzen
- bei Bedarf ausgetauscht werden

Diese Produkte schützen den Träger nicht vor Gasen und Dämpfen.

Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die wenig Sauerstoff besitzen.

Gesichtshaare im Maskenbereich können sich als hinderlich für den Sitz der Maske erweisen und die Abdichtung gefährden.

Mund-Nasen-Maske bei Beschädigungen, Durchfeuchtung, hohem Atemwiderstand oder am Ende einer Schicht auswechseln und entsorgen.

Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden.

Kinder sollten eine Maske nur unter Anleitung eines Erwachsenen verwenden.

## Entsorgung:

Zur Entsorgung von gebrauchten Mund-Nasen-Masken beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften.

## Verpackung:

Karton mit 50 Masken im Polybeutel

