


beurer MG 850

fascia releaZer

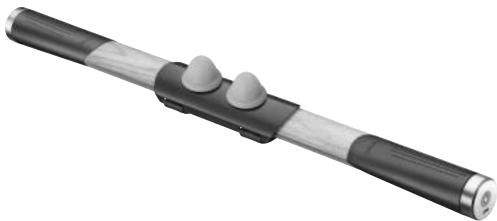

NL Fasciemassageapparaat en opzetstukken
voor de Deep-ReleaZer
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



Waarschuwing

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en uitgebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage, beauty en lucht. Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	3	8. Gebruik	10
2. Verklaring van de symbolen	3	8.1 Behandeling voorbereiden....	10
3. Aanwijzingen	5	8.2 Fascia-ReleaZer® inschakelen/ vibratiestand selecteren	11
4. Kennismaking	5	8.3 Opzetstukken aanbrengen....	11
5. Voorgeschreven gebruik.....	7	8.4 Oefeningen	12
6. Beschrijving van het apparaat... 8		9. Reiniging en onderhoud	12
6.1 Beschrijving van het apparaat – fasciemassageapparaat	8	10. Toebehoren en reserveonder- delen	13
6.2 Beschrijving van het appa- raat – opzetstukken voor de Deep-ReleaZer	9	11. Verwijdering	13
7. Ingebruikname.....	9	12. Technische gegevens	13
		13. Garantie / service	14

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 x Fascia-ReleaZer®
- 1 x set opzetstukken voor de Deep-ReleaZer
- 1 x laadsnoer (micro-USB)
- 1 x netadapter
- 1 x trainings-dvd met trainingsoefeningen
- 1 x overzicht met oefeningen

2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHU- WING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Aanwijzing	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.

	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
	Instructie lezen
	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen
	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet als huisvuil worden aangeboden.
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Voedingseenheid, schakelmodus; voedingseenheid met schakelmodus; SMPS
	Veiligheidstransformator, kortsluitvast
	Polariteit
	Gelijkstroom
	Energie-efficiëntieklasse 6

3. Aanwijzingen



WAARSCHUWING

Waarschuwing voor het gebruik van de Fascia-ReleaZer®

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken!
- De Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken zijn geen medische apparaten. Het zijn instrumenten voor massagebehandelingen.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren niet zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde dealers worden uitgevoerd. Als u de Fascia-ReleaZer® opent of zelf repareert, kan een probleemloze werking niet langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks opent of zelf repareert, vervalt de garantie. Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren!
- Gebruik dit apparaat NIET op het hoofd.
- Gebruik dit apparaat NIET in het gezicht.
- Gebruik dit apparaat NIET op de geslachtsdelen.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde onderdelen.

Tips voor de omgang met accu's

- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met veel water spoelen en een arts raadplegen.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten ze op de juiste wijze worden opgeladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.
- Laad de accu volledig op, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk Ingebruikname).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

4. Kennismaking

Was zijn fasciën?

Fasciën zijn fijne, taaie bindweefsels die als een driedimensionaal netwerk door ons hele lichaam lopen. De menselijke fasciën liggen rond alle spieren, botten, organen en zenuwcellen in het lichaam en zorgen er zo voor dat de afzonderlijke lichaamsdelen bij elke beweging langs elkaar af glijden en op hun plek blijven. Bovendien fungeren fasciën als bodes tussen de spiercellen en zorgen ze ervoor dat wij onze spierkracht überhaupt kunnen gebruiken. De spanningsenergie tus-

sen de pezen en botten wordt daarbij opgeslagen en bij ontspanning plotseling weer losgelaten.

Fasciën worden korter en harder als ze niet regelmatig worden gestimuleerd (vergelijkbaar met spieren). De structuren van de fasciën raken verkleefd en worden dikker, waardoor ze poreus worden en hun elasticiteit verliezen. Als gevolg daarvan ontstaan kleine scheurtjes en ontstekingen, waardoor er ook afbreuk aan de krachtoverbrenging en de coördinatie wordt gedaan. Verdikte fasciën kunnen in enkele gevallen ook op de zenuwen drukken en daardoor klachten veroorzaken. Het korter worden en verkleefd raken van de fasciën kan verschillende oorzaken hebben, zoals onvoldoende beweging, een verkeerde houding of psychische stress.

Hoe werkt de Fascia-ReleaZer®?

Verkleefd en verhard fascieweefsel kan door afwisselende druk- en trekbelastingen weer soepeler en elastischer worden. Met behulp van de Fascia-ReleaZer® als zelfhulpinstrument worden deze receptoren in ons weefsel positief gestimuleerd. Zo wordt het regeneratievermogen van het weefsel vergroot en versneld.

Bovendien wordt de bloedtoevoer geoptimaliseerd en de zenuwen functioneren beter. Door de stimulatie met de Fascia-ReleaZer® worden er nieuwe voedingsstoffen naar de cellen gebracht en kunnen afvalstoffen beter worden afgevoerd. Hierdoor wordt het weefsel vernieuwd en neemt de elasticiteit en de belastbaarheid in het behandelde gedeelte toe.

De vibratiemassage maakt het weefsel elastischer, waardoor de spieren los worden gemaakt. Omdat de stijfheid daardoor afneemt, neemt de beweeglijkheid toe.

Volgens het onderzoek:

Gerandomiseerd, dubbel gecontroleerd, gestandaardiseerd klinisch onderzoek, Europa.

Uitgevoerd door:

Centrum voor Integratieve Therapie, Duitsland.

Instituut voor Medische Psychologie en Gedragsneurobiologie, universiteit van Tübingen, Duitsland.

Onderzoeksinstituut voor gezondheidswetenschappen (IUNICS), universiteit van de Balearen, Palma, Spanje.

Hoe werken de opzetstukken voor de Deep-ReleaZer®

Een stijve rug wordt dankzij de verschillende opzetstukken verlicht. Bovendien worden de spieren in de rug en nek en in de heupen en dijbenen losgemaakt. De Fascia-ReleaZer® kan met of zonder opzetstukken worden gebruikt.


De massagebehandeling hoort op elk moment als aangenaam ervaren te worden. Het is mogelijk dat er lichte bloeduitstortingen ontstaan; dat is een positief effect van de behandeling. Met de Fascia-ReleaZer® kan de doorbloeding namelijk gericht worden gestimuleerd. Ook kan de huid in sommige gevallen rood worden. Als u overmatig veel last hebt van huidirritaties, dient u het gebruik van de Fascia-ReleaZer® te stoppen en een arts te raadplegen.

Wanneer moet ik welk opzetstuk gebruiken?

Het “zachte” opzetstuk gebruikt u als u met de behandeling start en bij lichte spierpijn. Na een aantal behandelingen kunt u overstappen op het “middelharde” opzetstuk. Dit opzetstuk versterkt de spieren.

De volgende stap is het “harde” opzetstuk voor een intensere behandeling.

Om een individuele en aangename behandeling mogelijk te kunnen maken, adviseren wij u gebruik te maken van de gevoeligheidsschaal/pijnschaal. Deze helpt u bij het vinden van de optimale drukkracht. Omdat elke gebruiker pijn anders ervaart, adviseren wij u een massagebehandeling binnen het aanbevolen gevoeligheidsbereik

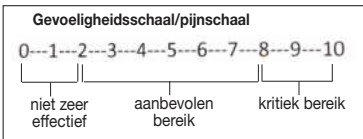

(2-8) uit te voeren. Bij een gevoeligheid tussen 0 en 2 is de behandeling niet heel effectief, omdat de werking van de Fascia-ReleaZer® incl. opzetstukken niet tot diep in het weefsel kan doordringen. Een massagebehandeling in het kritieke bereik (hoger dan 8) raden wij af, omdat er in dit bereik te veel druk op het weefsel wordt uitgeoefend.

5. Voorgeschreven gebruik



WAARSCHUWING

Gebruik de Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken uitsluitend voor het masseren van de spierfasciën, rug, nek, heupen en armen van mensen.

De Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken zijn geen medische apparaten, maar instrumenten voor massagebehandelingen.

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

Gebruik de Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken

- niet bij ziekelijke veranderingen of verwondingen in het te masseren lichaamsgedeelte (bijv. hernia, open wond),
- niet tijdens de zwangerschap,
- niet wanneer u slaapt,
- niet in de auto,
- niet bij dieren,
- niet bij werkzaamheden waarbij een onverwachte reactie gevaarlijk kan zijn,
- niet na de inname van substanties, die tot een beperkte waarneming kunnen leiden (bijv. pijnstillende middelen, alcohol),
- nooit langer dan 15 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat voordat u het opnieuw gebruikt ten minste 15 minuten afkoelen.


Indien u twijfelt of het masseerapparaat voor u geschikt is, raadpleeg dan uw arts.

Raadpleeg voor het gebruik van het massageapparaat uw dokter

- wanneer u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie achter de rug heeft,
- wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen draagt,
- bij koortsachtige verkoudheden, spataders, trombose, aderontstekingen, geelzucht, diabetes, zenuwziektes (bijv. Ischias) of acute ontstekingen.
- bij pijn met onbekende oorzaak.

6. Beschrijving van het apparaat

6.1 Beschrijving van het apparaat – fasciemassageapparaat

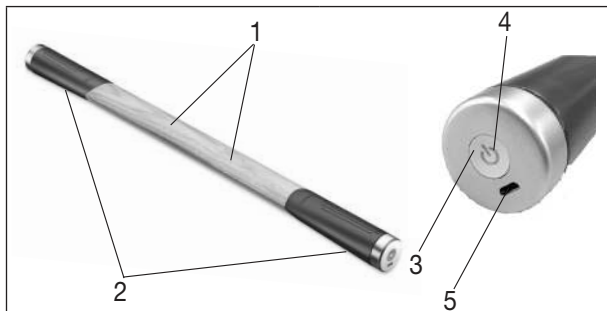


1 Behandelingsoppervlak (bestaande uit twee verschillend gewelfde behandelingsoppervlakken en twee kanten)	4 Signaallampje
2 Handgrepen	5 Micro-USB-aansluiting
3 AAN/UIT-toets	

Status signaallampje 	Vibratiefunctie
Signaallampje brandt groen	= statische vibratie
Signaallampje knippert groen	= golfvormige vibratie

Status signaallampje 	Laadfunctie (laadsnoer ingestoken)
Signaallampje knippert geel	= opladen
Signaallampje brandt geel	= opladen afgesloten
Signaallampje knippert rood	= accu bijna leeg

6.2 Beschrijving van het apparaat – opzetstukken voor de Deep-ReleaZer

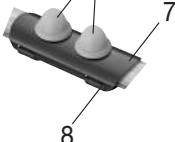	6 Opzetstukken (3 hardheden: zacht-middel-hard-hard)
	7 Houder voor opzetstukken
	8 Klittenbandsluiting voor het vastzetten van de houder


7. Ingebruikname

Aanwijzing

Voordat u de Fascia-ReleaZer® voor de eerste keer gebruikt, moet u deze eerst minstens 2,5 uur opladen. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Sluit het laadsnoer aan op de netadapter en op de Fascia-ReleaZer® (*afbeelding 1*). Steek de netadapter vervolgens in een geschikt stopcontact. U kunt de Fascia-ReleaZer® ook met het laadsnoer via de USB-aansluiting van uw computer/laptop opladen (*afbeelding 2*).

Tijdens het opladen knippert het signaallampje geel. Zodra de Fascia-ReleaZer® volledig is opgeladen, brandt het signaallampje geel. Met een volledig opgeladen accu kunt u het apparaat ongeveer 11 uur gebruiken. Zodra het signaallampje tijdens het gebruik rood begint te knipperen, moet u de Fascia-ReleaZer® opladen.

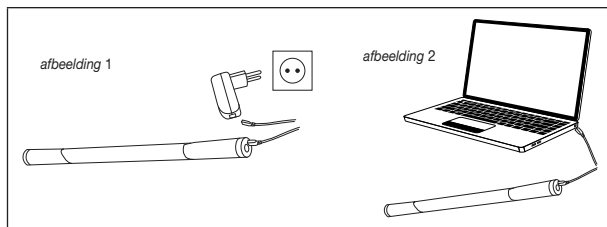

8. Gebruik

8.1 Behandeling voorbereiden

U kunt het apparaat naar keuze met of zonder plantaardige massageolie gebruiken. Bij veel lichaamsbehandling adviseren wij u de behandeling met plantaardige massageolie uit te voeren. Over het algemeen heeft het echter de voorkeur om de behandeling op een gladde en haarloze huid uit te voeren.

Gebruik geen olie of crèmes die een sterk koelend of verwarmend effect hebben, omdat deze huidirritaties kunnen veroorzaken.

Behandeling zonder massageolie (aanbevolen bij weinig of geen lichaamsbehandling):

Een behandeling zonder massageolie zorgt voor een oppervlakkige massage. Deze massagebehandeling activeert de reflexzones en behandelt het oppervlak van het weefsel.

Behandeling met massageolie (aanbevolen bij veel lichaamsbehandling en voor een massagebehandeling met een diepe werking):

Het gebruik van massageolie zorgt voor een werking tot diep in het weefsel. De doorbloeding wordt daardoor sterk gestimuleerd.



LET OP

Maak uitsluitend gebruik van plantaardige olie. Andere oliën kunnen het houten oppervlak van de Fascia-ReleaZer® namelijk verkleuren of beschadigen.

1. Breng een paar druppels plantaardige olie op uw handpalm aan.
2. Smeer de plantaardige olie nu gelijkmatig uit op het te masseren deel van het lichaam. Veeg uw handen voorafgaand aan de massagebehandeling af aan een handdoek, zodat uw handen tijdens de behandeling niet wegglijden en het siliconenoppervlak van de handgrepen niet beschadigd raakt.
3. Na de massagebehandeling moeten het houten oppervlak van de Fascia-ReleaZer®, de opzetstukken en het gemasseerde deel van het lichaam met een handdoek worden afgeveegd.

De hoeveelheid olie is volledig afhankelijk van de gewenste werking. Meer olie zorgt voor een snellere beweging en daardoor voor een intensievere doorbloeding van de huid en reflexactiviteit.

Minder olie zorgt voor een diepere en langzamere werking van de behandeling, waardoor krampen en verklevingen bijzonder effectief worden verholpen.

Een combinatie van beide is ook mogelijk. Breng hiervoor een grotere hoeveelheid olie aan op het te behandelen deel van het lichaam en maak snelle bewegingen met de Fascia-ReleaZer®. Verwijder vervolgens wat olie met een handdoek en ga verder met de behandeling van hetzelfde deel van het lichaam, maar deze keer met langzame bewegingen.

8.2 Fascia-ReleaZer® inschakelen/vibratiestand selecteren

Druk op de AAN/UIT-toets om de Fascia-ReleaZer® in te schakelen. Het signaallampje brandt nu groen en de eerste vibratiestand wordt geactiveerd.

Handeling		Vibratiestand
Eerste druk op de knop	=	De Fascia-ReleaZer® wordt ingeschakeld, het signaallampje brandt groen. Statische vibratie
Tweede druk op de knop	=	Het signaallampje knippert groen. Golfvormige vibratie
Derde druk op de knop	=	De Fascia-ReleaZer® wordt uitgeschakeld en het signaallampje gaat uit.

De Fascia-ReleaZer® kan statisch (plaatselijke behandeling) of dynamisch (bewegende behandeling) worden gebruikt.

Statische behandeling:

Met deze techniek maakt u plaatselijke verhardingen los. Oefen hiervoor ongeveer drie keer achter elkaar een gelijkmatige druk uit op hetzelfde punt.

Dynamische behandeling:

Door de beweging worden de fasciën glad gemaakt. Een snelle beweging of een voor- en achterwaartse beweging zorgt voor een oppervlakkige massagewerking in het bovenste deel van het weefsel. Een langzamere beweging zorgt voor een massage met een diepe werking.

Voorkom druk met schokachtige bewegingen, hierdoor kunnen namelijk bloedingstoringen ontstaan.

Behandelingsoppervlakken:

Wij adviseren u de massagebehandeling te starten met een van de twee verschillende gewelfde behandelingsoppervlakken. Na ongeveer een week kan de massagebehandeling met beide kanten worden voortgezet. De kanten zorgen voor een massagebehandeling met een werking tot diep in het weefsel.

8.3 Opzetstukken aanbrengen

Bevestig het gewenste opzetstuk (zacht-middelhard-hard) op de houder. Draai het opzetstuk hiervoor rechtsonder op de houder. Open vervolgens de klittenbandsluiting en trek de houder over het fascimassageapparaat. Het opzetstuk moet in het midden van het apparaat worden aangebracht. Sluit vervolgens de klittenbandsluiting.

8.4 Oefeningen



Aanwijzing

Wij adviseren u elk gebied (onderlichaam, middenlichaam en bovenlichaam) drie keer per week 15 minuten lang te behandelen.

Ook adviseren wij u bij een oefeningseenheid alle drie de gebieden te trainen. U kunt er echter ook voor kiezen om u op een van de hierboven vermelde gebieden te richten.

Veeg de Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken na elke massagebehandeling met een droge (hand)doek af. Er mogen geen olieresten op het apparaat achterblijven, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten.

Alle oefeningen vindt u op onze meegeleverde trainings-dvd of op ons overzicht met oefeningen.

Fascimassageapparaat

Oefeningen onderlichaam

Onderbenen, bovenbenen, scheenbenen, kuiten

Oefeningen middenlichaam

Onderrug (niet op de ruggengraat), zitvlak

Oefeningen bovenlichaam

Nek, bovenarmen, onderarmen

Opzetstukken voor de Deep-ReleaZer

Rug, nek Heupen, dijbenen, binnenkant van de armen en handpalmen

9. Reiniging en onderhoud

De levensduur van de Fascia-ReleaZer® is afhankelijk van de zorgvuldige hanteling van het apparaat.



LET OP

- Stel de Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken niet bloot aan schokken, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Maak de Fascia-ReleaZer® en de opzetstukken na elk gebruik schoon met een droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd, tenzij dit onder toezicht gebeurt.

10. Toebehoren en reserveonderdelen

De reserveonderdelen en de aan slijtage onderhevige onderdelen zijn verkrijgbaar via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten). Geef het bijbehorende bestelnummer op.

	Artikel- c.q. bestelnummer
Nabestelset opzetstukken	163.819

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



Verwijdering van accu's

Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood,

Cd = batterij bevat cadmium,

Hg = batterij bevat kwik.



12. Technische gegevens

Gebruik op netstroom: Ingang Uitgang	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 5,0 V === 1,0 A, 5,0 W
Gemiddelde efficiëntie bij gebruik	≥ 77,11 %
Energieverbruik bij nullast	≤ 0,065 W
Afmetingen	60 x 4,7 x 3,7 cm
Gewicht	ca. 600 g
<u>Accu:</u> capaciteit nominale spanning typenaam	2200 mAh 3,7 V Li-Ion

13. Garantie / service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorzwaarden laten de wettelijke garanti-everplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorzwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of gebruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;

- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen service-center en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

