

IVD



GL 44 / LD 03

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No.168 PuTuoShan Road
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



CE 0483 / CE

EC REP

Emergo Europe B.V., Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

CE 0123

Al primo utilizzo



Prima di utilizzare il misuratore di glicemia per la prima volta, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso. Controllare l'unità di misura come indicato nelle istruzioni per l'uso.


Pericolo di infezione



Il misuratore e l'accessorio entrano in contatto con sangue umano e rappresentano pertanto una possibile fonte di infezione.

- Non condividere mai l'apparecchio di misurazione, la penna pungidito e i relativi accessori con altre persone.
- Per l'utilizzo del sistema di misurazione su diverse persone, rispettare le norme igieniche comunemente utilizzate.
- Utilizzare una nuova lancetta sterile per ogni prelievo di campione di sangue.
- Prima del prelievo del campione di sangue, lavare le mani con acqua calda e sapone e asciugarle.


Preparazione della penna pungidito e dell'apparecchio

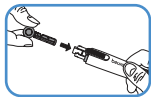

Inserimento della lancetta

Rimuovere il cappuccio dalla penna pungidito. Inserire la lancetta sterile nella penna pungidito.

Fissare la lancetta sterile sullo stelo e svitare il disco di protezione. Conservare il disco di protezione. Riposizionare il cappuccio sulla penna pungidito. Ruotare la parte superiore mobile del cappuccio finché la profondità desiderata non è visibile. Tirare indietro il dispositivo di bloccaggio fino all'innesto.

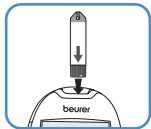


Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nell'apparecchio con i contatti in avanti.

Attendere brevemente finché dopo la breve visualizzazione della schermata di avvio non lampeggiano sul display il simbolo mano e goccia di sangue.

Prelevamento del campione di sangue

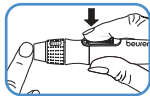


Iniezione

Appoggiare la penna pungidito leggermente a lato del centro del polpastrello. Premere il pulsante di rilascio.

La goccia di sangue fuoriuscita deve:

- essere a forma di goccia e non si deve spargere
- essere della dimensione minima di 1,4 mm (dimensione originale ●).

Posizionamento del sangue sulla striscia reattiva

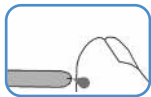

Tenere la fessura del prelievo della striscia reattiva a contatto con la goccia di sangue, finché la fessura non è completamente piena e sul display del misuratore non inizia un conto alla rovescia. Attendere circa 5 secondi finché sul display non appare il valore glicemico rilevato.

Valore normale: 2 ore dopo mangiato: 70–140 mg/dL (3,9–7,8 mmol/L)
a digiuno: 70–100 mg/dL (3,9–5,6 mmol/L)



Smaltimento delle lancette

Rimuovere il cappuccio. Posizionare su un piano il disco di protezione conservato e infilarlo con la punta dell'ago.


Tenere premuto il pulsante di rilascio e con l'altra mano tirare il dispositivo di bloccaggio. A questo punto la lancetta uscirà dal supporto. Smaltire la striscia reattiva e la lancetta in base alle norme. Riposizionare il cappuccio.

Valutazione dei valori misurati critici

Lo		Ipoglicemia < 20 mg/dL (<1,1 mmol/L)	Necessario un trattamento immediato da parte di un medico.
65 mg/dL	3,6 mmol/L	Glicemia bassa < 70 mg/dL (<3,9 mmol/L)	Fare spuntini tra i pasti principali. Seguire le indicazioni del medico.
150 mg/dL	8,3 mmol/L	Glicemia alta a digiuno > 100 mg/dL (>5,6 mmol) 2 ore dopo mangiato >140 mg/dL (> 7,8 mmol/L)	Rivolgersi al proprio medico.

<p>300 mg/dL</p> <p>16,7 mmol/L</p>	<p>Glicemia alta, a volte chetoni >240 mg/dL (> 13,3 mmol/L)</p>	<p>Si consiglia un test dei chetoni consultandosi con il proprio medico.</p>
<p>H i</p>	<p>Glicemia molto alta >630 mg/dL (> 35,0 mmol/L)</p>	<p>Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva. In caso di medesimo risultato consultare subito il medico.</p>

Messaggi sul display

LP	Batterie scariche.	Sostituire tutte le batterie.
Ht o Lt	Temperatura oltre gli intervalli consentiti.	Ripetere il test con una nuova striscia in caso di temperatura compresa tra +20 °C e +26 °C.
Err 	Striscia reattiva usata o sporca.	Inserire una striscia nuova non scaduta e ripetere la misurazione.
Err001/005	Errore di sistema.	Rimuovere le batterie. Reinserire le batterie. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio clienti.
Err002	Campione su striscia insufficiente.	Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva.