



GL 49 / LD 04

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No.168 PuTuoShan Road
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands





Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il misuratore di glicemia per la prima volta, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso. Controllare l'unità di misura come indicato nelle istruzioni per l'uso.

Pericolo di infezione

Il misuratore e gli accessori possono entrare in contatto con sangue umano e rappresentano pertanto una possibile fonte di infezione.



- Non condividere mai l'apparecchio di misurazione, la penna pungidito e i relativi accessori con altre persone.
- Per l'utilizzo del sistema di misurazione su diverse persone rispettare le norme igieniche comunemente utilizzate.
- Utilizzare una nuova lancetta sterile per ogni prelievo di campione di sangue.
- Prima del prelievo del campione di sangue, lavare le mani con acqua calda e sapone e asciugarle.

Trasmissione dei valori misurati mediante *Bluetooth*®


- Scaricare l'app gratuita "beurer HealthManager Pro" dall'Apple App Store o da Google Play.
- Attivare il *Bluetooth*® nelle impostazioni dello smartphone.
- Avviare l'app.
- Selezionare **GL 49** nell'app e seguire le istruzioni.
- Al primo collegamento, sul dispositivo viene visualizzato un codice PIN di 6 caratteri. Digitare il codice PIN sullo smartphone. Se il codice viene inserito correttamente, il dispositivo è collegato allo smartphone.



Elenco dei requisiti di sistema e dei dispositivi compatibili



Preparazione della penna pungidito e dell'apparecchio

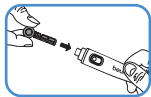

Inserimento della lancetta

Svitare il cappuccio della penna pungidito. Inserire la lancetta sterile nella penna pungidito.

Fissare la lancetta sterile sullo stelo e svitare il disco di protezione. Conservare il disco di protezione. Riavvitare il cappuccio sulla penna pungidito. Ruotare la parte superiore mobile del cappuccio finché la profondità desiderata non è visibile. Tirare indietro il dispositivo di bloccaggio fino all'innesto.




Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nell'apparecchio con i contatti in avanti.

Attendere brevemente finché, dopo una breve visualizzazione della schermata di avvio, il simbolo della goccia di sangue non lampeggia sul display.

Prelievo del campione di sangue

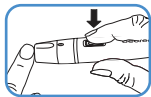


Puntura

Appoggiare la penna pungidito leggermente a lato del centro del polpastrello. Premere il pulsante di rilascio.

La goccia di sangue prelevata deve:

- essere a forma di goccia e non si deve spargere
- essere della dimensione minima di 1,2 mm (dimensione originale ●).

Posizionamento del sangue sulla striscia reattiva

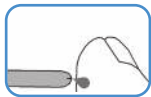

Tenere la fessura del prelievo della striscia reattiva a contatto con la goccia di sangue, finché la fessura non è completamente piena e sul display del misuratore non inizia un conto alla rovescia. Attendere circa 5 secondi finché sul display non appare il valore glicemico rilevato.

Valore normale:	2 ore dopo il pasto:	70–140 mg/dL (3,9–7,8 mmol/L)
	a digiuno:	70–100 mg/dL (3,9–5,6 mmol/L)

Smaltimento delle lancette

Rimuovere il cappuccio. Posizionare su un piano il disco di protezione conservato e infilarlo con la punta dell'ago.

Azionare l'interruttore laterale. A questo punto la lancetta uscirà dal supporto. Smaltire la striscia reattiva e la lancetta in base alle norme. Riposizionare il cappuccio.



Valutazione dei valori misurati critici

Lo		Ipoglicemia < 20 mg/dL (< 1,1 mmol/L)	Necessario un trattamento immediato da parte di un medico.
65 mg/dL	3,6 mmol/L	Glicemia bassa < 70 mg/dL (< 3,9 mmol/L)	Fare spuntini tra i pasti principali. Seguire le indicazioni del medico.
150 mg/dL	8,3 mmol/L	Glicemia alta a digiuno > 100 mg/dL (> 5,6 mmol) 2 ore dopo il pasto > 140 mg/dL (> 7,8 mmol/L)	Rivolgersi al proprio medico.

Valutazione dei valori misurati critici

300 mg/dL	16,7 mmol/L	Glicemia alta, a volte chetoni > 240 mg/dL (> 13,3 mmol/L)	Si consiglia un test dei chetoni. Consultandosi con il proprio medico.
HI		Glicemia molto alta > 630 mg/dL (> 35,0 mmol/L)	Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva. In caso di medesimo risultato consultare subito il medico.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

GL49_2024-06-28_05_QSG_BEU_IT Salvo errori e modifiche