


beurer

PO 13 Kids

ПУЛЬСОКСИМЕТР

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

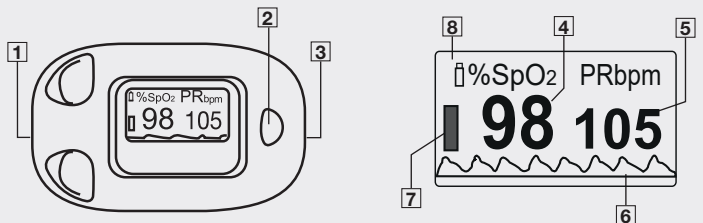

- 1 Крепление ремешка
- 2 Функциональная кнопка
- 3 Отверстие для пальца
- 4 Степень насыщения кислородом (значение в процентах)
- 5 Частота пульса (число ударов сердца в минуту)
- 6 Пульсовая волна (плетизмографическая волна; нормированная)
- 7 Шкала частоты пульса
- 8 Индикация уровня заряда батареек

ПРИМЕНЕНИЕ

Установка батареек



Крепление ремешка для ношения



-  Пульсоксиметр выключается через несколько секунд после извлечения пальца.

РУССКИЙ

 **Внимательно прочтите эту инструкцию по применению. Обращайте внимание на предостережения и соблюдайте указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию по применению для последующего использования. Обеспечьте другим пользователям доступ к инструкции. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его аксессуары и/или запасные детали не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу. Пульсоксиметр, 2 батарейки типа AAA 1,5 В, ремешок для ношения, поясной чехол, отвертка, инструкция по применению

ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны тяжелейшие травмы или даже смерть.
 ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны легкие или незначительные травмы.

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Указывает на возможную опасную ситуацию. Если ее не предотвратить, возможно повреждение прибора или окружающих объектов.
 Информация об изделии Обращает внимание на важную информацию
 Соблюдайте инструкцию Перед началом работы и/или использованием прибора или устройства изучите инструкцию
 Нельзя утилизировать (электро-)прибор вместе с бытовым мусором
 Не утилизируйте вместе с бытовым мусором батарейки, содержащие токсичные вещества
 Изготовитель
 Дата изготовления
 Знак СЕ Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
 Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращенное обозначение материала, В = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
 Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
 Прибор защищен от проникновения твердых тел размером $\geq 12,5$ мм и капель воды, падающих под углом
 Unique Device Identifier (UDI) (уникальный идентификатор устройства) для четкой идентификации продукта
 Код партии
 Артикул
 Серийный номер
 Полномочный представитель в Швейцарии
 Медицинское изделие
 Артикул
 Рабочие части типа BF
 Ограничение температуры
 Ограничение по влажности
 Ограничение давления воздуха
 Символ импортера
 Подавление сигнала тревоги
 Производитель согласно предписанию по упаковке (PPWR)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Целевое назначение

Пульсоксиметр предназначен для неинвазивного измерения степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO_2) и частоту сердечных сокращений (частоты пульса) дома и в больницах (за исключением помещений классов AP и APG). Данный прибор не предназначен для длительного мониторингирования.

Целевая группа

Пульсоксиметр предназначен для людей в возрасте от года с сопутствующими заболеваниями и без них, которым необходимо измерять степень насыщения артериальной крови кислородом (SpO_2) и частоту сердечных сокращений (частоту пульса). Он разработан для детей с массой тела от 10 до 40 кг, кончиками пальцев шириной от 7 до 11 мм и длиной не менее 30 мм, у которых отсутствуют противопоказания. Детям младше 12 лет разрешается использовать прибор только под присмотром взрослых. Минимальный возраст для применения зависит от веса ребенка и размера его пальцев, поэтому применение может быть возможно раньше или позже.

Показания

Пульсоксиметр особенно подходит для пациентов, находящихся в группе риска, а также для детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей или апноэ во сне. Пульсоксиметр также подходит для детям с симптомами пониженного насыщения крови кислородом (например, одышка, увеличение частоты сердечных сокращений, снижение работоспособности, нервозность или повышенная потливость).

Клиническая польза

Пульсоксиметр позволяет быстро и просто определить степень насыщения кислородом, а также снижение степени насыщения крови кислородом.

Противопоказания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ используйте пульсоксиметр в следующих случаях:

- при аллергии на резиновые изделия;
- если прибор или используемый для измерения палец влажные;
- для младенцев младше одного года;
- при слишком большой толщине пальца, которая не позволяет легко ввести его в зажим прибора (размеры кончика пальца: ширина > прим. 11 мм);
- на пальцах слишком маленькой ширины и длины (размеры кончика пальца: ширина пригл. < 7 мм, длина пригл. < 30 мм);

- при наличии на пальцах анатомических изменений, отеков, шрамов или ожогов;
- если нельзя обеспечить состояние покоя для пациента (например, при дрожании руки).

Нежелательные побочные эффекты

- Травмирование пальцев в результате химических или тепловых ожогов, потемнение кожи, давящая эрозия, утрата сенсорных свойств, гангрена.
- Механизмами этих осложнений могут быть: ишемия из-за сдавливания, длительное использование, перегрев датчика, неправильное использование датчика, короткое замыкание.
- Возможная погрешность измерения на поврежденном пальце. В этом случае определяется слишком низкое значение SpO_2 .
- Низкая точность измерения SpO_2 у пациентов в критическом состоянии: собственная потенциальная погрешность 3–4 % при измерениях, проводимых для таких пациентов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение следующих указаний может привести к травмам или материальному ущербу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Проверьте комплектность поставки.
- Регулярно проверяйте пульсоксиметр на предмет видимых повреждений и достаточного заряда батареек. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь в сервисную службу Beurer или к авторизованному торговому представителю.
- Не используйте дополнительные детали, которые не рекомендованы производителем и не предлагаются в качестве принадлежностей.
- Ни в коем случае не вскрывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, в противном случае производитель не гарантирует его безупречную работу. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу Beurer или к авторизованному торговому представителю.

Общие предупреждения

- У лиц с нарушениями кровообращения длительное использование пульсоксиметра может привести к появлению болей. Поэтому не используйте пульсоксиметр на одном пальце больше 2 часов.
- Пульсоксиметр всегда показывает измеренное значение на определенный момент времени; однако он не годится для непрерывного наблюдения и контроля. Прибор откалиброван для отображения функционального насыщения крови кислородом.
- У пульсоксиметра нет функции тревожной сигнализации, поэтому он не годится для оценки медицинских результатов.
- Не пытайтесь сами поставить себе диагноз на основании результатов измерений с помощью прибора и не проводите самолечение без консультации с лечащим врачом. В частности, не следует самовольно принимать новые лекарства или менять вид и (или) дозировку назначенных лекарств.
- В случае выявления хронического снижения насыщения кислородом необходимо постоянное наблюдение с помощью пульсоксиметра под контролем врача. Резкое снижение насыщения крови кислородом с сопутствующими симптомами или без них требует немедленного врачебного осмотра. В этом случае речь может идти о ситуации, опасной для жизни.
- Во время измерения не направляйте взгляд внутрь прибора. Красный свет и невидимый инфракрасный свет пульсоксиметра вредны для глаз.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями и (или) опытом, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили от вас указания по использованию прибора. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте (опасность удушья).
- Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию прибора.
- Индикация пульсовой волны и графическое отображение частоты пульса не позволяют оценить пульс или интенсивность кровоснабжения в месте измерения, а служат исключительно для представления изменения текущего оптического сигнала в месте измерения; они не позволяют выполнить надежную пульсовую диагностику.
- При сильно пигментированной коже результаты измерений могут быть неточными.
- НЕ используйте пульсоксиметр в следующих случаях:
 - во время проведения обследования МРТ или КТ;
 - во время транспортировки пациента за пределами медицинского учреждения;
 - во время измерения артериального давления со стороны той руки, на которой надето манжета;
 - если пальцы грязные, заклеены пластырем или на ногти нанесен лак;
 - при наличии поблизости горючих и взрывоопасных газовых смесей;
 - в больничных помещениях класса AP и APG.

Общие меры предосторожности

УВЕДОМЛЕНИЕ

При несоблюдении следующих указаний возможно получение неверных результатов измерения или возможен сбой измерения.

- На палец, используемом для измерения, не должно быть лака, накладных ногтей и любых других косметических средств.
- Следите за тем, чтобы ноготь на пальце, используемом для измерения, был коротко острижен и подушечка пальца накрывала чувствительные элементы в корпусе.
- Во время измерения палец, рука и все тело должны быть неподвижны.
- У лиц с нарушением сердечного ритма измеренные значения степени насыщения кислородом SpO_2 и частоты сердечных сокращений могут быть искажены, или измерение вообще может оказаться невозможным.
- При одновременном использовании электрохирургических инструментов или дефибриллятора работа пульсоксиметра может быть нарушена.
- В случае отравления угарным газом пульсоксиметр показывает слишком большие значения.
- Для гарантии достоверного результата измерения в непосредственной близости от пульсоксиметра не должно быть мощных источников света (например, люминесцентных ламп или прямых солнечных лучей).
- У лиц с пониженным артериальным давлением, больных желтухой или принимающих сосудосуживающие средства возможно получение неверных или искаженных результатов измерения.
- У пациентов, которым в прошлом вводились медицинские красители, и у пациентов с аномальным уровнем гемоглобина может наблюдаться искажение результатов измерения. Речь идет, в частности, об отравлениях угарным газом и метгемоглобином,

которые возникают, например, в результате введения местных анестетиков или при дефиците метгемоглобинредуктазы.

- Результат измерения может оказаться неточным у пациентов с артериальными катетерами, гипотонией, сильным сужением сосудов, малокровием или переохлаждением.
- Используйте прибор при соответствующих допустимых условиях эксплуатации и хранения.
- Защищайте пульсоксиметр от пыли, сотрясений, сырости, слишком высоких и слишком низких температур и не допускайте его контакта со взрывчатыми веществами.
- Храните в месте, недоступном для детей, домашних животных и вредителей.
- Не используйте прибор рядом с сильными электромагнитными полями и держите его вдали от радиоаппаратуры или мобильных телефонов.
- Для проведения измерений температура прибора должна соответствовать комнатной. Если прибор хранился при максимальной или минимальной температуре хранения и транспортировки, а затем помещается в среду с температурой 20 °C, рекомендуется подождать около 4 часов перед его использованием.
- Формирование среднего значения данных и обработка сигнала задерживают обновление значений SpO₂. Если период обновления данных составляет менее 30 секунд, время на определение динамических средних значений увеличивается, что связано с ухудшением сигнала, низкой перфузией или другими нарушениями.
- Для проверки работоспособности прибора можно использовать функциональные тестеры, например симулятор Fluke INDEX-2LFE, симулятор Fluke INDEX ProSim 8. Подробное описание процедуры см. в руководстве по эксплуатации.
- Функциональные тестеры не могут использоваться для оценки точности пульсоксиметра.

Указания по обращению с батарейками

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность взрыва! Опасность пожара!** Несоблюдение следующих указаний может привести к травмам или к перегреву, вытеканию, выпуску воздуха, поломке, взрыву или возгоранию батареек.
- Данный прибор содержит непerezаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Запрещается заряжать, принудительно разряжать, нагревать, разбирать, вскрывать, разбивать, деформировать, герметизировать или модифицировать батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания батареек и контактов батарейного отсека.
- Защищайте батарейки от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, сильного нагрева и попадания воды.
- Воздействие на батарейки чрезвычайно высокой температуры или чрезвычайно низкого давления воздуха может вызвать взрыв или утечку легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Утилизируйте неисправные и разряженные батарейки своевременно и надлежащим образом (см. главу «Утилизация»).
- Не используйте модифицированные или поврежденные батарейки.
- Всегда выбирайте батарейки подходящего типа.
- Всегда правильно устанавливайте батарейки с учетом полярности (+/–).
- Не используйте внутри прибора батарейки разных производителей, разной емкости (новые и использованные), разного размера и типа.
- Если батарейка потекла, очистите отсек для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- При попадании жидкости из батарейки на кожу или в глаза промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Опасность проглатывания!** Храните батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Проглатывание может привести к ожогам, серьезным повреждениям внутренних органов и летальному исходу.
- Не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните батарейки в хорошо проветриваемом, сухом и прохладном помещении в контейнере из непроводящего материала, чтобы исключить их короткое замыкание друг с другом или другими металлическими предметами.
- Содержите батарейки в чистоте и сухости.
- Держите батарейки вдали от воды.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките батарейки из отсека для батареек.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не используйте перезаряжаемые батарейки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Функциональная кнопка

Функциональная кнопка пульсоксиметра выполняет следующие функции.

- Функция включения: для включения пульсоксиметра удерживайте функциональную кнопку нажатой.
- Функция яркости: для настройки яркости дисплея удерживайте функциональную кнопку нажатой во время работы прибора.

 Ориентация индикатора дисплея (вертикальный или горизонтальный формат) выполняется автоматически. Благодаря этому показания на дисплее всегда хорошо видны, независимо от того, как Вы держите пульсоксиметр.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ	
Приведенная ниже таблица для оценки результатов измерения НЕ подходит лицам с выявленными определенными заболеваниями (например, астма, сердечная недостаточность, заболевания дыхательных путей), а также для измерений на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Если у Вас ранее были выявлены какие-либо заболевания, для оценки результатов измерений обратитесь к врачу.	
Результат измерения SpO ₂ (степень насыщения кислородом) в %	Оценка состояния/необходимые меры
99–94	Диапазон нормальных значений
93–90	Диапазон пониженных значений: рекомендуется обратиться к врачу
< 90	Диапазон критических значений: немедленно обратитесь к врачу

Источник: основываясь на издании Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722795.

Снижение насыщения кислородом в зависимости от высоты		
	В следующей таблице содержится информация о влиянии высоты над уровнем моря на значение насыщения кислородом и возможных последствиях для человеческого организма. Приведенная ниже таблица НЕ подходит для лиц с выявленными определенными заболеваниями (астма, сердечная недостаточность, заболевания дыхательных путей и пр.). У лиц с ранее выявленными заболеваниями симптомы болезни (например, гипоксия) могут проявиться уже на меньших высотах.	
Высота над уровнем моря	Ожидаемое значение SpO ₂ (степень насыщения кислородом) в %	Последствия для человека
1500–2500 м	> 90	Горная болезнь не проявляется (как правило)
2500–3500 м	~ 90	Горная болезнь, рекомендуется акклиматизация
3500–5800 м	< 90	Очень частые проявления горной болезни, настоятельно необходима акклиматизация
5800–7500 м	< 80	Тяжелая гипоксия, пребывание возможно лишь ограниченное время
7500–8850 м	< 70	Опасность для жизни, необходима срочная медицинская помощь
Источник: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1–37.		

ОЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ

Не стерилизуйте пульсоксиметр этиленоксидом или высоким давлением! Прибор не предназначен для стерилизации. Ни в коем случае не опускайте пульсоксиметр под воду, так как в этом случае в него может попасть жидкость, что приведет к повреждению пульсоксиметра.

- После каждого применения очищайте корпус и прорезиненную внутреннюю поверхность пульсоксиметра мягкой салфеткой, смоченной медицинским спиртом.
- Если Вы не собираетесь пользоваться пульсоксиметром более месяца, извлеките батарейки из прибора, чтобы не допустить вытекания.

ХРАНЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Храните пульсоксиметр в сухом помещении. Слишком высокая влажность воздуха может привести к повреждению пульсоксиметра или сокращению его срока службы.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы прибор следует утилизировать отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования прибора. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Они могут содержать тяжелые металлы, поэтому их следует утилизировать отдельно. Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ: Pb = свинец; Cd = кадмий; Hg = ртуть.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ?

Проблема	Возможная причина	Устранение
На дисплее отображается Finger out («Палец не вставлен»).	Палец, используемый для измерения, неверно вставлен в пульсоксиметр.	Вставьте палец в пульсоксиметр еще раз.
Неверно отображаются результаты измерения.	Значение SpO ₂ слишком низкое (< 70 %).	Проведите измерение повторно. Если данная проблема возникает снова, а Вы уверены, что прибор работает нормально, обязательно обратитесь к врачу.
	Поблизости находится источник яркого света (например, люминесцентная лампа или прямые солнечные лучи).	Пульсоксиметр должен находится вдали от источников сильного света.
Пульсоксиметр не показывает измеренные значения или не включается.	Батарейки пульсоксиметра разряжены.	Замените батарейки.
	Батарейки вставлены неправильно.	Установите батарейки заново.
	Пульсоксиметр неисправен.	Обратитесь к торговому представителю или в сервисную службу.
Пульсоксиметр выдает прерывание измерений или большие скачки измеренных значений.	Кровь плохо поступает в палец, на котором производится измерение.	Соблюдайте предостережения и указания по технике безопасности!
	Палец, используемый для измерения, слишком велик или слишком мал.	Кончик пальца должен иметь следующие размеры: ширина 7–11 мм, длина не менее 30 мм.
	Палец, рука или тело находятся в движении.	Во время измерения палец, рука и все тело должны быть неподвижны.
	Нарушения сердечного ритма.	Обратитесь к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип	PO 13
Модель	PO 13 Kids
Метод измерения	Неинвазивное измерение степени насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом и частоты сердечных сокращений через палец
Диапазон измерений	SpO ₂ 0–100 %, Пульс 30–250 ударов/минуту
Точность	SpO ₂ 70–100 %, ±2 %, ниже 70 % не указано Пульс ≤99 bpm +/- 2 bpm, ≥100 bpm +/- 2%
Размеры	Д 59 мм x Ш 37 мм x В 35 мм
Масса	Ок. 49 г (с батарейками)
Датчик для измерения SpO ₂	Красный свет (длина волны 660 nm), оптическая выходная мощность < 6,65 мВт; инфракрасный свет (длина волны 905 nm), оптическая выходная мощность < 6,75 мВт; кремниевый приемный диод Эта информация может быть особенно полезной для врачей
Допустимые условия эксплуатации	От +10 до +40 °C, относительная влажность воздуха ≤ 75 %, давление окружающей среды 700–1060 гПа
Допустимые условия хранения	От −40 до +60 °C, относительная влажность воздуха ≤95 %
Электроснабжение	2 батарейки  типа AAA по 1,5 В
Срок службы батареек	Двух батареек типа AAA хватает примерно на 2,5 года эксплуатации при проведении трех измерений в день (по 60 секунд)

Ожидаемый срок службы прибора	Информацию о сроке службы изделия см. на главной странице
Классификация	IP22, рабочая часть типа BF
Дисплей	TFT

Серийный номер указан на приборе или в отсеке для батареек.

В связи с постоянным совершенствованием прибора компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

- Данный прибор соответствует европейскому стандарту EN 60601-1-2 (группа 1, класс В, в соответствии с CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) и требует соблюдения особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. Учитывайте, что переносные и мобильные высокочастотные коммуникационные устройства могут оказывать влияние на данный прибор. Точные данные можно запросить по указанному адресу сервисной службы.

Информирование об инцидентах

В отношении пользователей/пациентов, находящихся на территории Европейского союза и на территориях с идентичными нормативно-правовыми системами, действует следующее. Если во время или вследствие применения изделия произойдет серьезный инцидент, сообщите о нем производителю и (или) его полномочному представителю, а также в соответствующий административный орган страны — участницы ЕС, в которой находится пользователь/пациент.

Указания по электромагнитной совместимости

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Прибор предназначен для работы в условиях, перечисленных в настоящей инструкции по применению, в том числе, в домашних условиях.
- При наличии электромагнитных помех возможности использования прибора могут быть ограничены. В результате могут, например, появляться сообщения об ошибках или произойдет выход из строя дисплея/самого прибора.
- Не используйте прибор рядом с другими устройствами и не устанавливайте его на другие приборы: это может вызвать сбой в работе. Если прибор все же приходится использовать в описанных выше условиях, следует наблюдать за ним и другими устройствами, чтобы убедиться в их надлежащей работе.
- Применение принадлежностей, отличных от тех, которые предписаны изготовителем или прилагаются к данному прибору, может привести к росту электромагнитных помех или ослаблению помехоустойчивости прибора и тем самым вызвать сбой в работе.
- Переносные коммуникационные радиоприборы (в том числе периферийные — антенный кабель или внешние антенны) должны находиться на расстоянии не менее 30 см от всех компонентов прибора, в том числе от всех кабелей, входящих в комплект поставки.
- Несоблюдение данного указания может отрицательно сказаться на характеристиках мощности прибора.

ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробная информация о гарантии и гарантийных условиях находится в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки.

Возможны ошибки и изменения.



UK: BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North, WA3 2SH, Lowton, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm • Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



0483

600.95_P013Kids_2026-09-07_04_IM2_BEU_MDR_RU