

Nama dan model	EM 55
Tipe	EM 50
Bentuk gelombang output	pulsa bifasik persegi
Durasi pulsa	75 – 250 μ s
Frekuensi pulsa	8 – 100 Hz
Tegangan keluaran	Maks. 80 Vpp (pada 1000 Ω)
Pengaturan panas	1 (hingga 43 °C)
Arus keluaran	Maks. 80 mA _{pp} (pada 1000 Ω)
Tegangan suplai	Baterai polimer litium 1000 mAh
Waktu pemrosesan	20 menit; kemudian perangkat akan mati secara otomatis
Intensitas	Dapat disesuaikan dari 0 hingga 15

Kondisi pengoperasian	5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) pada kelembapan relatif 15–90 %
Kondisi penyimpanan	0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) pada kelembapan relatif 0–90 %
Dimensi	Sekitar 235 x 115 x 20 mm
Berat	86,1 g

Dapat mengalami perubahan teknis.
Nomor seri terdapat pada perangkat.
Perangkat ini mematuhi Standar Eropa EN60601-1-2 (Grup 1, Kelas B, mematuhi CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) dan tunduk pada langkah kewaspadaan khusus sehubungan dengan kompatibilitas elektromagnetik. Harap diingat bahwa sistem komunikasi HF portabel dan bergerak dapat mengganggu perangkat ini. Informasi selengkapnya dapat diminta dari alamat Layanan Pelanggan yang disebutkan atau ditemukan di bagian akhir petunjuk penggunaan.
Untuk perangkat ini, pengujian fungsi dan instruksi sesuai Pasal 5 Peraturan Operator Perangkat Medis (MPBetreibV) tidak diperlukan.
Selain itu, pemeriksaan keselamatan sesuai Pasal 6 Peraturan Operator Perangkat Medis (MPBetreibV) juga tidak perlu dilakukan.

14. CATATAN MENGENAI KOMPATIBILITAS ELEKTROMAGNETIK



PERINGATAN

- Perangkat ini cocok untuk digunakan di semua lingkungan yang tercantum dalam petunjuk penggunaan ini, termasuk lingkungan rumah tangga.
- Perangkat mungkin tidak dapat digunakan secara maksimal jika terdapat gangguan elektromagnetik. Gangguan dapat menyebabkan masalah seperti pesan kesalahan atau kegagalan tampilan/perangkat.
- Hindari menggunakan perangkat ini bersebelahan dengan atau ditumpuk di atas perangkat lain, karena dapat menyebabkan operasi yang salah. Namun, jika perlu menggunakan perangkat dengan cara yang disebutkan di atas, perangkat ini serta perangkat lain harus dipantau untuk memastikan kesemuanya berfungsi dengan baik.
- Penggunaan aksesori selain yang ditentukan atau disediakan oleh produsen perangkat ini dapat menyebabkan peningkatan emisi elektromagnetik atau penurunan imunitas elektromagnetik perangkat; hal ini dapat mengakibatkan operasi yang salah.
- Jauhkan perangkat komunikasi RF portabel (termasuk peralatan periferai, misalnya kabel antena atau antena eksternal) minimal 30 cm dari semua komponen perangkat, termasuk semua kabel yang disertakan dalam pengiriman. Kegagalan untuk mematuhi hal di atas dapat mengganggu kinerja perangkat.
- Kegagalan untuk mematuhi hal di atas dapat mengganggu kinerja perangkat.

15. GARANSI/LAYANAN

Informasi lebih lanjut mengenai jaminan dan ketentuan jaminan dapat ditemukan di lembaran jaminan yang disediakan.

Dapat mengalami kesalahan dan perubahan