


Guía de inicio rápido

Conozca su nuevo respirador con purificador de aire motorizado (PAPR) SALUS HC

salus HC






CÓMO COLOCARSE, QUITARSE Y ENSAMBLAR EL PAPR

LISTA DE PIEZAS

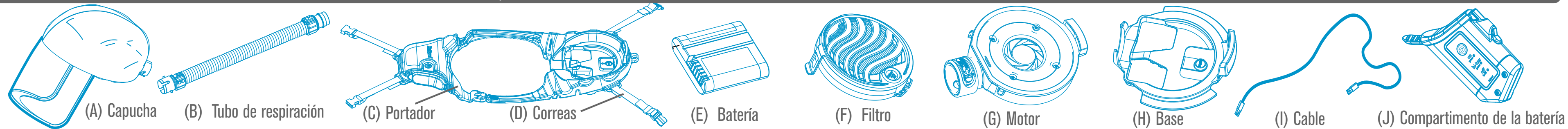


FUERA DE LA CAJA

NOTA: al utilizar una batería nueva (E) por primera vez, debe activarla electrónicamente para su uso al insertarla en el cargador durante varios segundos; una batería nueva (E) no alimentará la unidad hasta que esté activada.

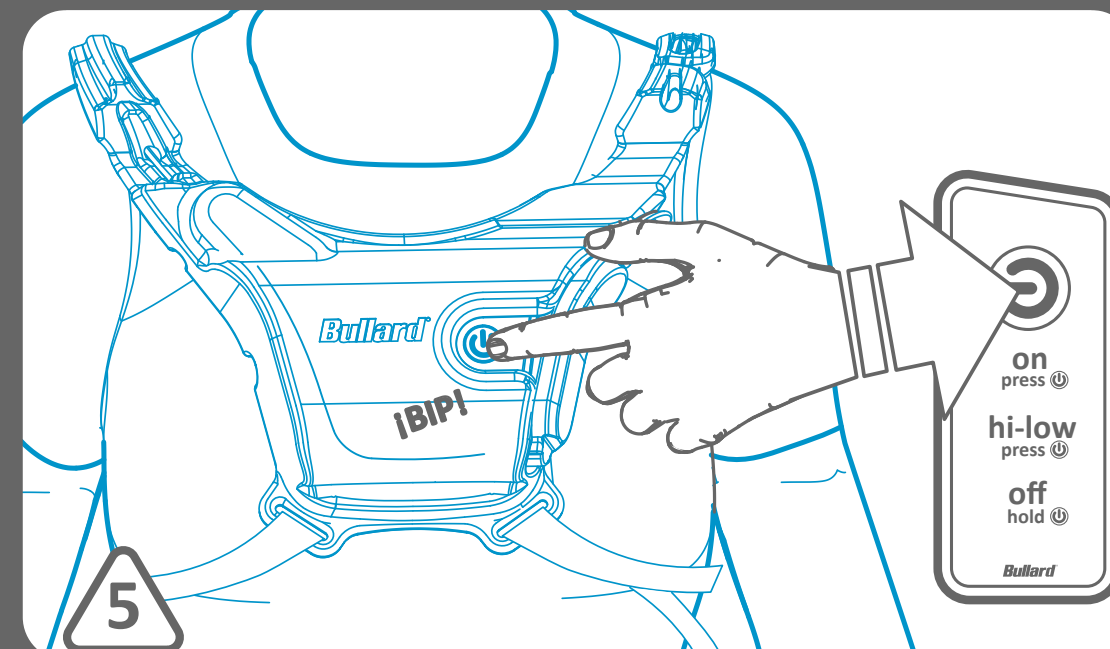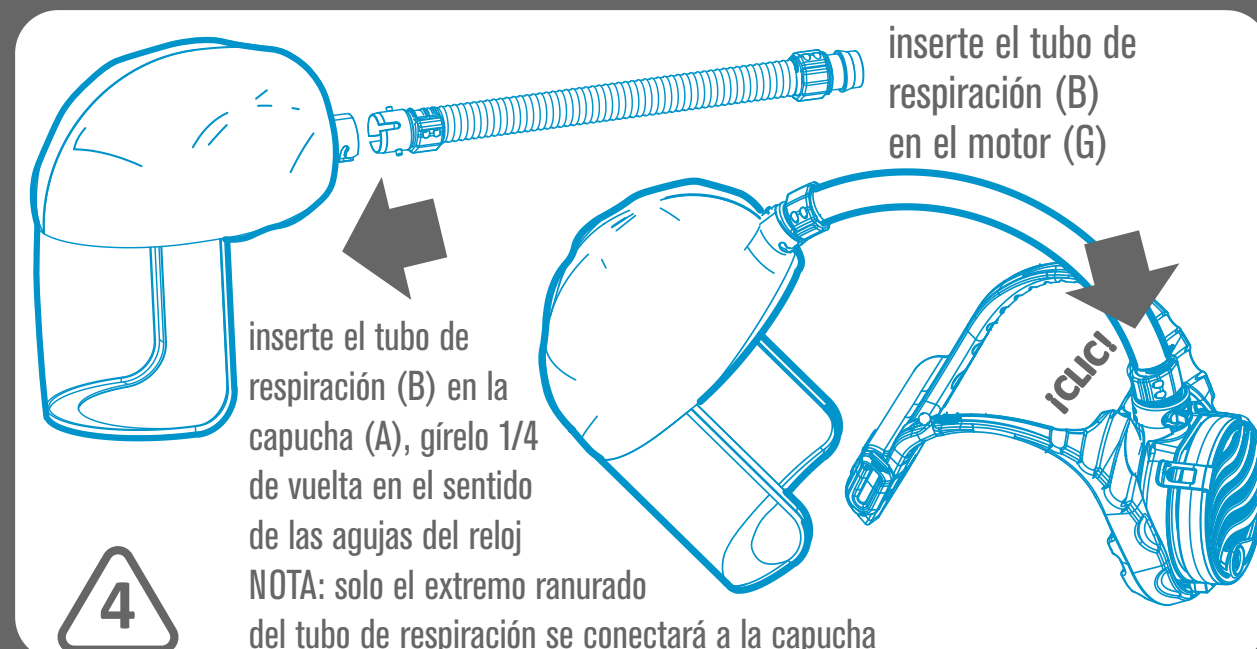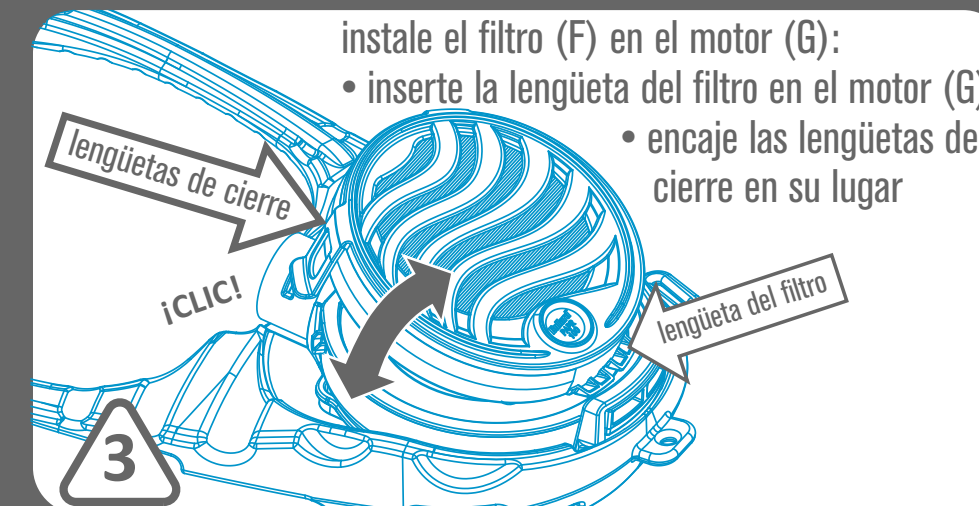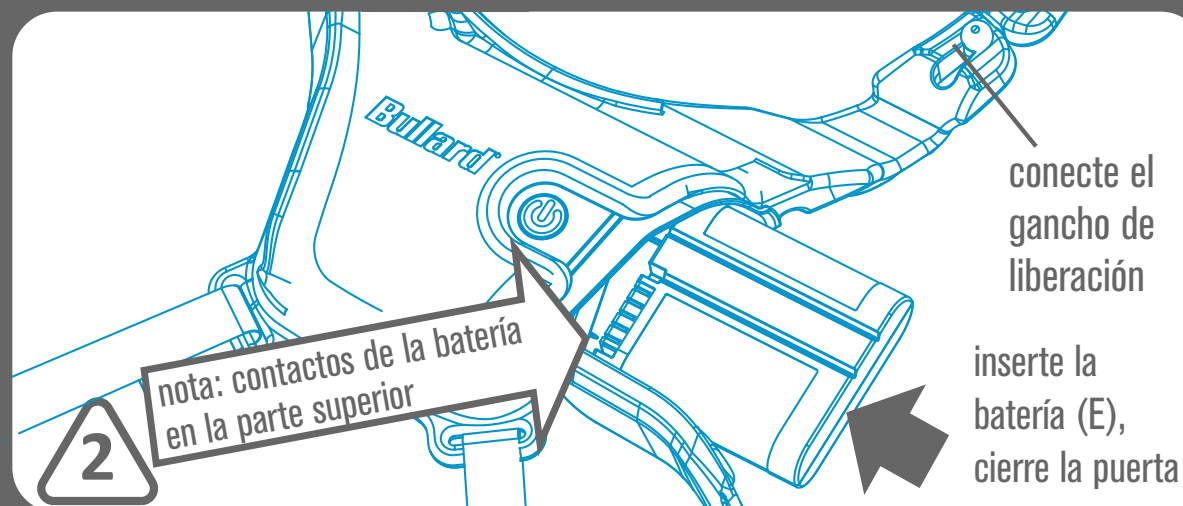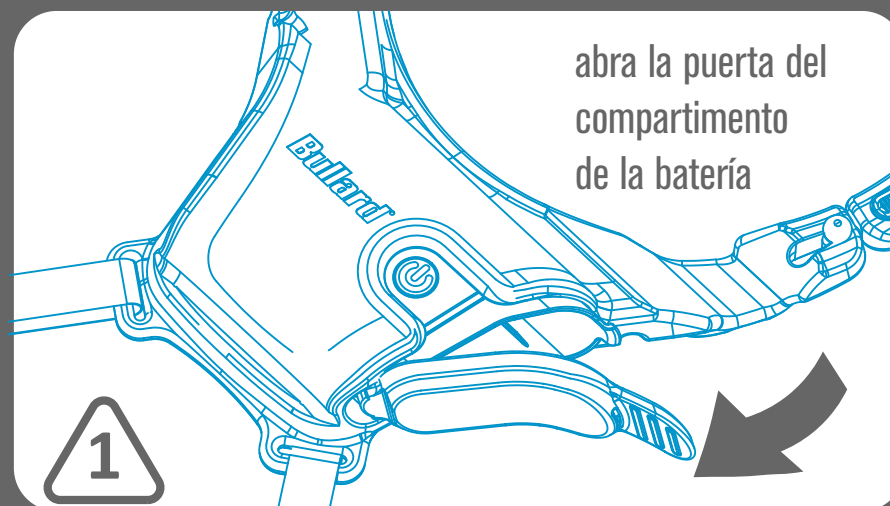

PASOS PARA COLOCARSE EL PAPR:

- encienda la unidad (presione el botón de encendido una vez; se enciende en 5 segundos)
- colóquese la unidad ensamblada sobre los hombros
- colóquese la capucha
- conecte las hebillas de las correas para el cuerpo, ajuste las correas
- presione el botón nuevamente para alternar entre un flujo alto y un flujo bajo

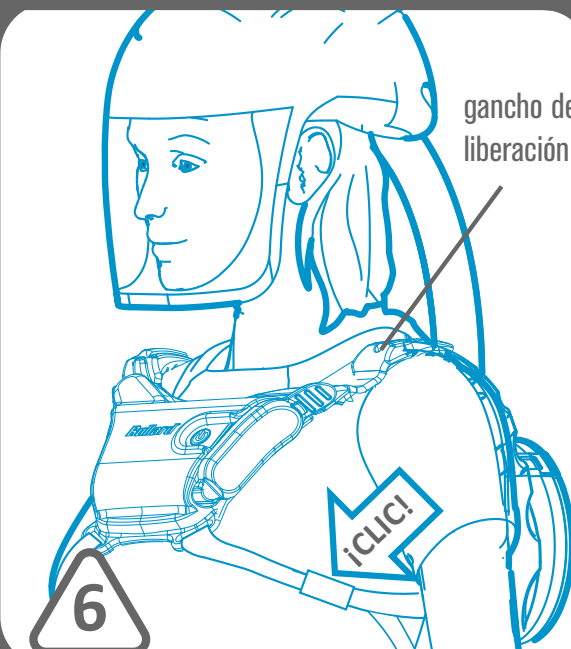

PASOS PARA QUITARSE EL PAPR:

- suelte las hebillas de las correas para el cuerpo
- desconecte el gancho de liberación
- retire el conjunto PAPR por el lado derecho de su cuerpo
- quítese la capucha
- apague la unidad (mantenga pulsado el botón)

CÓMO DESENSAMBLAR / VOLVER A ENSAMBLAR EL PAPR

PASOS PARA DESENSAMBLARLO

VUELVA A ENSAMBLARLO EN EL ORDEN INVERSO

- EXTRAIGA LA BATERÍA (E)...
abra la puerta, extraiga la batería (E)
- LIBERE LAS LENGÜETAS DE CIERRE, EXTRAIGA EL FILTRO (F)...
lengüetas de cierre
- DESCONECTE/RETIRE EL CABLE (I) DEL PORTADOR (C)...
NOTA: al reinstalar el cable (I), conecte ambos extremos primero; comenzando por la batería, introduzca el cable en la ranura del portador hasta el motor
- EXTRAIGA EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (J)...
levante el borde de la espuma con el dedo, extraiga el compartimento de la batería (J) con la mano opuesta...
- EXTRAIGA EL TUBO DE RESPIRACIÓN (B) Y EL MOTOR (G)...
desinstalar: presione la palanca, tire suavemente del tubo de respiración (B) para extraerlo...
...luego, desprenda el motor (G) de la base (H) para extraerlo
- MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE LIBERACIÓN. TIRE DE LA BASE (H) PARA EXTRAERLA

- VUELVA A COLOCAR LA BASE (H)
- VUELVA A COLOCAR EL MOTOR (G), EL TUBO DE RESPIRACIÓN (B)...
- REINSTALE EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (J)
- VUELVA A CONECTAR LOS EXTREMOS DEL CABLE (I), INTRODÚZCALO EN LA RANURA DEL PORTADOR...
- VUELVA A COLOCAR EL FILTRO (F) Y LAS CORREAS (D)...
- VUELVA A COLOCAR LA BATERÍA (E) Y LAS CORREAS (D)

Sus herramientas

Manual interactivo de usuario
Capacitación presencial, virtual y por video



Escanee el código con cualquier teléfono inteligente o ingrese a www.bullard.com/salushc/getstarted

Inspección previa

Antes de ponerse el PAPR, inspeccione todo el sistema (filtro, batería, capucha holgada y tubo de respiración) para detectar cualquier desgaste o daño, por ejemplo, rasgaduras, agujeros y grietas. Asegúrese de no utilizar el filtro después de su fecha de vencimiento. Encienda el ventilador y verifique la alarma de flujo bajo. Simule un estado de flujo bajo al bloquear la entrada del filtro con la palma de la mano. El motor del ventilador se acelerará para compensar y poco después sonará una alarma. Retire la obstrucción y la alarma dejará de sonar una vez que se restablezca el flujo. No se coloque el PAPR si faltan piezas o si alguna pieza está dañada. Reemplácelas solo con piezas de repuesto del sistema del respirador con purificador de aire motorizado (PAPR) SALUS HC.

Limpieza, almacenamiento, eliminación

- Limpie, seque e inspeccione el respirador antes de cada uso y antes de guardarlo.
- Use agua tibia, un líquido lavavajillas suave y un cepillo suave para eliminar la suciedad de las superficies exteriores.
- De acuerdo con las pautas de desinfección de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), las soluciones domésticas de lejía diluida, las soluciones de alcohol con al menos un 70 % de alcohol y la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) deberían ser efectivos para desinfectar las superficies exteriores.
- No se recomienda el lavado mecánico de las capuchas holgadas.
- No sumerja el equipo en agua.
- Las baterías dañadas o gastadas deben desecharse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales en instalaciones aprobadas de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.
- Las capuchas holgadas y los filtros usados deben desecharse según los contaminantes acumulados en ellos y de acuerdo con las normas ambientales locales.
- Almacene el PAPR en un área limpia y seca.