

chal-tec gmbh

elektronik  star



Alkoholtester AT-126

10002591



elektronik  star
www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.


Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Übersicht

“ALC NOSE” Atemalkoholtester sollte nur verwendet werden um festzustellen, ob Alkohol im Blut/Atem ist. Verwenden Sie den Tester nicht um zu entscheiden, ob Sie alkoholisiert sind, ob es sicher ist ein Fahrzeug zu lenken, ob Sie Geräte bedienen können oder ob an Sie gefährlichen Aktivitäten teilnehmen können. Jeder Körper reagiert anders auf Alkoholkonsum, so dass das Testergebnis nur als Anlehnung und nicht als Standard für konsequente Entscheidungen verwendet werden sollte. Der Hersteller, der Importeur und der Händler übernehmen keine Verantwortung für den Gebrauch dieses Gerätes. Dieser Tester sollte nicht dazu benutzt werden, festzulegen, ob jemand ein Fahrzeug steuern kann. Der Konsum von Alkohol verlangsamt Ihre Reflexe und Ihre Einschätzungskraft.

Funktionen

- ◇ Erweiterter Alkohol-Sensor
- ◇ Schnelle Ausgabe
- ◇ SMD Aufbau, stabile Ausführung
- ◇ MCU Control
- ◇ Bild und LCD-Anzeige, beleuchtet
- ◇ Handliches Design
- ◇ Sensor selbstprüfend
- ◇ Batteriestandsanzeige

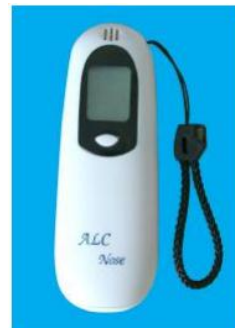

Technische Daten

Alkohol-Sensor

Erfassungsbereich: 0.00-1.00mg/L (0.00-0.20%BAC, 0.00~2.0‰BAC; 0.00-2.00mg/L)

Warnbereich: 0.24mg/L (0.05%BAC; 0.5‰BAC; 0.50g/L)

Betriebsspannung: DC 3V (2x AAA-Batterien) Haltbarkeit: > 60 Nutzungen


Betriebstemperatur: -10°C~50°C Luftfeuchtigkeit: < 93%

Testzeit: < 8 Sek. Aufwärmzeit: <18 Sek.

Display: 3 zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Maße: 103mm X 37mm X 19mm < 45g

Bedienung

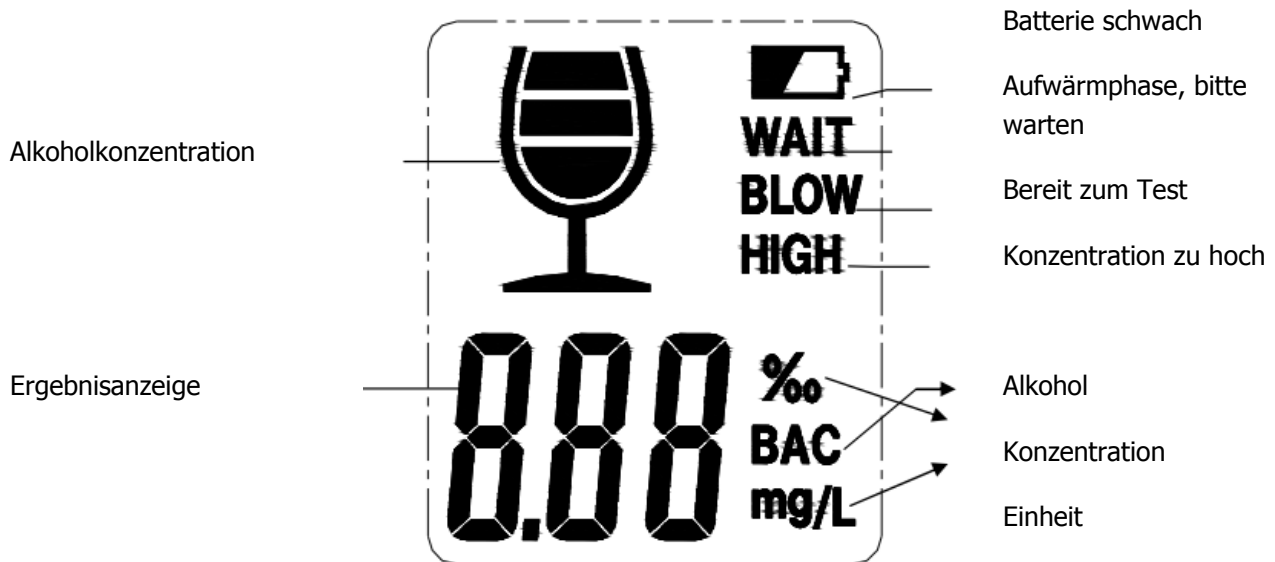

8.88	Atemalkoholkonzentration
10 Sek. / 18 Sek. Count-Down	Aufwärmphase
3 Sek. Count-Down	Batterie schwach
„C“ im Kreis	Bereit zum Test
„000“ blinkend	Gerät arbeitet
FFF	Sensorfehler

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2x AAA-Batterien ein.
2. Drücken und halten Sie „On/Off“ für eine Sekunde. Die Anzeigenbeleuchtung schaltet sich ein und der Count-Down zählt herunter. Danach wird „Wait“ angezeigt. Es wird ein Ton ausgegeben und es wird „Blow“ und ein blinkendes „C“ angezeigt. Nun ist das Gerät bereit.
3. Holen Sie tief Luft, pusten Sie nun gleichmäßig für ca. 3-4 Sek. in das Gerät bis Ton ertönt. Jetzt blinkt „000“ auf der Anzeige. Anschließend wird das Ergebnis angezeigt.
4. Das Ergebnis wird für 8 Sek. angezeigt und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Für einen erneuten Test schaltet Sie das Gerät wieder ein.

Anzeige:



SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

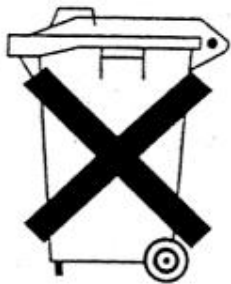

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.