

LMArte™

Profitez d'une remise de **15%** !

LM

feel the
difference



Chefs d'oeuvre
de conception.

COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES



LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



La stratification esthétique – Réussite avec LM-Arte™

LM-Arte™ est un ensemble d'instruments novateurs pour les restaurations esthétiques, spécialement conçus pour la stratification des composites. Chaque instrument répond à un code couleur et a une désignation qui correspond à sa principale fonction pour des traitements de restauration simples, efficaces et rapides. Les instruments LM-Arte™ ont été développés en collaboration avec Style Italiano, un groupe d'étude composé de cliniciens et de chercheurs passionnés spécialisés en dentisterie restauratrice esthétique.



Fondateurs de Style Italiano, Walter Devoto DDS
et Angelo Putignano MD, DDS.



Pour plus d'informations,
scannez le QR code
pour consulter le site
Internet de Style Italiano
ou le retrouver sur
Facebook.

Choisir un manche

Choisir l'instrument manuel le plus ergonomique peut faire une grande différence en matière de gênes et de troubles lors des procédures dentaires. Le diamètre du manche de l'instrument manuel ou le matériau constituant la surface de préhension sont bien loin d'être insignifiants. Avec un temps total de manipulation d'environ 2 000 heures par an, la conception, le poids et la sensibilité tactile des instruments utilisés par le praticien sont des éléments essentiels pour sa performance et sa productivité.

Les instruments LM sont disponibles avec un vaste choix de manches différents. Tous offrent une ergonomie incroyable grâce à leur revêtement silicone élastique et à leur dessin optimisé.

LMErgoSense®

Les nouvelles poignées LM-ErgoSense® convainquent par les silicones, grâce à leur adhérence antidérapante et à leur sensation tactile supérieure. Outre des résultats cliniques optimaux, les poignées LM-ErgoSense® permettent une réduction significative, voire la disparition de la fatigue et des douleurs dans les mains et les doigts. Ils préviennent le syndrome du canal carpien. De plus, le poignet et les doigts sont moins stressés.

LMErgoMax®

Une conception ergonomique classique que les autres copient. Convient parfaitement à toutes les procédures cliniques et garantit une excellente sensibilité tactile ainsi qu'une prise détendue.



Codes et diamètres

LMErgoSense®

ES = manche ErgoSense
(Ø 13,7 mm)

LMErgoMax™

XSI = manche ErgoMax
(Ø 11,5 mm)

LMArte™ Solo – Un duo d'instruments pour simplifier les cas de routine

Ces instruments sont parfaits pour simplifier vos cas quotidiens : deux instruments suffisent pour effectuer la plupart de vos restaurations de grande qualité, aussi bien antérieures que postérieures.

Les instruments LMArte™ Solo simplifient toutes les opérations, du modelage à l'ergonomie, et voire même de l'hygiène, et permettent de réduire le nombre d'instruments présents sur le plateau. Ce duo est tout ce dont vous aurez besoin pour simplifier vos instruments pour des cas courants de restaurations composite directes postérieurs et antérieurs

NOUVEAU!





LM-Arte™ Solo Anterior


Un instrument pour des restaurations esthétiques antérieures de grande qualité. Les spatules arrondies et droites sont conçues pour le modelage des dents antérieures, en particulier des surfaces labiales.



LM-Arte™ Solo Posterior

Instrument conçu pour les restaurations composites postérieures de grande qualité. L'extrémité en fouloir est conçue pour l'obturation et le modelage des matériaux composites. L'extrémité tranchante permet le façonnage de l'anatomie de la surface occlusale.



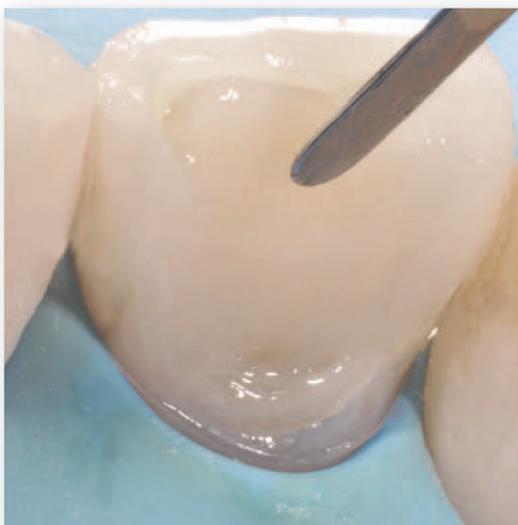

LM-Arte™ Applica

Une spatule flexible très fine conçue pour l'application et le modelage esthétique du composite. L'extrémité flexible sculpte avec précision et en douceur les couches de composite en imitant les formes naturelles de la dent.


La fine pointe de l'Applica permet un modelage dans des espaces étroits ou contre la matrice.



LM-Arte™ Applica Twist

Spatule tout particulièrement fine, flexible et étroite pour le modelage du composite. La spatule Applica Twist permet un modelage aisé dans les espaces proximaux et les crêtes marginales de la matrice. Ses pointes recourbées facilitent l'accès des zones difficiles sans compliquer inutilement la position de travail de la main.



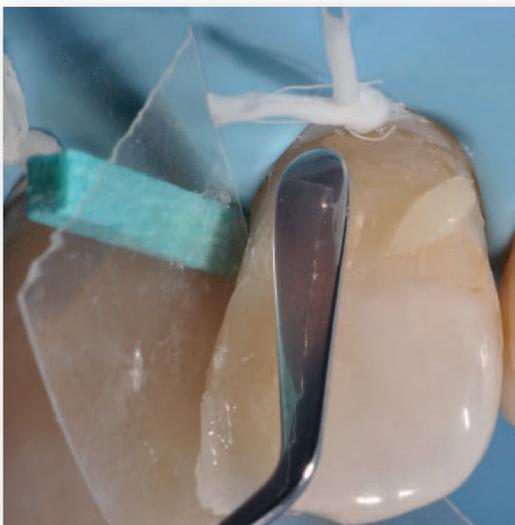

LM-Arte™ Modella

Spatule tout particulièrement fine et large pour le modelage du composite. Elle est spécialement indiquée pour les grandes faces dentaires, telles que les faces vestibulaires des incisives.

L'extrémité large de la spatule permet d'aplatir correctement le composite.

La flexibilité, la finesse et le tranchant de la pointe aident à créer des détails précis et esthétiques. La spatule convient parfaitement à l'application du

composite au moyen d'une seringue.



LM-Arte™ Condensa

Un long brunissoir arrondi spécialement conçu pour le modelage du composite. Les tiges angulées de l'instrument permettent un accès illimité à tout type de cavités.

Condensa dispose de deux extrémités, l'une fine et l'autre plus épaisse, convenant pour des cavités de différentes tailles, dans les zones antérieures et postérieures. L'extrémité arrondie permet une condensation délicate sans


aucun risque d'adhésion du composite.





LM-Arte™ Fissura


Un instrument de modelage aux pointes extrêmement affûtées. La pointe conique est parfaite pour sculpter, par un seul instrument, l'anatomie de la zone occlusale des dents postérieures. En plus d'être idéale pour le modelage des fissures et des bombés, la fine pointe en forme de sonde convient pour la stratification des composites et résines de scellement. La flexibilité de Fissura permet un sondage en douceur de l'éventuel excès de résine sur les faces dentaires.

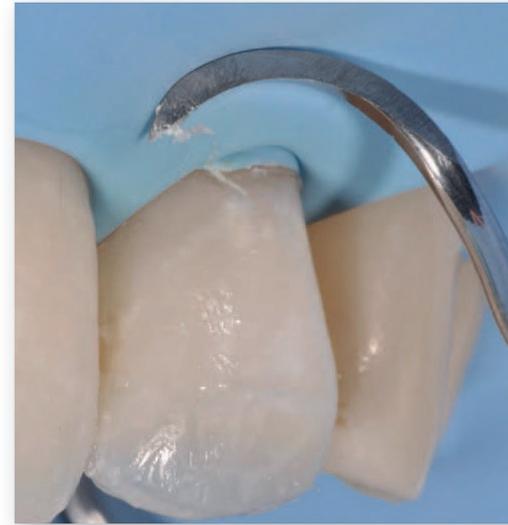

LM-Arte™ Eccesso

Un instrument conçu pour l'élimination des résidus de composite et de collage. Les extrémités avec angulations spéciales d'Eccesso sont parfaites pour enlever les excès des zones molaires cervicales antérieures et interproximales. Cet instrument fin mais solide se caractérise par l'optimisation de la longueur, de l'épaisseur et de la largeur de la lame.



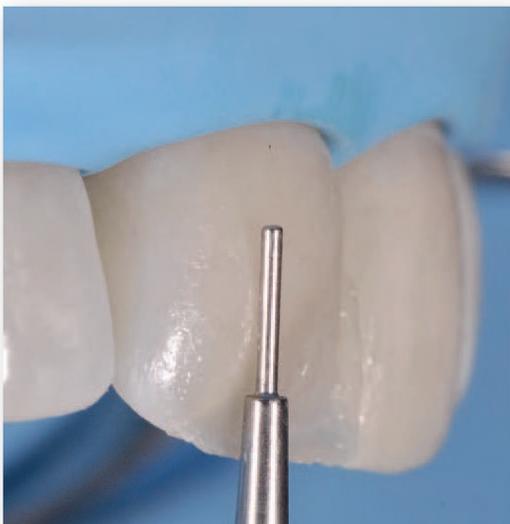

LM-Arte™ Misura

Un instrument unique pour mesurer horizontalement et verticalement l'épaisseur des couches de composite. Après la stratification mais avant le polymérisation du composite dentine, la pointe fine conique est placée sur l'émail de la dent naturelle. Grâce à ceci, le composite non-polymérisé au-dessus de la pointe conique sera condensé doucement, ce qui détermine un espace optimal (de 0,5 à 0,7 mm) pour la couche d'émail.

La pointe courte et plus épaisse de Misura est placée horizontalement sur la marge de la cavité préparée, de sorte que le bord de la pointe se trouve sur l'émail d'origine. Ceci permet de déterminer la quantité exacte de composite transparent à appliquer au finishing

line. Le résultat esthétique de la restauration finale consiste en une calibration correcte des composites opaques et translucides, ce qui prévient l'effet gris désagréable des composites.



LM-Arte™ Posterior Misura

Version postérieure du célèbre instrument Misura. Conçu pour mesurer verticalement l'épaisseur des couches de composite sur les restaurations postérieures.

L'embout en forme de fourche de cet instrument permet de façonner la paroi proximale de façon à reproduire la hauteur et l'anatomie de la dent voisine en présence d'une matrice.



NOUVEAU!



LM-Arte™ Cusp Misura

Un instrument unique pour estimer l'épaisseur et la hauteur de la cuspide afin d'évaluer la nécessité de préparer la cuspide pour des restaurations adhésives. Idéal pour évaluer la résistance de la structure naturelle de la dent et choisir la technique de restauration à utiliser.

Si l'extrémité fourchue de l'instrument pénètre jusqu'à son repère, la structure de la dent est trop faible pour supporter les forces occlusales avec une restauration directe, et d'autres options cliniques doivent donc être envisagées.



Des kits d'instruments sélectionnés pour vos restaurations uniques



LM-Arte™ Set

LMErgoSense® LM 6840 ES A43083

Prix: 279,90 **Promo: 235,36**

LMErgoMax™ LM 6840 XSI A36885

Prix: 249,90 **Promo: 212,41**

Kit complet d'instruments pour les restaurations antérieures dans une cassette LM-Servo™ 5 comprenant :

- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Eccesso



LM-Arte™ Posterior Set

LMErgoSense® LM 6844 ES A45479

Prix: 279,90 **Promo: 235,36**

LMErgoMax™ LM 6844 XSI A45480

Prix: 249,90 **Promo: 212,41**

Kit complet d'instruments pour les restaurations postérieures dans la cassette LM-Servo™ 5 comprenant :

- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa



LM-Arte™ Complete Set

LMErgoSense® LM 6848 ES A45481

Prix: 425,50 **Promo: 361,67**

LMErgoMax™ LM 6848 XSI A45482

Prix: 381,30 **Promo: 324,10**

Kit complet d'instruments pour tous les cas de restaurations dans une cassette LM-Servo™ 8 comprenant :

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella

Une gamme d'instruments complète

LMErgoSense®


Prix: 47,80

Promo: 40,63

LMErgoMax™

Prix: 42,40

Promo: 36,04

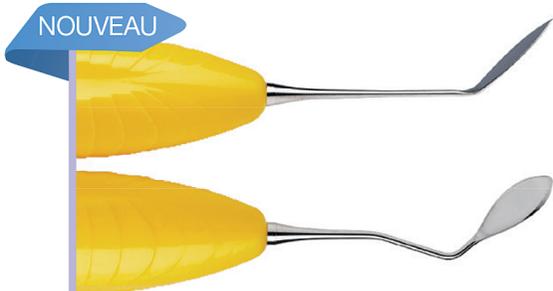


LM-Arte™ Solo Anterior

LMErgoSense® LM 431-433 ES A01006

LMErgoMax™ LM 431-433 XSI A45438

- Un instrument unique pour des restaurations antérieures esthétiques
- Conçu pour le modelage des dents antérieures, en particulier des surfaces labiales

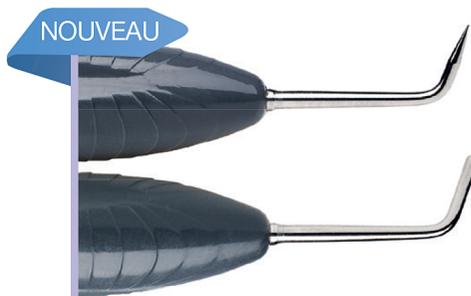

LM-Arte™ Solo Posterior

LMErgoSense® LM 434-438 ES A01007

LMErgoMax™ LM 434-438 XSI A45439

- Un instrument universel conçu pour les restaurations composites postérieures esthétiques
- Pour l'obturation et le modelage des matériaux composites et le façonnage de l'anatomie de la surface occlusale



LM-Arte™ Applica

LMErgoSense® LM 46-49 ES A43079

LMErgoMax™ LM 46-49 XSI A43074

- Une spatule très fine et flexible conçue pour l'application et le modelage esthétique du composite



LM-Arte™ Applica Twist

LMErgoSense® LM 464-494 ES A44331

LMErgoMax™ LM 464-494 XSI A43183

- Une spatule fine et étroite avec angles recourbés pour le modelage des zones difficiles d'accès telles que les parois proximales ou la crête marginale de la matrice



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense® LM 442-443 ES A45063

LMErgoMax™ LM 442-443 XSI A43230

- Une spatule très fine et flexible conçue pour l'application et le modelage esthétique du composite



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®	LM 488-489 ES	A43081
LMErgoMax™	LM 488-489 XSI	A43076

- Un fouloir long et arrondi spécialement conçu pour le modelage du composite



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense®	LM 481-487 ES	A43080
LMErgoMax™	LM 481-487 XSI	A43075

- Un instrument doté de pointes extrêmement affûtées pour le modelage des surfaces occlusales



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense®	LM 307-308 ES	A43078
LMErgoMax™	LM 307-308 XSI	A43073

- Pour l'élimination des résidus de composite et des agents de liaison



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense®	LM 496-497 ES	A43082
LMErgoMax™	LM 496-497 XSI	A43077

- Un instrument unique pour mesurer horizontalement et verticalement l'épaisseur des couches de composite lors des restaurations



LM-Arte™ Posterior Misura

LMErgoSense®	LM 498-499 ES	A43181
LMErgoMax™	LM 498-499 XSI	A45471

- Pour mesurer horizontalement et verticalement l'épaisseur des couches de composite sur les restaurations postérieures
- L'embout en forme de fourche permet de mesurer et de façonner la paroi en composite en présence d'une matrice



LM-Arte™ Cusp Misura

LMErgoSense®	LM 468-469 ES	A45478
LMErgoMax™	LM 468-469 XSI	A45477

- Un instrument unique pour estimer l'épaisseur et la hauteur de cuspide afin d'évaluer la stabilité pour des restaurations adhésives
- Pour évaluer la résistance de la structure naturelle de la dent

Maîtriser la rétraction gingivale avec LM-Gengiva

L'objectif du traitement de restauration d'une lésion cervicale est d'obtenir un rebord parfaitement étanche, une forte liaison et un polissage optimal du matériau composite. La rétraction gingivale mécanique lors des restaurations des lésions cervicales peut être traumatique si elle n'est pas réalisée correctement.



L'instrument LM-Gengiva et les rétracteurs gingivaux sont utilisés pour éviter de blesser inutilement la gencive et obtenir le meilleur résultat clinique possible. Grâce à cette méthode, on obtient le résultat final souhaité: le tissu mou n'est pas lésé et les conditions esthétiques sont remplies.

LM-Gengiva

Kit de rétraction gingivale

LMErgoSense® LM 7556K ES A43498

Prix: 83,20

Promo: 70,72

LMErgoMax™ LM 7556K XSI A44053

Prix: 75,70

Promo: 64,34

Inclut les produits suivants :

Instrument à main LM-Gengiva

Rétracteurs LM-Gingival (90 unités environ, 30 unités/taille)

LM-MultiLever





www.denta.be

Commandez au meilleur prix !


Nouveaux produits et produits en promotion.

Tout y est. Catalogues, brochures et promotions des fabricants peuvent être téléchargés facilement.

Certains produits sont accompagnés de PDF et de vidéos. Bon surf !

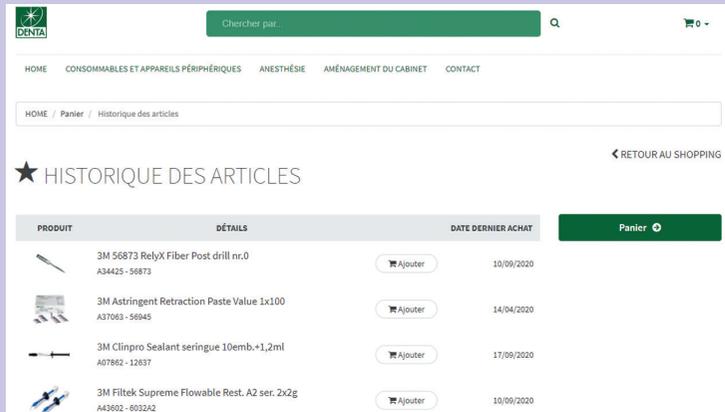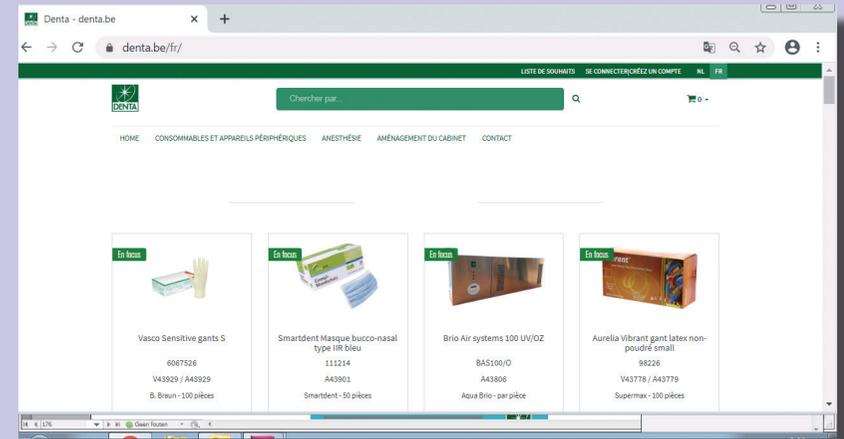


N'hésitez pas à aller consulter l'historique des articles pour voir ce que vous avez commandé.

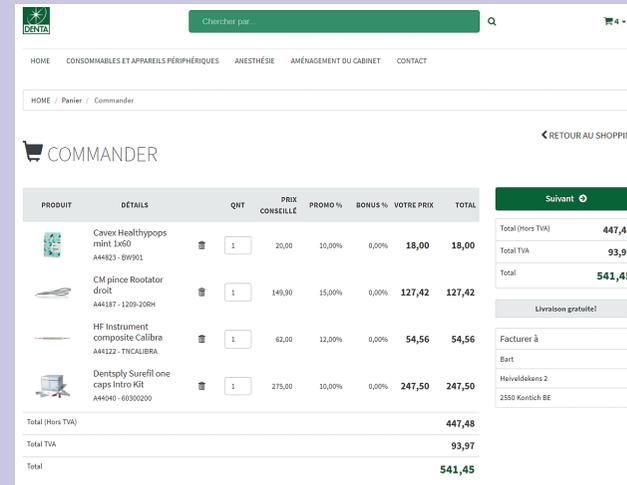


NOUVEAU Découvrez votre remise produit dans votre panier. Achetez toujours à des prix très bas.

A vos smartphones, tablettes ou PC pour vos commandes...

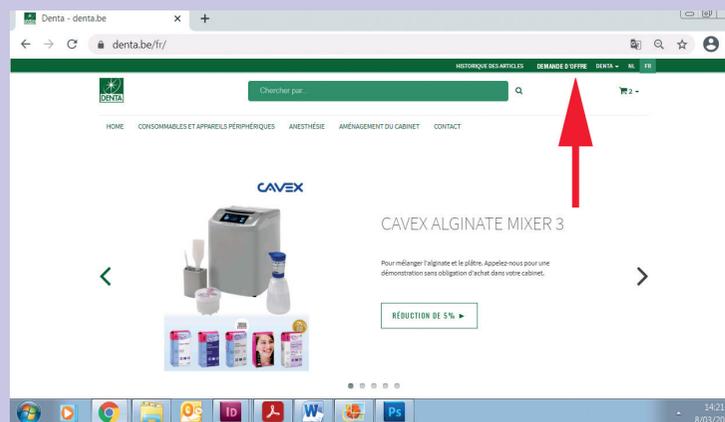

NOUVEAU Vous souhaitez une offre de prix sur un appareil ou sur un gros volume en consommables (composites, limes endo, ciments...), appuyez sur le bouton 'Demande d'offre'.

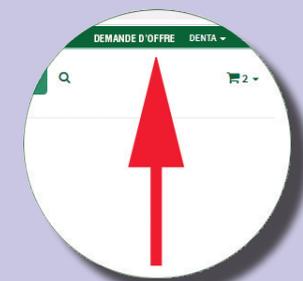



Denta nv

Heiveldkens 2
2550 Kontich
www.denta.be
03 450 93 20
vente@denta.be

 **COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**

Comptoir Dentaire de Bruxelles

EEBIC building
Allée de la Recherche 12 bte 30.28
1070 Anderlecht
www.comptoir-dentaire.be
02 346 28 73
vente@comptoir-dentaire.be

LOSER & CO

ifrer mal was Gutes...



LOSER & CO GMBH • DISTRIBUTION DE PRODUITS DENTAIRE
e-mail: info@loser.eu • www.loser.eu

© BART LAMBRECHTS • MOBIEL: +32 478 33 92 99
e-mail: blambrechts@loser.de

Fabricant:

LMDental

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400 | info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition.

Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes

au dessus de 150 euros hors TVA. Les promotions sont valables du **01/05/2021** au **31/08/2021**

Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.