

### READY 2 USE

Votre patient recherche-t-il un traitement de blanchiment rapide, efficace et simple ?

Dans ce cas, Ready 2 Use est un bon choix. Ready 2 Use agit ultra-rapidement et, comme son nom l'indique, est prêt à l'emploi. Les gouttières de blanchiment universelles sont pré-remplies. Le gel de blanchiment est pH neutre et contient du peroxyde d'hydrogène supérieur (HPS) à 6 %.

Le gel de blanchiment HPS agit plus rapidement que tout autre produit contenant du peroxyde d'hydrogène. En effet, l'HPS est à base du peroxyde d'hydrogène le plus pur et décompose plus rapidement les molécules colorées. Comme le gel hautement visqueux devient plus ferme pendant le traitement, il reste bien en place. Il est ainsi constamment en contact avec les dents. Ready 2 Use peut être conservé à température ambiante car l'HPS est très stable.

#### Comment l'utiliser ?

Les gouttières de blanchiment universelles sont pré-remplies de gel de blanchiment. Le patient garde les gouttières en bouche pendant 15 minutes. Répéter une fois par jour pendant huit jours consécutifs.

#### Caractéristiques du produit

- 8 gouttières universelles pré-remplies pour blanchir pendant 8 jours, 15 minutes par jour
- HPS à 6 % pour un blanchiment plus rapide et plus efficace
- Peut être conservé à température ambiante
- Gel hautement visqueux pour une répartition uniforme sur et entre les dents
- pH neutre

