



DE BEHEERSING VAN HET INFECTIERISICO:
ONZE KNOWHOW SINDS 1957



PRODUCTCATALOGUS



NOTA'S:.....

Lined area for notes with horizontal dotted lines.



LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL

Over Ons	4
Onze Missie	5
Onze Sterke Punten	6
Onze Engagemeten	8

ONZE PRODUCTEN

UMONIUM ^{38®} De innovatie in koude desinfectie	10
UMONIUM ^{38®} Standaard Europese normen	11
UMONIUM ^{38®} Medische hulpmiddelen - Geconcentreerde producten te verdunnen	12
UMONIUM ^{38®} Medische hulpmiddelen - Gebruiksklaar	14
UMONIUM ^{38®} Biociden	16
UMONIUM ^{38®} Milieusanering	18
PHYTOGEL [®] By HUCKERT'S	19
Samenvattende tabel met de producten/toepassingsdomeinen	22



OVER ONS



 Sinds de oprichting in **1957 door Charles Huckert** ontwikkelt en verkoopt Laboratoire Huckert's International desinfectiemiddelen van hoog niveau met een opmerkelijke veiligheid voor de operator, het materiaal en de natuurlijke omgeving.

Laboratoire Huckert's International ontwikkelt zijn activiteit voortdurend. Het succes van het **familiebedrijf** is te wijten aan de **kwaliteit van hun producten** en het **professionalisme van zijn team**. Ons leitmotiv is **INNOVATIE**.

We gebruiken al heel lang de weldaden van essentiële oliën in ons gamma. Een perfecte alchemie tussen planten en fijnchemie.



Laboratoire Huckert's International neemt **in de jaren '80 een nieuwe wending** door zijn activiteiten internationaal te ontwikkelen. Vandaag zijn we **op alle continenten aanwezig**. Deze groei dwingt het familiebedrijf zich te specialiseren in de beheersing van het infectierisico en meer bepaald in het medische milieu, onze belangrijkste activiteitsector.

In **1996**, konden we in onze nieuwe lokalen in **Nijvel (België)** een nieuw progressief werkingssysteem in een gecontroleerde omgeving (white room) opzetten.




In **1999**, werden onze inspanningen, om een kwaliteitszorg te garanderen, beloond met de **ISO 9001 en 13485 certificaten**. Sindsdien garanderen we een perfecte traceerbaarheid en reproduceerbaarheid van onze Biociden en Medische Hulpmiddelen.




  De wil om te beantwoorden aan de behoeften van haar cliënteel en om zo dicht mogelijk bij haar te staan, heeft Laboratoire Huckert's International ertoe aangezet filialen te openen in **het Groothertogdom Luxemburg** en in **Frankrijk** in de jaren **2000**.

Een nieuwe stap werd genomen in **2014**, met de aankoop van een site van meer dan **3 hectaren in Waver (België)**, waar onze volledige productie-eenheid en het R&D laboratorium zich bevinden, net als ons laboratorium voor kwaliteitscontrole.

 In **2015** blijft de directie haar wil tonen om zich op internationaal vlak te ontwikkelen. Daarom wordt een **Italiaanse structuur** opgezet. De verankering van Laboratoire Huckert's International in Italië wordt in het bijzonder gekenmerkt door de aankoop van een gebouw in het centrum van Umbrië.

In **2018** heeft het labo **een gebouw van 2 500 m²** aangekocht in 31 Avenue Lavoisier.

 In **2019**, blijft de directie verder haar wil tonen om zich nog meer op internationale vlak te ontwikkelen en neemt daarom de beslissing om een entiteit **in Singapore op** te richten.

Een nieuwe dimensie die de **3^{de} generatie** in staat stelt steeds vooruit te kijken.



Verpakkingszone - Waver, 2016

ONZE MISSIE



Laboratoire Huckert's International, **een expert in biodecontaminatie en desinfectie van hoog niveau**, produceert en ontwikkelt twee Premium gamma's; UMONIUM³⁸ voor de desinfectie en PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] voor de verzorging van de huid.

“ Multolerantie: géén compromis voor wat betreft de kwaliteit en de veiligheid ”

Onze desinfectiemiddelen, die in overeenstemming zijn met en gevalideerd worden volgens de hoogste geldende Europese normatieve standaarden, zijn **stabiel, veilig** en **doeltreffend in alle omstandigheden**, zelfs bij interferentieomstandigheden.

Onze taak is het verzekeren van een **feilloze desinfectie tegen alle pathogene flora** (bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën, sporen, naakte en omhulde virussen) **zonder ongewenste bijwerkingen te veroorzaken**.

VERVANG NIET EEN BIOLOGISCH GEVAAR DOOR EEN CHEMISCH RISICO

Vanuit een **ECOLOGISCH VERANTWOORDE** benaderingswijze engageert Laboratoire Huckert's International zich ervoor producten **zonder risico voor de operator, patiënt, materiaal en omgeving** op de markt te brengen.

Afkomstig van de fijnchemie, het gamma UMONIUM³⁸ biedt producten aan **zonder CMR-stof (Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch, zoals aldehyde, peroxide, biguanide, chloor...)** die **biologisch afbreekbaar en neutrale pH zijn**. Ze zijn doeltreffend en compleet, **zonder risico** op brandwonden aan de longen of de huid, zonder gevaar op corrosie van de uitrustingen en zonder impact op het milieu.



ZONDER GEVAAR VOOR DE OPERATOR



ZONDER GEVAAR VOOR DE PATIËNT



ZONDER GEVAAR VOOR HET MATERIAAL



ZONDER GEVAAR VOOR HET MILIEU

FUNDAMENTELE WAARDEN



KOSTENBEHEER

PRESTATIE

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID

VEILIGHEID

Onze producten bevatten **NOOIT CARCINOGENE, MUTAGENE of REPRODUCTIETOXISCHE stoffen (CMR)**

ONZE STERKE PUNTEN


HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN OPTIMALISEREN OM AAN UW BEHOEFTE TE BEANTWOORDEN.

✓ PERFECT BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

ZONDER BROEIKASGASSEN

PHYTOGEL
By HUCKERT'S
excellence in dermo protection

UMONIUM³⁸
master in disinfection

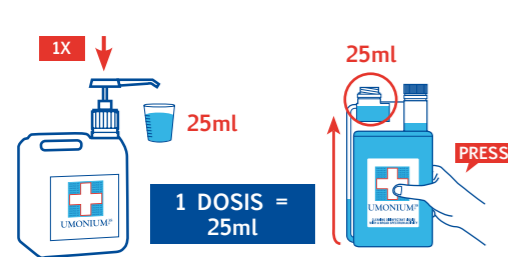

EEN UITGEBREID GAMMA VAN GECONCENTREERDE PRODUCTEN

SPUITBUSSEN
ZONDER BROEIKASEFFECT

VERSTUIVERS
ZONDER DRIJFGAS

GECONTROLEERDE DOSERING

MAAR OOK ZUINIGE MENGSYSTEMEN EN AUTOMATISCHE DOSEERSYSTEEM "ECONOMATIC"



RECYCLEERBARE
TISSUES



POMPEN MET
JUISTE DOSERING

ECO FRIENDLY

EEN FEILLOZE BETROUWBAARHEID



Geen toxische lozingen in het vervaardigingsproces van onze producten.



Formules op basis van essentiële oliën en geconcentreerde geneeskrachtige planten.



Volledig recycleerbare verpakkingen en een bijdrage voor de behandeling van gerecycleerd afval.



"Koude desinfectie" voor een eenvoudige, snelle werking en besparing.



Uitsluitend biologisch afbreekbare producten.



Een gecontroleerde en gecertificeerde omgeving voor een constante en traceerbare kwaliteit.

ONZE ENGAGEMENTEN

Het laboratoire Huckert's International schrijft zijn succes toe aan andere waarden dan louter economische prestatie. Sinds de oprichting in 1957 past het familiebedrijf een methode van **Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)** toe, die diep in haar strategie ingeworteld zit. Concreet vertaalt dat zich in **formele engagementen op het vlak van milieu, maatschappij en economie.**



STERKE ENGAGEMENTEN SINDS MEER DAN 60 JAAR



Het laboratoire Huckert's International vervaardigt medische hulpmiddelen van hoog niveau, die geschikt zijn voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en die aan de vereiste richtlijn **93/42/CE** beantwoorden.

Wij vervaardigen ook biociden voor de voedingssector, medische, industriële, huishoudelijke en professionele sector alsook dermo-cosmetische producten.



Al onze producten worden vervaardigd volgens de kwaliteitscriteria (traceerbaarheid en constante stabiliteit) die opgelegd worden door de **ISO 9001:2015 en 13485:2016 certificaten.**

Elk product volgt een **productiedraiboek dat geëvalueerd wordt aan de hand van 12 controlepunten.** Al onze teams zetten zich elke dag voor 100% in om u een **totale tevredenheid** te garanderen. Met het gebruik van onze oplossingen, zult u opmerken dat we kwaliteitsproducten aanbieden die **meer dan ooit beschermen wat ons dierbaarst is: het leven.**



ONS MILIEU-ENGAGEMENT



Duurzame ontwikkeling maakt integraal deel uit van het systeem voor kwaliteitbeheer van het Laboratoire Huckert's International. We willen eerst en vooral dat onze medewerkers instemmen met onze **familiebedrijfwaarden. Kwaliteit, gezondheid en ethiek staan centraal bij alles wat we doen.**

Gaande van het onschadelijke karakter van onze producten voor operator, patiënt, materiaal tot de vermindering van de milieu-impact door onze activiteit.

Ons leitmotiv: ondernemingen efficiënt begeleiden wanneer ze beroep doen op onze diensten voor een desinfectie van hoog niveau. We tonen een constante bekommernis voor kwaliteit en klantentevredenheid.



Om het milieurisico te beheersen volgen wij **de weg naar continue verbetering**, want niets is ooit definitief verworven. Wij **analyseren, beoordelen, ramen en verbeteren de impact op het milieu** dankzij de aangebrachte controlesystemen.



GRONDSTOFFEN EN FORMULERINGEN

Wij onthouden ons met CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen, reproductietoxisch) te werken. We maken er ook een erezaak van dat onze producten neutrale pH en niet corrosief zijn. Wij eisen het gebruik van biologisch afbreekbare, niet bioaccumulatieve producten en bevorderen het gebruik van plantaardige stoffen. Onze opslag van grondstoffen wordt ingedeeld in partiële retentie.



EUROPESE LEVERANCIERS

Vanuit hetzelfde oogpunt geven we de voorkeur aan de samenwerking met Europese leveranciers om de trajecten te verkleinen en dus de uitstoot van CO₂ te verminderen maar ook om de Europese economie te steunen.



VERPAKKINGEN - FLESSEN

We hebben vrijwillig gekozen voor het gebruik van verpakkingen in PEHD (Polyethyleen met een hoge dichtheid) voor de beperkte impact op het milieu tijdens de productie en vooral de recyclage.



EEN GECONTROLEERDE PRODUCTIE

Onze productiesite gebruikt productiealgoritmes die de milieu-impact van onze lozingen beperken.



VAL-I-PAC

Als lid van de vereniging Val-I-Pac storten wij jaarlijkse een bijdrage voor de inzameling en de recyclage van onze industriële verpakkingen.



WWTP-STUDIE

Het laboratoire Huckert's heeft een studie van de blootstelling van onze producten bij een zuiveringsstation gefinancierd in het kader van een crisisbeheer (accidentele lozing). Besluit van de WWTP-studie: geen enkel toxisch risico.



REDUCTIE VAN HET ELEKTRISCH VERBRUIK

We hebben de beslissing genomen alle lichtpunten te voorzien van ledverlichting, die 4 keer minder energie verbruikt dan gloeilampen. We geven de voorkeur aan koude productieprocessen om de energiekosten te beperken.




WAGENPARK

Alle voertuigen van ons wagenpark werden onderworpen aan een strikte studie betreffende de CO₂-uitstoot. We selecteren de voertuigen met de laagst mogelijke koolstofvoetafdruk.

DE INNOVATIE IN KOUDE DESINFECTIE

De formule UMONIUM³⁸ maakt deel uit van de familie oppervlakreactieve stoffen. Ze destabiliseert de verbindingen tussen de watermoleculen en stelt deze laatste in staat dieper in de micro-oneffenheden binnen te dringen en zo de oplosbaarheid van andere moleculen (vetten, vuil...) te bevorderen.

Dankzij deze bijzonderheid kan UMONIUM³⁸ gebruikt worden om op hoog niveau te reinigen en te desinfecteren.

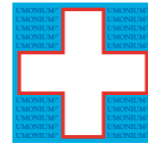



UMONIUM³⁸
master in disinfection



VERVANG EEN BIOLOGISCH GEVAAR NIET DOOR EEN CHEMISCH RISICO



Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

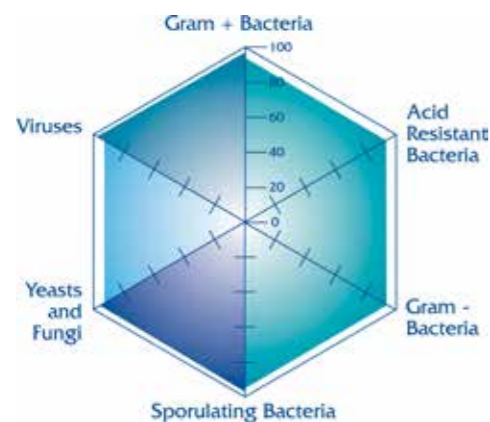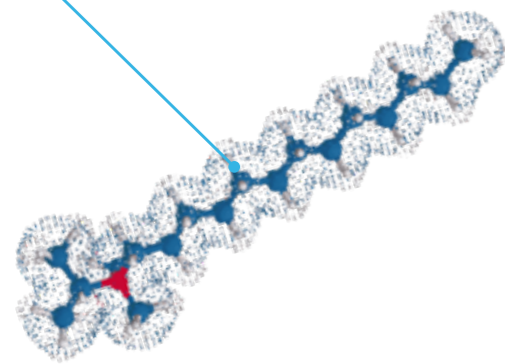

EINDELIJK EEN DESINFECTIEMIDDEL ZONDER CMR-STOFFEN

Deze formule wordt verkregen door een beheerste evenwichtige combinatie van quaternair ammonium en twee ingrediënten die speciaal geselecteerd werden voor hun opmerkelijke synergetische effecten inzake activiteitspectrum en contacttijd die noodzakelijk is voor de vernietiging van micro-organismen.

Afzonderlijk hebben de bestanddelen weinig of geen desinfecterend effect. Er waren 38 pogingen nodig om de formule te verkrijgen die prestatie, snelheid en stabiliteit combineert zonder chemisch risico en met neutrale pH. Tests van onafhankelijke laboratoria tonen aan dat de combinatie van bestanddelen het mogelijk maakt het activiteitspectrum aanzienlijk uit te breiden.

Het is voortaan mogelijk zeer korte contacttijden toe te passen met zuinige concentraties. Het oppervlakreactieve karakter van de formule maakt zowel de reinigende actie als de verwijdering van biofilms mogelijk.

BACTERICIDE, MYCOBACTERICIDE, FUNGICIDE, VIRUCIDE, SPORICIDE



STANDAARD EUROPESE NORMEN (EN)

MEDISCHE HULPMIDDELEN

SITUATIES & OMSTANDIGHEDEN IN HET LABORATORIUM	BACTERIE REDUCTIE	SCHIMMEL REDUCTIE	VIRUS REDUCTIE	MYCOBACTERIE REDUCTIE	DESINFECTIEPRESTATIE	
FASE 1 SCHONE OPLOSSINGEN 	99,999% 5 log EN 1040 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	99,990% 4 log EN 1275 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NIET VAN TOEPASSING	NIET VAN TOEPASSING	GERINGE PRESTATIE ★ Basische Evaluatie	FASE 1
FASE 2 stap 1 VERVUILDE OPLOSSINGEN 	99,999% 5 log EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	99,990% 4 log EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i>	99,990% 4 log EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	MIDDELMATIGE PRESTATIE ★★ Beperkte validatie	FASE 2 stap 1
FASE 2 stap 2 VERVUILDE EN DROGE OPPERVLAKKEN 	99,999% 5 log EN 14561 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NIET VAN TOEPASSING	99,990% 4 log EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	UITZONDERLIJKE PRESTATIE ★★★ Validatie in praktische toestand 	FASE 2 stap 2

De interferentieomstandigheden die toegepast worden op medische hulpmiddelen zijn veel strenger dan op biociden. Een medisch hulpmiddel dient gedesinfecteerd te worden met een medisch hulpmiddel.

BIOCIDEN

SITUATIES & OMSTANDIGHEDEN IN HET LABORATORIUM	BACTERIE REDUCTIE	SCHIMMEL REDUCTIE	VIRUS REDUCTIE	MYCOBACTERIE REDUCTIE	DESINFECTIEPRESTATIE	
FASE 1 SCHONE OPLOSSINGEN 	99,999% 5 log EN 1040 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	99,990% 4 log EN 1275 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NIET VEREIST	NIET VEREIST	GERINGE PRESTATIE ★ Basische Evaluatie	FASE 1
FASE 2 stap 1 VERVUILDE OPLOSSINGEN 	99,999% 5 log EN 1276 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99,990% 4 log EN 1650 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NIET VEREIST	NIET VEREIST	MIDDELMATIGE PRESTATIE ★★ Beperkte validatie	FASE 2 stap 1
FASE 2 stap 2 VERVUILDE EN DROGE OPPERVLAKKEN 	99,990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99,990% 3 log EN 13697 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NIET VEREIST	NIET VEREIST	UITZONDERLIJKE PRESTATIE ★★★ Validatie in praktische toestand 	FASE 2 stap 2



**Medisch hulpmiddel
Klasse IIb**



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12110	Doseerfles 1 l	12 x 1 l
PF 12112	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
PF 12153	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk
EMB 0013 - 2,5%	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk

UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS, aanbevolen voor reiniging en desinfectie door inweking van de medische en chirurgische instrumenten, weekt het organische vuil los en gaat over tot een desinfectie van hoog niveau van het behandelde materiaal. Het werkt zeer snel in binnen een contacttijd die realistisch is in functie van het te verwijderen doel. Dit product, dat afkomstig is uit de fijnchemie, vertoont geen risico voor de operator (geen toxische damp), het materiaal (geen corrosiegevaar) en het milieu (mag afgevoerd worden via de gootsteen).

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met **DE 93/42/EEG** betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015** en **ISO 13485:2016**.



**Medisch hulpmiddel
Klasse IIa**



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12310	Doseerfles 1 l	12 x 1 l
PF 12312	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
PF 12314	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk
EMB 0013 - 2,5%	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk

UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS is een desinfectiemiddel voor niet-invasieve medische hulpmiddelen. Weinig gevoelig voor de interferentieomstandigheden en maakt een zorgvuldige reiniging mogelijk van bloedsporen en andere biologische materialen en die een krachtige, veilige desinfectie van schoon materiaal verzekert zonder gecompliceerde procedures te moeten toepassen.

Het is ultra krachtig en betrouwbaar en maakt het mogelijk alle micro-organismen binnen een zeer korte contacttijd (10 minuten) te vernietigen. Polycompatibel en kan gebruikt worden zonder gevaar voor het materiaal.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met **DE 93/42/EEG** betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015** en **ISO 13485:2016**.



**Medisch hulpmiddel
Klasse IIb**



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12510	Doseerfles 1 l	12 x 1 l
PF 12512	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
PF 12515	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk
EMB 0013 - 2,5%	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS, reukloos detergent-desinfectiemiddel, bijzonder aanbevolen voor omgevingen met hoog risico. TOTAAL onschadelijk, zelfs voor embryo-omgevingen (Validation Mouse Embryo Assay).

Voor de manuele behandeling van invasieve en niet-invasieve instrumenten. Perfect geschikt voor gecontroleerde omgevingen, IVF laboratoria, afdeling neonatologie...

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met **DE 93/42/EEG** betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015** en **ISO 13485:2016**.
- ✓ MEA-validatie (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA-validatie (Human Sperm Survival Assay).



**Medisch hulpmiddel
Klasse IIb**



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10320	Doseerfles 1 l	12 x 1 l
PF 10322	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
PF 10324	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk

Geen enzymen, noch alkalische producten nodig om stralende instrumenten te garanderen. **UMONIUM³⁸ STERILY** verwijdert het vuil en laat geen geel-bruine afzetting achter op de assen van de klemmen en reinigt de instrumenten diepgaand door onderdompeling in een ultrasoonbad en/of manuele borsteling.

De onderdompeling van het materiaal in de oplossing gebeurt in alle veiligheid, het product is neutraal, zonder corrosie-effect op de materialen noch hechting door coagulatie van bloedresten.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met **DE 93/42/EEG** betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015** en **ISO 13485:2016**.




ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 40006	Incubator + verbruiksgoederen (100 petrischalen, 100 etiketten en 1 traceerbaarheidsboekje)	1 kit
PF 40007	Verbruiksgoederen (100 petrischalen, 100 etiketten en 1 traceerbaarheidsboekje)	1 kit
EMB 5040	Incubator	1 stuk

UMONIUM³⁸ ICK, voor het controleren van uw desinfectieprestatie op de verschillende behandelde oppervlaktes. Hiermee kunt u de pertinentie van de procedures die u toepast beoordelen en zult u de doeltreffendheid van de producten die u gebruikt meten.

Om te presteren binnen een domein, moet u kunnen evalueren. Dit Infectie Controle Kit zal u precisie en beheersing van uw richtlijnen bieden bij uw personeel.



De bidons van 5L worden rechtstreeks op het doseerstation **ECONOMATIC** aangesloten. Dit systeem maakt een eenvoudige en zeer precieze dosering mogelijk. Het vereist geen ingewikkelde concentratieberekeningen. Het volstaat op de knop te drukken om de centrale de gewenste hoeveelheid te laten verdelen.

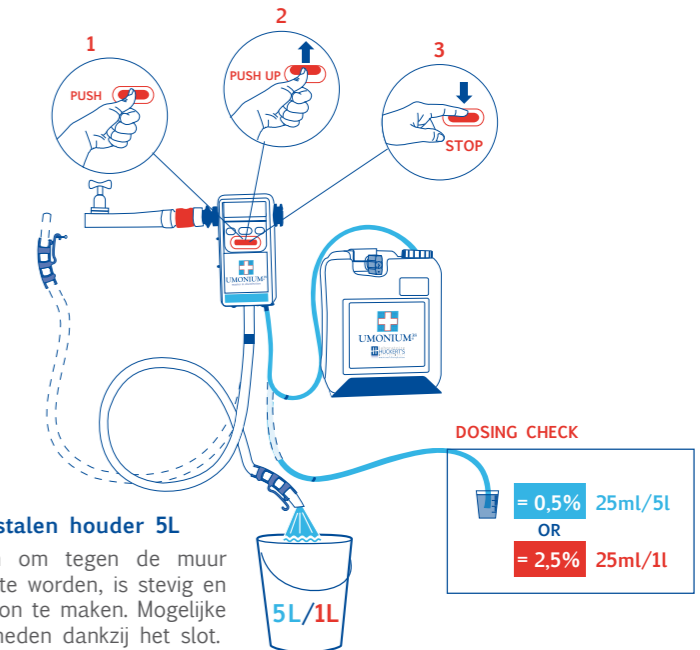



Medisch hulpmiddel
Klasse IIb

1000 verstuivingen = 200m²

FLASH DESINFECTIE
VANAF 30 SECONDEN



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12209	Sprayflacon 1l	12 x 1 l
PF 12204	Sprayflacon 500 ml	24 x 500 ml
PF 12203	Sprayflacon 250 ml	24 x 250 ml
EMB 0099	100 tissues UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks
EMB 5206	Roestvrijstalen flaconhouder 1 l	1 stuk

UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY, zonder aldehyde, peroxide, biguanide (CMR), is uw beste wapen tegen besmetting. Actief vanaf 30 seconden contacttijd. Breedspectrumdesinfectie, ideaal voor een omgeving die een dagelijkse desinfectie vereist. Het pistool met dubbele werking spuit een schuim voor de reiniging of verstuift een fijne straal voor een optimale desinfectie.

Aanbevolen voor fragiele materialen zoals plexiglas, silicone, polyurethaan, rubber...

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.



Medisch hulpmiddel
Klasse IIa

1x = 3m²



SPORICIDE

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10760	Doos met 100 stuks (20 x 20 cm)	6 x 100
PF 10774	Doos met 95 stuks (15 x 15 cm)	6 x 95
PF 10761	500 individuele doekjes (20 x 20 cm)	500 x 1

UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES is het eerste reinigende, desinfecterende en sporicide doekje. Het doodt kiemen in een contacttijd van 5 seconden. Het kan gebruikt worden om breekbare materialen te reinigen en te desinfecteren, zoals optische vezel, polycarbonaat, latex, vaginale sondes, endoscopen, instrumenten in de afdeling externe interventies ... Met elke uiterst sterk vochtig doekje kan een oppervlakte van 3 m² gedesinfecteerd worden.

CERTIFICATEN:

- ✓ De bactericide, fungicide en sporicide werking (*Clostridium difficile*) van de tissue wordt gevalideerd in overeenstemming met de normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ De bactericide, fungicide, gistdodende, mycobactericide en virucide werking van de impregneroplossing is gevalideerd volgens de normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 en EN 14476
- ✓ In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.



Medisch hulpmiddel
Klasse IIb



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10520	Bus van 25L	1 x 25 liter

Desinfectie-eenheid voor elke geïsoleerde of beheerste omgeving. Labowerktafel, BSL 1-4, laminare luchtstroomkast... UMONIUM³⁸ LABOCID is onmiddellijk bruikbaar, zowel voor de inweken van instrumenten als voor het afvegen van oppervlakken. Vernietigt de meest resistente pathogenen, verwijdert de biofilm en desinfecteert de medische hulpmiddelen zonder VOS emissie of zwevende kleine deeltjes. Desinfectiemiddel voor uw behandelingen met biologisch risico.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.



Medisch hulpmiddel
Klasse IIb

FLASH DESINFECTIE
VANAF 30 SECONDEN



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12608	Sprayflacon 500 ml	24 x 500 ml
PF 12609	Sprayflacon 250 ml	24 x 250 ml
EMB 0099	100 tissues UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY is speciaal ontwikkeld voor gevoelige omgevingen. Actief vanaf 30 seconden contacttijd. De MEA (Mouse Embryo Assay) validatie bevestigt de totale onschadelijkheid, zelfs voor de embryonale omgeving. Het is het feilloze desinfectiemiddel voor geavanceerde omgevingen.

Aanbevolen voor incubatoren op de afdeling neonatologie, de IVF-laboratoria, de onderzoekslaboratoria en geïsoleerde omgevingen van klasse P3, P4...

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.
- ✓ MEA-validatie (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA-validatie (Human Sperm Survival Assay).



Medisch hulpmiddel
Klasse IIa

1x = 3m²



SPORICIDE

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10769	Doos met 100 stuks (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS TISSUES is het eerste reinigende en desinfecterende doekje dat volledig onschadelijk is, zelfs in een embryo-omgeving. Het doodt kiemen vanaf 5 seconden. Ontwikkeld voor omgevingen met verhoogd risico (reanimatie, neonatologie, materniteit, IVF-laboratorium ...). Kan gebruikt worden op fragiele materialen te reinigen en te desinfecteren, zoals optische vezel, polycarbonaat, latex, plexiglas ... De doekjes, in de doos, drogen niet uit.

CERTIFICATEN:

- ✓ De bactericide, fungicide en sporicide werking (*Clostridium difficile*) van de tissue wordt gevalideerd in overeenstemming met de normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ De bactericide, fungicide, gistdodende, mycobactericide en virucide werking van de impregneroplossing is gevalideerd volgens de normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 en EN 14476
- ✓ In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.
- ✓ MEA-validatie (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA-validatie (Human Sperm Survival Assay).



Medisch hulpmiddel
Klasse IIb



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 40006	Incubator + verbruiksgoederen (100 petrischalen, 100 etiketten en 1 traceerbaarheidsboekje)	1 kit
PF 40007	Verbruiksgoederen (100 petrischalen, 100 etiketten en 1 traceerbaarheidsboekje)	1 kit
EMB 5040	Incubator	1 stuk

UMONIUM³⁸ ICK, voor het controleren van uw desinfectieprestatie op de verschillende behandelde oppervlaktes. Hiermee kunt u de pertinentie van de procedures die u toepast beoordelen en zult u de doeltreffendheid van de producten die u gebruikt meten.

Om te presteren binnen een domein, moet u kunnen evalueren. Dit Infectie Controle Kit zal u precisie en beheersing van uw richtlijnen bieden bij uw personeel.





Biocide PT2
BE: 1002B



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10110	Doseerfles 1 l	12 x 1 l
PF 10112	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
PF 10118	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml
PF 10120	Bus van 25L	1 x 25 liter
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk
EMB 0013 - 2,5%	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk

UMONIUM³⁸ **MASTER** combineert het reinigen, ontvetten, desinfecteren en desodoriseren van sanitaire voorzieningen, de hoge en lage oppervlakken, clean rooms...

Wordt ook gebruikt voor de desinfectie van textiel en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) hetzij inweking van het wasgoed in een verdunde oplossing, hetzij rechtstreeks in de wasmachine, ter vervanging van de wasverzachter.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ AMS-validatie 1453.



Biocide PT2 & PT4
BE: 2319B



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10134	Sprayflacon 500 ml	24 x 250 mL
PF 10130	Sprayflacon 1 liter	12 x 1 L
EMB 5206	Roestvrijstalen flaconhouder 1 l	1 stuk
PF 10131	Spuitbus 500 mL	8 x 500 mL
EMB 0099	100 tissues UMONIUM ³⁸ Wipes	12 items

UMONIUM³⁸ **MASTER SPRAY & MASTERJET** zijn een uiterst snel desinfectiemiddel met een totaal spectrum, dat in een enkele verstuiwing alle kieren doodt die aanwezig zijn op de behandelde oppervlakken. Hun prestaties zijn in het bijzonder gegarandeerd daar waar veel desinfectiemiddelen tekortkomen. Ze zijn niet toxisch en verwijderen eenvoudig alle organische resten, zoals bloedsporen, urine en fecaliën. Het eenvoudige en ergonomische pistool met dubbele werking verspreidt een schuim dat ideaal is voor de reiniging of verstuiwt een fijne straal voor een optimale desinfectie. UMONIUM³⁸ **MASTERJET** is ideaal voor de behandeling van dragers die geen onderdompeling mogelijk maken. Aanbevolen voor fragiele materialen zoals plexiglas, silicone, polyurethaan, rubber, ...

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ AMS-validatie 1453.



Biocide PT2



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 10750	Doos met 100 stuks (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ **MASTER TISSUES** is een vochtig doekje dat zeer resistent is met een breedspectrumwerking voor de reiniging en de desinfectie van oppervlaktes en materiaal.

Actief na 5 seconden en garandeert een doeltreffendheid voor de dagelijkse behandeling van kamers, gemeenschappelijke zalen, uitrustingen...

CERTIFICATEN:

- ✓ De bactericide, fungicide en sporicide werking (*Clostridium difficile*) van de tissue is gevalideerd volgens de normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ De bactericide, fungicide, gistdodende, mycobactericide en virucide werking van de impregneeroplossing is gevalideerd volgens de normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 en EN 14476
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.



Biocide PT4
BE: 9815B



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON	ARTIKEL N°	BENAMING
PF 12505	Doseerfles 1 l	12 x 1 l	PF 12507	Bus van 25L
PF 12506	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l	PF 12508	Vat van 200 l
PF 12504	Doseerfles 125 ml	24 x 125 ml	PF 12509	IBC van 1000 l
EMB 0013	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 0,5 %	1 stuk		
EMB 0013 - 2,5%	ECONOMATIC-pomp volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk		



Biocide PT2 & PT4
BE: 2419B



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 12520	Sprayflacon 500 ml	24 x 500 ml
PF 12521	Sprayflacon 250 ml	24 x 250 ml
EMB 0099	100 tissues UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks

UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD** is een nieuwe oplossing met neutrale pH, die geurloos en kleurloos is en na het spoelen geen resten achterlaat. Ontwikkeld voor de oppervlakken die in contact staan met voeding, geschikt voor de reiniging en desinfectie van gemeenschappelijke keukens (bandtransportmachine, vaatwasmachine, bereidingsstafels...) van de voedingsindustrie voor de behandeling van productiesites (industriële koude wand, mengsel-tank, snijtafel, transportband die rechtstreeks in contact staat met voedingsmiddelen, bottelingproces...). Bijzonder aanbevolen voor de bestrijding van *Listeria monocytogenes* en *Salmonella typhimurium*.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ Geschikt voor de **HACCP-processen**.


UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD SPRAY** is een detergent-desinfectiemiddel van HACCP-klasse. Zonder CMR-bestanddeel, vertoont geen enkel risico voor de operatoren en het milieu. Geen enkel risico op de emissie van VOS, geen enkel toxisch risico. Ontvet en verwijdert snel organische resten. Eenvoudig en ergonomisch en vereenvoudigt de reiniging en de dagelijkse desinfectie van de gemeenschappelijke ruimtes en professionele keukens. Dankzij de neutrale pH kan UMONIUM³⁸ ten volle gebruikt worden zonder risico op beschadiging van materiaal. Geschikt voor dagelijks gebruik op oppervlakken en uitrustingen die onderworpen worden aan kritieke HACCP-punten.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ Geschikt voor de **HACCP-processen**.



Biocide PT4

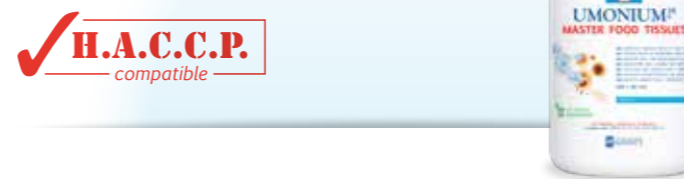


ITEM No.	NAME	BOX
PF 10772	Box of 100 wipes (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD TISSUES** is actief vanaf 5 seconden. Ultra-resistente, hoogwaardige non-woven doekjes. Zeer sterk geïmpregneerd : met één doekje kan een oppervlakte van meer dan 3 m² worden behandeld. Goed voor dagelijkse behandeling van voedselomgevingen, keukens, cafetaria, kinderspeelkamer, voedselindustrie en -verwerking. Zonder enig toxisch risico voor de gebruiker en de consument.

CERTIFICATIONS:

- ✓ Bactericide, fungicide and sporicide activity (*Clostridium difficile*) of the wet wipe is validated according to standards ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ De bactericide, fungicide, gistdodende, mycobactericide en virucide werking van de impregneeroplossing is gevalideerd volgens de normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 en EN 14476
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ Geschikt voor de **HACCP-processen**.

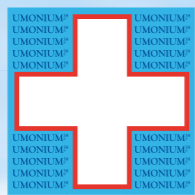

UMONIUM³⁸ air control



VERNIETIGT SLECHTE GEUREN

ZONDER BROEIKASGASSEN

Max. 1x /20m³



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON	ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 11003	Individuele sprayflacon 100 ml	12 stuks	PF 40004	Display 12 x 10 ml + 1 tester	4 stuks
EMB 5207	Muurhouder 100 ml met antidiestalsysteem	1 houder	PF 11006	Sputbus 250 ml voor verstuiver	12 stuks
PF 11000	Individuele sprayflacon 10 ml	36 stuks	EMB 0432	Elektronische verstuiver voor spuitbus 250 ml	1 toestel

UMONIUM³⁸ air control, op basis van essentiële oliën van bloemen, geselecteerde boomblaadjes en boomschors, bestrijdt radicaal slechte geuren. Elk flacon van 100 ml bevat het equivalent van ten minste 20 kg gedroogde planten en biedt een autonomie van meer dan 900 verstuiwingen. UMONIUM³⁸ air control, dat opmerkelijk doeltreffend is, zuivert de lucht en verwijdert geurtjes met één enkele verstuiwing. Helpt bij het verminderen van luchtbesmetting.

Een versie met automatische verstuiver bestaat onder de naam UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC. Dankzij een persoonlijke programmering wordt het toestel ingeschakeld volgens uw gekozen tijdsintervallen. Perfect aanpasbaar aan kleine, middelgrote of grote volumes. Bijzonder aanbevolen voor de diensten **geriatrie, dialyse, oncologie, anatomopathologie, viscerale chirurgie...**

HUIDHYGIËNE



Handen zijn de voornaamste vectoren voor de overdracht van micro-organismen. Deze overdracht vertegenwoordigt 80 % van de infecties verbonden aan de verzorgingen. Bijgevolgd is handhygiëne een steunpilaar geworden in de strijd tegen infecties.

Het zeer frequente gebruik van zepen en hydroalcoholische oplossingen droogt de huid echter uit en kan leiden tot de ontwikkeling van dermatologische aandoeningen: dermatitis, allergieën, eczema...

Het gamma PHYTOGEL By HUCKERT'S®, is gebaseerd op en mengeling van 3 essentiële oliën, zorgt voor een onberispelijke hygiëne en beschermt de huid.

“ Echte dermatologische verzorging op basis van geneeskrachtige planten ”

1 LITER PHYTOGEL By HUCKERT'S® = 2,5 KG PLANTEN



EUCALYPTUS
Antibacterieel
en verfrissend



KAMILLE
Ontstekingswerend
en helend



TIJM
Antibacterieel

ONBERISPELIJKE HYGIËNE

De essentiële oliën van tijm en eucalyptus zijn gekend voor hun antimicrobiële werking. De combinatie van de twee zorgt voor een breedspectrumwerking.

BESCHERMING VAN DE HUID

Dankzij de ontstekingswerende, kalmerende en helende eigenschappen van kamille kan de beschadigde huid verzacht worden en kan ze ook in goede gezondheid gehouden worden.

DE KRACHT VAN MEDICINALE PLANTEN

✓ PERFECT BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

ECO FRIENDLY



PHYTOGEL
By HUCKERT'S
excellence in dermo protection





“ Bactericide, fungicide en virucide desinfectie gedurende 3 uur ”

sanitizer
Hydroalcoholische gel
BIOCIDE PT1
Plant aardige formule



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20403	Zakflacon 100 ml	28 x 100 mL
PF 40001	Display 9 x 100 ml	4 stuks
PF 20422	Flacon 500 ml	12 x 500 mL

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
EMB 1253	Automatische muurverdeler	1 stuk
EMB 1252	Manuele muurverdeler	1 stuk
PF 20421	Navulling 1l manuele en automatische verdeler	11 x 1 l
EMB 0016	Petrischalen	20 stuks

Herhaaldelijk gebruik van hydroalcoholische oplossingen leidt tot verregaande uitdroging van de hoornlaag. De huid verliest zijn elasticiteit en de kleinste trekbeweging kan tot een scheur van het opperhuidweefsel leiden. Dankzij de natuurlijke essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus voorkomt PHYTOGEL By HUCKERTS® **sanitizer** de pijnlijke bijwerkingen terwijl de opperhuid tegen uitdroging beschermd wordt. Onze oplossing verzekert u van een beheerste frictietijd en een ongeëvenaarde verzorging van de huid. PHYTOGEL By HUCKERTS® **sanitizer** zorgt voor een hygiënische, chirurgische desinfectie van de huid gedurende 3 u en een virucide desinfectie. Uw beste vriend in de bestrijding van kruisinfecties.

CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.



“ Een verzorging om ernstige dermatologische aandoeningen te voorkomen ”

body
Zeep voor
lichaam en haar



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20606	Flacon 500 ml los zonder doos	12 x 500 ml
PF 20608	Flacon 500 ml met doos	12 x 500 ml
PF 20603	Zakflacon 125 ml	32 x 125 ml
PF 40003	Display 12 x 125 ml	4 stuks

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
EMB 5205	Roestvrijstalen houder voor 500 ml	1 stuk
EMB 1253	Automatische muurverdeler	1 stuk
EMB 1252	Manuele muurverdeler	1 stuk
PF 20621	Navulling 1l manuele en automatische verdeler	11 x 1 l

PHYTOGEL By HUCKERTS® **body** zeep voor lichaam en haar, rijk aan plantaardige extracten, wast de meest gevoelige delen van de opperhuid in alle zachtheid. Deze is voedend, verzachtend, verfrist en helpt bij het bestrijden van de uitdroging van de huid. Wordt ook geapprecieerd omwille van het opmerkelijke hydraterend vermogen. Bijzonder aanbevolen voor de meest gevoelige huid zoals deze van baby's en bejaarden, voorkomt elk type afschilfering van de huid.

CERTIFICATEN:

- ✓ Dermatologisch getest.
- ✓ Conform aan de wetgeving **1223/2009**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.



“ Herstelt de meest beschadigde huiden ”

nature
Dermatologische
zeep



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20106	Flacon 500 ml los zonder doos	12 x 500 ml
PF 20108	Flacon 500 ml met doos	12 x 500 ml
PF 20121	Zakflacon 125 ml	32 x 125 ml
PF 40002	Display 12 x 125 ml	4 stuks
EMB 5205	Roestvrijstalen houder voor 500 ml	1 stuk

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20112	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l	1 stuk
EMB 1253	Automatische muurverdeler	1 stuk
EMB 1252	Manuele muurverdeler	1 stuk
PF 20109	Navulling 1l manuele en automatische verdeler	11 x 1 l

De krachtige decontaminatiezeep, PHYTOGEL By HUCKERTS® **nature**, maakt een doeltreffende voorbereiding op de desinfectie van de huid mogelijk, zonder te irriteren of uit te drogen. Deze is weinig schuimend en spoelt gemakkelijk af. Zeer fris en erg zacht, biedt een versterkend alternatief voor de probleemhuid. Bij huidagressies (afschilfering, brandwonden, dermatologische aandoening, kloven, barsten...) herstelt deze zeep opmerkelijk uw huid. Dankzij de geneeskrachtige planten, wordt de huid dag na dag verzacht, gevoed en hersteld.

CERTIFICATEN:

- ✓ Dermatologisch getest.
- ✓ Conform aan de wetgeving **1223/2009**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.



“ Een ongelooflijk wasvermogen ”

microbrush
Professioneel
peelende zeep



ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20204	Flacon 200 ml	40 x 200 ml
PF 20212	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l	1 stuk
EMB 1253	Automatische muurverdeler	1 stuk
EMB 1252	Manuele muurverdeler	1 stuk
PF 20219	Navulling 1l manuele en automatische verdeler	11 x 1 l

ARTIKEL N°	BENAMING	KARTON
PF 20204	Flacon 200 ml	40 x 200 ml
PF 20212	Bus van 5 l met pomp	4 x 5 l
EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l	1 stuk
EMB 1253	Automatische muurverdeler	1 stuk
EMB 1252	Manuele muurverdeler	1 stuk
PF 20219	Navulling 1l manuele en automatische verdeler	11 x 1 l

PHYTOGEL By HUCKERTS® **microbrush**, rijk aan natuurlijke essentiële oliën, is een niet schurende krachtige ontvetter met natuurlijke microkogeltjes, wast zacht en reinigt de onzuiverheden in de huidplooien grondig. Werd speciaal ontworpen voor het zuiveren van kleine letsels, helpt bij het helen en beschermt de huid tegen uitdroging. Vijf dagen behandeling volstaan om een gezonde en herstellende huid te bekomen. Is natuurlijk, rijk aan plantenextracten en vrij van bewaarmiddelen. Hij verstopt de leidingen niet, biedt een steeds schoon en hygiënisch wasstation en beperkt bovendien het verbruik dankzij een ingestelde pomp. Bijzonder aanbevolen voor implantologen, prothesisten en industrie.

CERTIFICATEN:

- ✓ Dermatologisch getest.
- ✓ Conform aan de wetgeving **1223/2009**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.



UMONIUM³⁸
master in disinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
excellence in dermo protection



TEVREDEN OF TERUGBETAALD

De producten van het Laboratoire Huckert's International zijn **verzekerd tegen ontevredenheid**.
Enkel een gepassioneerd fabrikant kan u deze kwaliteit bieden.



BELGIË
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

GH LUXEMBURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

FRANKRIJK
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

ITALIË
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

SINGAPORE
#01-01, 100 Eunos Avenue 7
Singapore 409572
Tel: +65 983 45 333