

## VOCO Perfect **Protect**®

GEL DE DÉSENSIBILISATION POUR L'UTILISATION  
DANS LE CADRE D'UN ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS

## Complément de la gamme Perfect Bleach

L'éclaircissement des dents est un sujet que beaucoup de patients évoquent pour améliorer l'esthétique et pour éliminer les colorations dues à la consommation de café ou de tabac. VOCO propose depuis des années déjà le blanchiment dentaire avec les produits éprouvés et de qualité de la gamme Perfect Bleach. Le blanchiment ambulatoire en particulier connaît un véritable engouement, car il est facile à intégrer au quotidien du patient. Mais que faire si une hypersensibilité des dents survient à cause d'un blanchiment à domicile ?

### Idéal pour compléter le blanchiment ambulatoire !

VOCO Perfect Protect est un gel de désensibilisation à utiliser à domicile parfaitement adapté aux conditions d'un blanchiment ambulatoire. Il contient 3 % de nitrate de potassium ( $\triangleq$  10 600 ppm) et 0,11 % de fluorure ( $\triangleq$  1 360 ppm) et contribue ainsi à une désensibilisation efficace des dents trop sensibles. Tandis que le nitrate de potassium favorise le soulagement de la douleur des dents sensibles, le fluor aide à sceller les tubulis dentinaires, s'attaquant ainsi à la cause de l'hypersensibilité. L'application de ce matériau transparent et de goût neutre est très simple et intuitif : il se porte durant 15 à 60 minutes avec la même gouttière que pour le blanchiment ambulatoire et peut s'utiliser aussi bien avant qu'après l'éclaircissement dentaire.

### Utilisation universelle

VOCO Perfect Protect est compatible avec tous les produits de blanchiment ambulatoire disponibles sur le marché. Vous pouvez parfaitement combiner tout système de blanchiment dentaire avec VOCO Perfect Protect.

### Des performances reconnues

VOCO Perfect Protect souligne encore les performances élevées et reconnues des produits VOCO. Les tests du Dr. Dimitrios Dionysopoulos du Department of Operative Dentistry de l'université Aristotle de Thessalonique (Grèce) ont révélé que VOCO Perfect Protect est le meilleur produit de sa catégorie dans le test de scellement des tubulis dentinaires des désensibilisants indiqués pour une utilisation par le patient. Cela signifie que VOCO Perfect Protect est le plus efficace contre l'hypersensibilité due au blanchiment avec près de 80 % de scellements des tubulis dentinaires (après l'application, voir graphique à droite).

### Application



Nettoyer les dents et déposer le matériau dans la gouttière



Insérer la gouttière et enlever le matériau excédentaire



Porter la gouttière pendant 15 à 60 minutes



Nettoyer la gouttière et les dents

### Indication


Scellement de dentine degarnie

### Avantages

- Désensibilisation fiable
- Durée du port de la gouttière court et variable
- Goût neutre
- Consistance agréable
- Remplissage facile de la gouttière

### Présentations

REF 1019 Seringue 2 x 2 ml

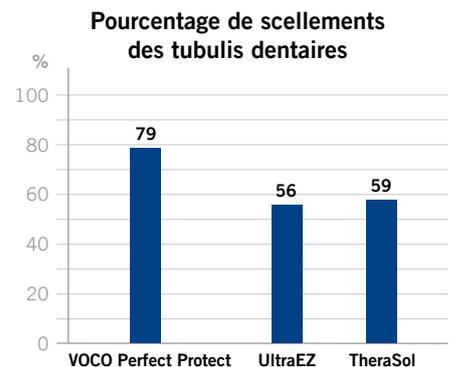

Source: Dr. Dimitrios Dionysopoulos du Department of Operative Dentistry de l'université Aristotle de Thessalonique / Grèce

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Allemagne

Numéro vert : 00 800 44 444 555  
Fax : +49 (0) 4721-719-140  
info@voco.com  
www.voco.dental

