



Snel en eenvoudig composiet verwarmen



Solventum™ Filtek™ Composietverwarmer

Betere flow met één druk op de knop

Bent u klaar om composietverwarming te introduceren in uw praktijk? Met een compact en licht ontwerp is de Filtek Composietverwarmer een snelle en eenvoudige manier om uw behandelingen soepeler te laten verlopen.

- **Snel:** verwarmt materiaal in slechts 2 minuten, na een opstarttijd van 10 minuten
- **Eenvoudig:** bediening met één druk op de knop, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
- **Draagbaar:** de uitneembare houder houdt de warmte vast voor gebruik aan de behandelstoel

Opwarmtijd (verwarmer)	10 min.
Opwarmtijd capsule	2 min.
Opwarmtijd flowable spuit	5 min.
Compact	diameter 76 mm
Gewicht	190 g
Draagbaar	De uitneembare houder houdt de warmte vast voor gebruik aan de behandelstoel
Capaciteit	6 capsules en 1 flowable spuit

Waarom
composiet
verwarmen?



Betere flow



Betere aansluiting



Minder kracht nodig bij
het aanbrengen

Veilig te verwarmen composieten

Filtek™ tandheelkundige restauratiematerialen

Eenvoudigere verwerking en minder druk hoeven zetten bij het aanbrengen – composietverwarming helpt uw behandeling soepeler te laten verlopen.

Onderstaande Filtek™ restauratiematerialen zijn gebaseerd op jarenlange klinische ervaring en getest en geïndiceerd voor composietverwarming.^{1,2}



- 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universeel Restauratiemateriaal
- 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restauratiemateriaal
- 3M™ Filtek™ Universal Restauratiemateriaal
- 3M™ Filtek™ Easy Match Universeel Restauratiemateriaal
- 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal
- 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restauratiemateriaal

1 Verwarm capsules tot maximaal 70 °C gedurende maximaal 1 uur

2 Verwarm flowable spuiten maximaal 25 keer tot maximaal 70 °C gedurende maximaal 1 uur

Product	Artikelnr.	Voltage	Type wandadapter
Solventum™ Filtek™ Composietverwarmer Kit (inclusief de basis verwarmingsunit, composiethouder en hoes, vaste USB-C-kabel, stekker, wandadapters en quick start handleiding)	6520K	100-240V	A, C, I, G
Solventum™ Filtek™ Composietverwarmer Basis Unit	6520H	N.v.t.	N.v.t.
Solventum™ Filtek™ Composietverwarmer Vervangbare Siliconen Hoes	6520S	N.v.t.	N.v.t.
Solventum™ Filtek™ Composietverwarmer Stekker	6520P	100-240V	A, C, I, G



**Solventum Dental
Solutions België**
E-mail: infodental.be@solventum.com
Website: [solventum.com/nl-be/
home/oral-care](https://solventum.com/nl-be/home/oral-care)

Nederland
E-mail: infodental.nl@solventum.com
Website: [solventum.com/nl-nl/
home/oral-care](https://solventum.com/nl-nl/home/oral-care)

© Solventum 2025. Solventum, het S-logo en Filtek zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaars. OMG1772678.