

voco

HIGHLIGHTS

High-performancecomposiet
GrandioSO Unlimited –
universeel composiet
van 4 mm in
vijf Cluster-kleuren

**Vitaal en geschikt voor
dagelijks gebruik**
Vitaliteitsbehoud en overkapping
van de pulpa met het biomateriaal
MTA vpt (vitale pulpathherapie)

Smaakvol
Profluorid Varnish+ BioMin
met Bioglas is de nieuwe
ondersteuning voor
verharding van tandglazuur

Laat alle wensen
uitkomen

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Universeel composiet van 4 mm in vijf Cluster-kleuren

Terwijl esthetische universele composieten omslachtig in lagen van 2 mm opgebouwd en gepolymeriseerd moeten worden, bieden bulk-fillcomposieten het voordeel dat 4 mm ineens in de caviteit kan worden aangebracht.

Maar bulk-fillcomposieten worden vanwege de slechtere esthetische eigenschappen vaak alleen voor de laterale elementen gebruikt. Aan deze beperking maakt VOCO nu een einde met GrandioSO Unlimited. Het esthetische materiaal kan in lagen van 4 mm in de caviteit worden aangebracht en is zowel voor de frontale als de laterale elementen geïndiceerd. U heeft dus nog maar één universeel composiet nodig om op te vullen.

Cluster-kleuren-systeem

Bovendien hoeft u slechts 5 kleuren op voorraad te hebben om in uw dagelijkse praktijk optimaal voorbereid te zijn, zodat u minder voorraad hoeft te beheren. Want dankzij het vereenvoudigde kleursysteem zijn met slechts 5 Cluster kleuren alle 16 VITA® classical-kleuren te realiseren:

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5				A4		
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

High-performancecomposiet

Met een indrukwekkend vulstofgehalte van 91 gew% verlegt GrandioSO Unlimited bovendien de grenzen voor stabiliteit en slijtvastheid. Ook de geringe volumekrimp van 1,44% verkleint het risico van rand aansluiting en randverkleuringen, en draagt bij aan de kwalitatief meest hoogwaardige vullingen.



Testverpakking

10 × 0,3 g Caps
(2 elk A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ kleurrand

REF 6257

66,00 € ~~83,30 €~~ **

Set spuitje

5 × 4,5 g spuitje
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ kleurrand

REF 6258

356,70 € ~~446,50 €~~ **

Caps Set

75 × 0,3 g Caps
(15 elk A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ kleurrand

REF 6270

356,70 € ~~446,50 €~~ **

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder www.voco.dental

Het high-performancecomposiet

Universeel

Voor frontale en laterale elementen

Hoogste stabiliteit en stevigheid

91 gew% vulstofgehalte

5 cluster-kleuren

Voorziet in alle 16 VITA® classical-kleuren

Geen laagjes

Incrementdikte van 4 mm

Uitstekende esthetiek

Voortreffelijke polijstbaarheid



MTA vpt

Vitaliteitsbehoud van de pulpa voor de dagelijkse praktijk –
biocompatibel en vrij van monomeren

Voor vitaliteitsbehoud van de pulpa is een biocompatibele, stabiele pulpabescherming nodig die afsluit tegen bacteriën. Met MTA vpt biedt VOCO een materiaal van mineraal trioxideaggregaat (MTA) dat precies voor dit doel is ontwikkeld. Binnen de vitale pulpatherapie (VPT) kan MTA vpt worden ingezet voor onderlaag, indirecte en directe overkappingen en ook de restauratie van de pulpa na een vitale amputatie (gedeeltelijke of volledige pulpomotomie). Ook in het kader van cariësbehandeling kan carieus restdentine met MTA vpt betrouwbaar worden afgedekt.

Bij de uitharding van MTA vpt komen calcium- en hydroxide-ionen vrij, wat lichaamseigen regeneratieve processen en de vorming van tertiair dentine stimuleert. De hoge pH-waarde die daarbij ontstaat, staat bekend om zijn bacteriostatische werking en ondersteunt de remineralisatie. Op deze manier vormt MTA vpt een stabiele beschermingsbarrière die afsluit tegen bacteriën – de optimale basis voor behoud van een vitale pulpa.

- MTA voor de dagelijkse praktijk – biocompatibel en vrij van monomeren
- Hoge pH-waarde (12) – bekende bacteriostatische werking
- Afgifte van calcium- en hydroxide-ionen – bevorderen de vorming van tertiair dentine en remineralisatie
- Betrouwbare pulpabescherming – mineraliseert en sluit zo af tegen bacteriën
- Tijdsbesparend – onmiddellijk verdere verwerking door drukvrije overkappende lagen
- Eenvoudige verwerking – aanbrengen met standaard instrumenten of direct uit de capsule
- Geen productgerelateerde verkleuringen – vrij van bismutoxide en ijzerhoudende verbindingen
- Röntgenopaak (290% AI)



MTA vpt

Handmix
10 g poeder + 10 ml vloeistof

REF 1645

165,00 €

MTA vpt AC

25 stuks applicatie capsule

REF 1646

179,00 €



Het aantrekkelijk geprijsde MTA materiaal voor uw dagelijkse praktijk

Onderlaagcement
voor alle vulmaterialen

Indirecte
pulpa-overkapping

Directe
pulpa-overkapping

Behandeling van de pulpa
na vitale amputatie





Bifix Temp fluorescent

Duaalhardend tijdelijk op composiet gebaseerd bevestigingsmateriaal

Bifix Temp fluorescent sluit met zijn tandachtige, translucente kleur harmonieus aan op het provisorium. De esthetiek verandert niet bij natuurlijk licht en ook onder UV-A-licht schijnt de fluorescentie bij provisorisch geplaatste restauraties niet door. Onder UV-A-licht fluoresceert het materiaal zeer sterk, wat het detecteren en verwijderen van zelfs de kleinste materiaalresten na uitname van het provisorium vergemakkelijkt en een nauwkeurig passende plaatsing van de daaropvolgende definitieve restauratie ondersteunt. Alleen al door dit voordeel verloopt de normalerwijze tijdrovende nabewerking efficiënter.



Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix spuit
+ toebehoren

REF 1056

55,70 €

AlignerFlow LC

Fluorescerend composiet voor aligner attachments

Alignertherapieën vormen een vast onderdeel van de tandheelkundige en kaakorthopedische behandelingen. In veel gevallen spelen attachments daarbij een rol. Deze moeten voor de duur van de behandeling hoogst stabiel blijven en aan het einde van de behandeling veilig, zonder resten te verwijderen zijn. Met AlignerFlow LC biedt VOCO u een juist voor deze aspecten ontworpen nanohybride-composiet met fluorescentie-effect. Onder UV-A-licht zijn de attachments te controleren en zijn eventuele resten bij verwijdering exact te identificeren en zonder beschadiging van het glazuur te verwijderen.



AlignerFlow LC

2 x 2 g spuitje A1

REF 1526

2 x 2 g spuitje A2

REF 1527


2 x 2 g spuitje A3

REF 1528

81,00 €

De voordelen in één oogopslag

- Nauwkeurige applicatie met een perfecte flow
- Lichtuitharding door de transparante template
- Stabiel en slijtvast gedurende de hele gebruiksduur

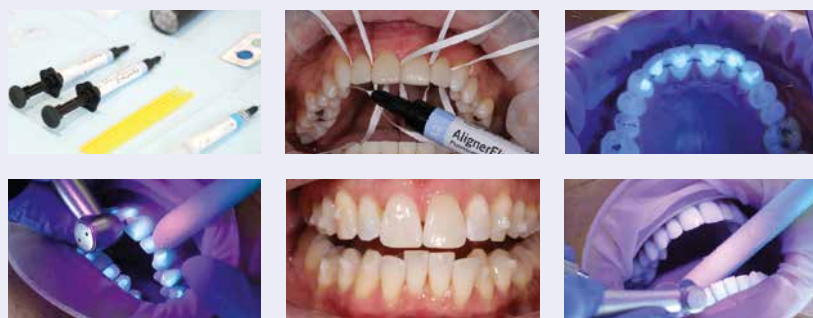

Bron: Dr. Montse Galiano, vk



Clip F fluorescent

Lichtuithardend vulmateriaal
voor tijdelijke restauraties

Clip F fluorescent overtuigt door zijn veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. Het ééncomponentenmateriaal is zeer gemakkelijk te plaatsen en te modelleren. Door de lichtuitharding is Clip F fluorescent onmiddellijk belastbaar en speekseldicht. De elastische materiaaleigenschappen maken in de meeste gevallen een verwijdering zonder achterblijvend restmateriaal mogelijk met schone en onbeschadigde preparatiegrenzen. Onder UV-A-licht is het vinden en verwijderen van kleine resten en overtollig materiaal veel makkelijker, in het bijzonder bij dunne lagen die met het blote oog niet goed te onderscheiden zijn. Clip F is geschikt voor alle soorten tijdelijke vullingen, afsluitingen en restauraties, inclusief de onlay-/inlaytechniek.



Clip F fluorescent

2 x 4 g spuitje

REF 1288

57,80 €

Rebilda DC fluorescent

Het eerste stompopbouw- en post-lutingsysteem met
activeerbare fluorescentie

Met het duaal uithardende, op composiet gebaseerde stompopbouw- en hechtsysteem Rebilda DC fluorescent brengt VOCO een nieuw lid van de Rebilda familie op de markt. Rebilda producten worden al tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt en genieten veel vertrouwen in tandartspraktijken, vooral vanwege hun dentineachtige eigenschappen. Nu is er een fluorescerende versie toegevoegd aan de bestaande dentine, witte en blauwe tinten, wat opnieuw VOCO's vermogen om te innoveren demonstreert.



Cartridge 50 g,
fluorescerende dentine,
+ toebehoren

REF 1399

191,10 €

QuickMix spuit 10 g
fluorescerende dentine,
+ toebehoren

REF 1406

81,70 €

Fluorescerend onder UV-A-licht

Uitstekende zichtbaarheid van
overtollig materiaal en opbouw-
marges, ook diep subgingivaal

Eenvoudige verwerking

Slijpbaar als dentine
Vloeibare consistentie –
perfecte aanpassing

Uitstekende esthetiek

Dentine-kleurig onder natuurlijk
licht en daarom bij uitstek geschikt
voor zeer esthetische restauraties

Duaal uithardend

Bruikbaar in het wortelkanaal
voor het hechten van wortelstiften
(bijvoorbeeld Rebilda Post)

Profluorid Varnish + BioMin

Maakt verzwakt tandglazuur significant harder –
in vier aangename smaakvarianten

De succesvolle fluoridelak VOCO Profluorid Varnish bevat het additief Bioglas van BioMin. Dit onzichtbare Bioglas lost op in speeksel en maakt calcium- en fosfaationen vrij die de remineralisatie van het gebitselement ondersteunen. Samen met de fluoride uit de Varnish worden op het tandoppervlak kristallijne structuren gevormd die o.a. een door zuur verzwakt tandglazuur significant harder maakt.

Samen met de bekende desensibilisering een echte dubbele bescherming!



Bespaar
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Karamel REF 2276
Kersen REF 2277
Mint REF 2278
Bubble Gum REF 2279

373,80 € ~~498,40 €**~~

50 × 0,40 ml SingleDose

Karamel REF 2270
Kersen REF 2271
Mint REF 2272
Bubble Gum REF 2273

124,60 €

10 ml Tube

Karamel REF 2266
Kersen REF 2267
Mint REF 2268
Bubble Gum REF 2269

35,30 €

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
gesorteerd: Karamel, Kersen,
Mint, Bubble Gum

REF 2274

124,60 €

Profluorid Varnish

Fluoride-houdende dentale desensibiliserings lak (5 % NaF)

De oorzaak van hypergevoeligheid zijn doorgaans open dentinekanaaltjes. Daarom is de behandeling erop gericht deze langdurig af te sluiten. Profluorid Varnish is een fluoridehoudende lak die na cavititspreparatie of bij gevoelige tandhalzen de vrijliggende dentinekanaaltjes effectief verzegelt.

De voordelen in één oogopslag

- Snelle desensibilisering en fluoride-afgifte (22.600 ppm fluoride)
- Gemakkelijk aan te brengen – vocht tolerant
- Beschikbaar in zeven aangename smaken
- Economische applicatie in dunne lagen, hoog resultaat

Bespaar
25%*

10 ml Tube

Meloen REF 1267 Karamell REF 2232
Mint REF 2234 Kersen REF 2233
Pina Colada REF 2237 Cola lime REF 2236

30,60 €

200 × 0,40 ml SingleDose

Meloen REF 1271 Bubble Gum REF 2239
Mint REF 2231 Kersen REF 2230
Pina Colada REF 2243 Cola lime REF 2241
Karamel REF 2229

324,90 € ~~433,20 €**~~

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tube
gesorteerd: Mint, Meloen,
Kersen en Karamel

REF 2971

91,80 € ~~122,40 €**~~



Futurabond U

In praktische SingleDose

Aan Futurabond U ligt een lang ontwikkelingsproces ten grondslag dat slechts één doel had: een universeel adhesief dat de gebruiker alleen maar voordelen biedt zoals betrouwbaarheid en dat ieder ander adhesiefsysteem in de praktijk overbodig maakt.

Met Futurabond U verlegt daarom de grenzen wat betreft zijn hecht eigenschappen en vooral omdat het flexibel en veelzijdig inzetbaar is.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
+ toebehoren

REF 1571

118,80 €

200 SingleDose

200 × Futurabond U
+ toebehoren

REF 1572

415,20 € ~~475,20 €**~~

Bespaar
12%*




Grandio blocs & Grandio disc

Het nanokeramische hybride CAD/CAM-materiaal voor
permanente restauraties van afzonderlijke elementen

Grandio blocs/Grandio disc overtuigt met de fysische eigenschappen ten aanzien van elasticiteit, stevigheid en een hoog vulstofgehalte van 86 gew%.

Daardoor komt het materiaal dicht in de buurt van natuurlijke tanden dan alle andere materialen voor indirecte restauratie. Grandio blocs/Grandio disc is de eerste keus en superieur aan traditioneel keramiek. De producten kunnen probleemloos intraoraal worden bewerkt en tot hoogglans worden gepolijst.

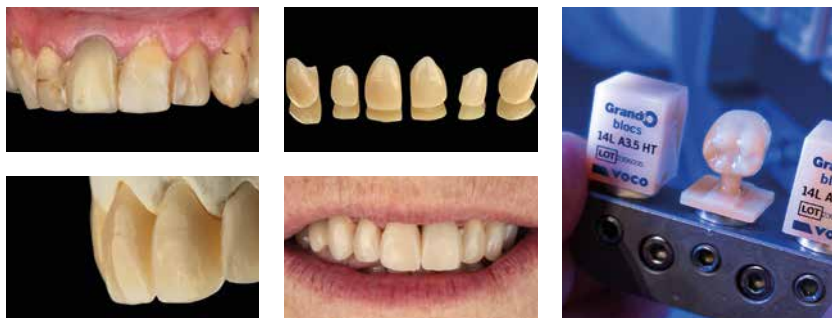

Bron: Dr. Felipe Moura, Brazilië

	Voor de frontale elementen							Voor de laterale elementen			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
No. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
No. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



NIEUW

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

Bijvoorbeeld:

A2 REF 6249

A3 REF 6250

369,00 €

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder www.voco.dental

Ook
voor Planmill®
verkrijgbaar



Grandio blocs

5 × No. 12 LT/HT

REF zie tabel

112,40 €

Grandio blocs

5 × No. 14L LT/HT

REF zie tabel

121,20 €

Bifix Veneer LC

Gewoon veilig, gewoon esthetisch – veneerbevestiging met geoptimaliseerde workflow


Het bijzonder esthetische en met 81 gew% gevulde lichtuithardende nanohybride-bevestigingscomposiet Bifix Veneer LC is speciaal ontwikkeld voor eenvoudige en veilige adhesieve bevestiging van lichtdoorlatende veneers, inlays en onlays van composiet of keramiek.

Het overzichtelijke kleurconcept met de **drie kleuren bright, clear en warm** maakt dat veneers efficiënt aan te brengen zijn en heeft een positieve invloed op het esthetische resultaat. Dankzij de exact op elkaar afgestemde Try-In-pasta kan je de bijpassende kleur makkelijk selecteren en kan het eindresultaat vooraf worden gecontroleerd.

Een intuïtief en efficiënt kleurconcept voor een optimaal esthetisch resultaat



Bron: Prof. Carlos Torres, Brazilië

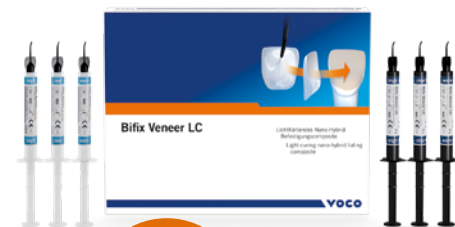

Bespaar
20%*

Bifix Veneer set

3 x 2 g spuitje Bifix Veneer LC
3 x 2,5 g spuitje Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ toebehoren

REF 1428

164,00 € ~~204,00 €**~~

Bifix Veneer systeem set

3 x 2 g spuitje Bifix Veneer LC
3 x 2,5 g spuitje Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
2 ml spuitje Vococid
20 stuks SingleDose Futurabond U
20 stuks SingleDose Ceramic Bond
10 stuks Sticky Tim
+ toebehoren

REF 1429

257,20 € ~~325,00 €**~~

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder www.voco.dental

Voor het bestellen van de genoemde VOCO acties kunt u zich wenden tot uw VOCO dentalconsultant of uw dentaldepot.

*vergeleken met individuele aankoop **totaal prijs per stuk

Aanbiedingen alleen via aangesloten depots. Met prijzen van uw depot wordt in elk geval rekening gehouden.

Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief B.T.W. Fouten en vergissingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Duitsland

VOCO Customer Service
service@voco.de

