

LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX : NOTRE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1957




QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale multinationale, le Laboratoire Huckert's International développe, fabrique et commercialise des désinfectants de haut niveau (niveau intermédiaire en France) et des cosmétiques uniques, **totalemment sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La renommée de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et l'équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.



POURQUOI DÉSINFECTER ?

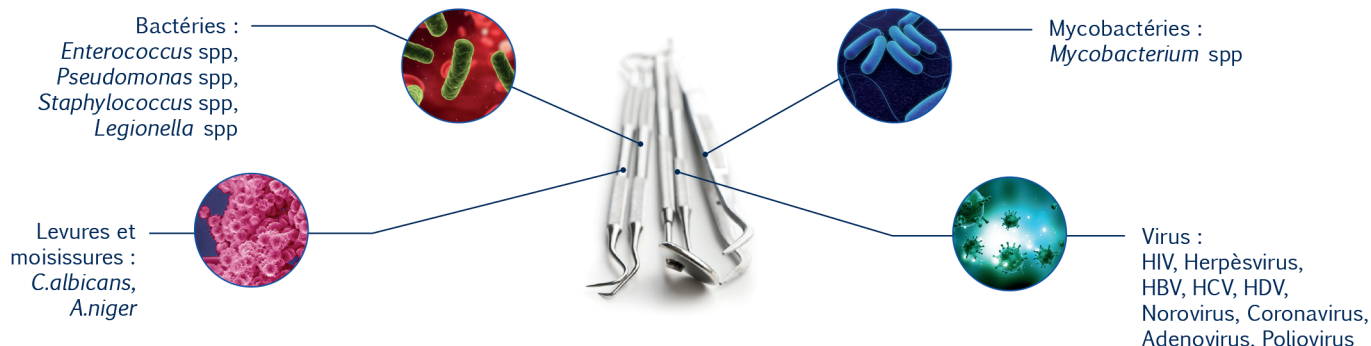

POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée peut engendrer une contamination croisée fongique, virale ou bactérienne, et être à la source d'une infection.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées avant chaque intervention. Seul un contrôle méticuleux peut garantir cette sécurité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisation, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **alcool, Javel, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

Un dispositif médical doit être désinfecté par un produit avec le statut Dispositif Médical (enregistré dans Eudamed) selon la réglementation européenne MDR 2017/745

NOTRE MISSION

Expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un risque biologique par un danger chimique* ”



RESPECTUEUX DE
L'OPÉRATEUR



RESPECTUEUX DU
PATIENT



RESPECTUEUX DU
MATÉRIEL



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique.**

pH
neutre

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos Biocides selon les mêmes exigences que nos Dispositifs Médicaux.** L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012.**

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nous recherchons avant tout à faire adhérer nos collaborateurs à nos **Valeurs d'Entreprise Familiale. Qualité, santé, éthique sont au coeur de toutes nos démarches.**

Allant du caractère non nocif de nos produits pour L'OPM (Opérateur, Patient, Matériel) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Afin de maîtriser les risques environnementaux, nous suivons **la voie de l'amélioration continue** car rien n'est jamais acquis. Nous **analysons, évaluons, estimons et améliorons l'impact sur l'environnement.**




- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Respectueux de l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales.**
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action.**
- ✓ Des vaporisateurs prêts-à-l'emploi **sans gaz propulseur.**
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages entièrement **recyclables.**
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés.**
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMATIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES



**CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!**

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID

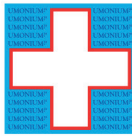

UMONIUM³⁸
maître en désinfection



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE



Non toxique

Ininflammable

Sans vapeur dangereuse

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité et pH neutre.**



La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes.** Les **concentrations d'utilisation sont faibles.** Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS

pH
neutre

✓ FORMULE SANS
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

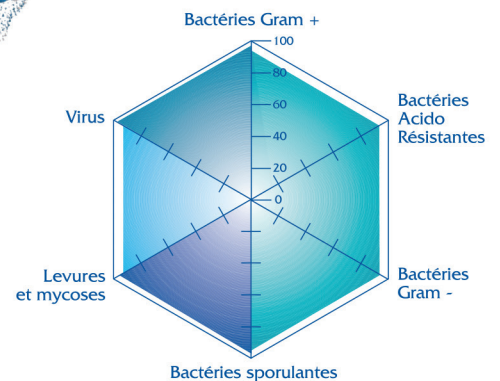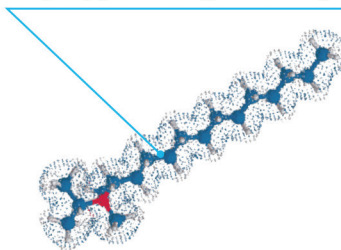

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est en cours de procédure de **certification au règlement MDR (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »





UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS BIOCIDES

Le Laboratoire Huckert' International a validé la **certification au règlement BPR (UE) 528/2012** relatif aux biocides. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport aux autorisations nationales. Afin de vous garantir la meilleure qualité, nous nous sommes toujours engagés à fabriquer et contrôler nos produits biocides selon les mêmes critères d'exigences que nos produits de statut dispositif médical.

La conformité à ces nouvelles réglementations du système qualité du Laboratoire Huckert's International est la garantie de l'excellence de l'ensemble de nos produits pour le traitement de vos dispositifs médicaux et biocides.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

NORME CADRE EN 14885 : 2022

SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE	RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	RÉDUCTION SPORES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1 ESSAI DE SCREENING 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
PHASE 2 étape 1 ESSAI EN SUSPENSION 	99.9999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99.9990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99.9990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i> <i>Vaccinia virus</i>	99.9990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	3 log EN 13704 <i>Bacillus subtilis</i> 99.990% 4 log EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> & <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridioides difficile</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★★ Validation limitée
PHASE 2 étape 2 ESSAI EN CONDITION SÈCHE 	99.9990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> 99.9999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	99.9990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	99.9990% 4 log N/A EN 16777 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> (<i>Parvovirus</i> > 40° C)	99.9990% 4 log N/A EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	99.9990% 4 log EN 17846 <i>Clostridioides difficile</i>	HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation proche des conditions pratiques
PHASE 3 ESSAI EN CONDITION PRATIQUES 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★★★★ Validation en condition pratique

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE



TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES



STABLES



ININFLAMMABLES



NON CORROSIFS



SANS VAPEUR
DANGEREUSE



NON POLLUANT



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES



NON POLLUANT



TEXTURE NON
COLLANTE



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARMI LES PLUS
SÉCURITAIRES



USAGES
FRÉQUENTS



POUR TOUTE
LA FAMILLE



TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT



PARFUM 100%
NATUREL



PEAUX FRAGILES



FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES

AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



La cavité buccale peut être le réservoir de microorganismes pathogènes et opportunistes pouvant présenter un risque de contamination croisée et d'infection systémique.

Les actes de chirurgie dentaire ou d'odontologie, particulièrement invasifs, font partie des chirurgies les plus à risque et le développement d'actes comme la parodontie ou l'implantologie nécessitent une attention accrue sur les procédures d'hygiène et de désinfection.

Les agents pathogènes peuvent transiter par le patient lui-même (salive, sang), le personnel (principalement par les mains), une surface, l'unité de soin (aérosols), un dispositif ou un instrument incorrectement désinfecté.

Par ailleurs, si un transfert d'agents pathogènes est généralement perçu et pris en compte dans le sens personnel/cabinet vers le patient, il est également important de prendre en compte le risque d'exposition du personnel ou du praticien via un patient porteur.

Dans un secteur très concurrentiel, il est essentiel de s'attarder sur les normes et les réelles performances, et de prendre en compte le risque chimique de produits utilisés au quotidien.



Il est obligatoire d'utiliser des **produits de désinfection réglementaires** pour désinfecter vos dispositifs médicaux au sein de votre cabinet. Finis les produits corrosifs et dangereux, **UMONIUM^{3S}** vous permet d'améliorer et de simplifier vos procédures d'hygiène et de désinfection de façon totalement sécuritaire pour l'ensemble de l'équipe, de vos équipements les plus sensibles et dans le respect d'une démarche environnementale.



Tous nos produits sont fabriqués selon les critères de qualité (traçabilité et stabilité constante) imposés par les certifications **ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016**.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM³⁸
EQUIPMENTS



Dispositif Médical Classe IIa



UMONIUM³⁸
MEDICAL SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
MEDICAL TISSUES



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
MASTER



Biocide TP2

SURFACES ET ÉQUIPEMENTS

SOL

Issus de la **chimie fine**, nos détergents-désinfectants **aux huiles essentielles** vous assurent une **désinfection de haut niveau** avec des **temps de contacts courts**, des **procédures simples** et des **dosages économiques**. Nos dispositifs médicaux sont conformes à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4) et nos biocides sont conformes à la nouvelle réglementation Européenne **Biocide BPR 528/2012**

Parfaitement compatibles avec un usage quotidien, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.

A52134 1 litre
Prix promo: 62,00

A26205 5 litres
Prix promo: 258,00

A26206 1 litre
Prix promo: 32,00

A42538 100 lingettes (20 x 20 cm)
Prix promo: 44,00

A44268 95 lingettes (15 x 15 cm)
Prix promo: 19,90

A39244 1 litre
Prix promo: 59,00

A21164 5 litres
Prix promo: 249,00

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).


CONDITIONNEMENTS

1L et 5L

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Mobiliers
- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 à p.d. 5 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².


CONDITIONNEMENTS

1L

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Décontamination des empreintes
- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 à p.d. 30 secondes

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².


CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 (20 x 20 cm) et 95 lingettes (15 x 15 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 à p.d. 30 secondes

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).


CONDITIONNEMENTS

1L et 5L

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Carrelages
- ✓ Sols PVC
- ✓ Résines et bétons cirés
- ✓ Revêtements calcaires
- ✓ Parquets

TEMPS DE CONTACT

 à p.d. 10 minutes.



UMONIUM³⁸
STERILY

ÉTAPE 1
NETTOYAGE & PRÉ-DÉSINFECTION



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
INSTRUMENTS

ÉTAPE 2
DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU



Dispositif Médical Classe IIb

INSTRUMENTS

Véritables alternatives aux produits enzymatiques, acides et alcalins, **UMONIUM³⁸ STERILY** et **UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS** s'utilisent conjointement pour les phases de pré-désinfection et de désinfection de l'instrumentation.

Conformes à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4), **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**, ils ne laissent **aucun résidu après rinçage**.

A42490 1 litre
Prix promo: 41,50

A42491 5 litres
Prix promo: 136,00

A28211 1 litre
Prix promo: 68,00

A41922 5 litres
Prix promo: 278,00

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% pour une application manuelle (trempage + brossage) ou en bain à ultrasons.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée.

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET PRÉ-DÉSINFECTION)

- ✓ Instrumentations
- ✓ Instrumentation rotative
- ✓ Crachoirs
- ✓ Séparateur d'amalgames
- ✓ Aspiration semi-automatique

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Instrumentations
- ✓ Instrumentation rotative
- ✓ Crachoirs
- ✓ Séparateur d'amalgames
- ✓ Aspiration semi-automatique

TEMPS DE CONTACT



10 minutes.



UMONIUM³⁸
air control & AIR CONTROL MATIC



DESTRUCTEUR DE MAUVAISES ODEURS

À base d'huiles essentielles sélectionnées, **UMONIUM³⁸ air control** combat radicalement les mauvaises odeurs.

Chaque flacon de 100 mL contient l'équivalent d'au moins 20 kg de plantes déshydratées et offre une autonomie de plus de 900 vaporisations. Remarquablement efficace, il assainit l'air et élimine les odeurs par une simple pulvérisation.

Une version pour diffuseur automatique existe sous le nom **UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC**.

A21145 UMONIUM³⁸ air control 100 ml
Prix promo: 72,00

A42488 UMONIUM³⁸ air control 10 ml
Prix promo: 27,00

A10748 UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC 250 ml
Prix promo: 61,00

A10749 UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC Diffuseur automatique
Prix promo: 116,00

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi pour un usage atmosphérique.
- ✓ Une vaporisation par 20 m³ (± 900 pulvérisations par 100 ml).

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



Biocide TP1



Biocide TP1



Dermo-Cosmétique



Dermo-Cosmétique

HYGIÈNE DES MAINS

Parce qu'elles sont nos premiers outils, les mains sont les plus importants vecteurs de transmission des micro-organismes. Par conséquent, leur hygiène joue un rôle essentiel dans la maîtrise du risque infectieux.

Cependant, l'utilisation très fréquente de savons et de solutions hydroalcooliques assèche la peau et peut conduire au développement de troubles dermatologiques: dermatites, allergies, eczémas, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S® vous propose des gammes enrichies en huiles essentielles, qui respectent votre peau, même sèche et vous garantit une hygiène impeccable.



GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHIS EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, enrichi en huiles essentielles de thym, camomille et eucalyptus et **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, enrichi en actifs émoullients, hydratent en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgicale.

De plus, leurs textures non-collantes ne provoquent pas d'inconfort lors du port des gants et ne laissent aucune sensation de résidu même après de nombreuses applications.



DÉSINFECTION CHIRURGICALE

→ Validée dès 3 min.



DÉSINFECTION HYGIÉNIQUE

→ Validée dès 30 sec.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées.

CONDITIONNEMENTS

400 ml et 1L.

GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHIS EN HUILES ESSENTIELLES

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, enrichi en huiles essentielles de thym, camomille et eucalyptus et **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, enrichi en actifs émoullients, hydratent en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgicale.

De plus, leurs textures non-collantes ne provoquent pas d'inconfort lors du port des gants et ne laissent aucune sensation de résidu même après de nombreuses applications.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées et qui aiment le parfum des huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

400 ml et 1L

SAVON EXFOLIANT TOUS TYPES DE PEAUX

Spécialement développé pour les mains fortement souillées, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **microbrush** lave et désincruste en profondeur les impuretés des sillons de la peau grâce à ses brisures de noyaux d'olives et sa formule enrichie en huiles essentielles.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains fortement souillées (comme celles des prothésistes par exemple) qui ont besoin d'être lavées en profondeur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

5L

SAVON DERMATOLOGIQUE TOUS TYPES DE PEAUX

Enrichi en huiles essentielles et naturellement parfumé, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **nature** lave en douceur, respecte la barrière cutanée et protège les peaux les plus sèches.


PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature**, votre allié au quotidien contre les agressions cutanées.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être lavées en douceur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

400 ml, 1L et 5L

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	PRIX
		A52135	Flacon 400 mL	Prix promo: 27,00
		A52136	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	Prix promo: 51,00
		A43712	Distributeur mural automatique	Prix promo: 111,00
		A43711	Distributeur mural manuel	Prix promo: 65,00
		A46938	Flacon 400 mL	Prix promo: 27,50
		A42706	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	Prix promo: 52,50
		A43712	Distributeur mural automatique	Prix promo: 111,00
		A43711	Distributeur mural manuel	Prix promo: 65,00
		A48642	Flacon 400 mL	Prix promo: 27,50
		A49588	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	Prix promo: 53,00
		A43712	Distributeur mural automatique	Prix promo: 111,00
		A43711	Distributeur mural manuel	Prix promo: 65,00
		A21147	Bidon de 5L avec pompe	Prix promo: 249,90
		A52133	Bidon de 5L avec pompe	Prix promo: 210,00

Remise jusqu'à 29%

Package Deal PD0456

Achetez **4 x** HUCKERT'S emballages au choix parmi sélection

à **prix promo**

et achetez **UMONIUM³⁸ TISSUES** (95 pièces) ou **air control** (10 ml)

ou **PHYTOGEL sanitizer** ou **nature** (400 ml)

à **1 euro**.



 **COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**

Taxe récupel: 0,10. Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition. Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes au dessus de 150 euros hors TVA. Les promotions sont valables jusqu'au **30/09/2026**

Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.

Denta SA, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

Comptoir Dentaire de Bruxelles, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht, www.comptoir-dentaire.be

WWW.HUCKERTS.NET - INFO@HUCKERTS.NET

