

**INFECTIERISICO BEHEERSEN:
ONZE EXPERTISE SINDS 1957**



WIE ZIJN WIJ?

Het familiebedrijf **Laboratoire Huckert's International** ontwikkelt, produceert en verkoopt unieke hoogwaardige desinfectiemiddelen en cosmetica, die **volledig veilig** zijn voor al uw reinigings- en desinfectieprocessen.

Het succes van ons laboratorium is gebaseerd op de kwaliteit en technische aard van zijn producten, het dynamisme van zijn teams en het subtiel evenwicht **tussen fijne chemie en de kracht van planten**.



WAAROM DESINFECTEREN?


Bacteriën:
Enterococcus spp,
Pseudomonas spp,
Staphylococcus spp,
Legionella spp




Mycobacteriën:
Mycobacterium spp



Gisten en
schimmels:
C.albicans,
A.niger

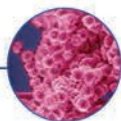

Virussen:
HIV, Herpesvirus,
HBV, HCV, HDV,
Norovirus, Coronavirus,
Adenovirus, Poliovirus

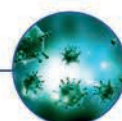

WAAROM ONTSMETTEN?

Bij een ideale temperatuur en aanwezigheid van voedingsstoffen vermenigvuldigen micro-organismen zich om de 20 minuten. Zo kan een zeer kleine hoeveelheid ziekteverwekkende bacteriën afkomstig van een besmette bron schimmel, virale of bacteriële kruisbesmetting veroorzaken en de bron van een infectie zijn.

Het is van essentieel belang om elk risico op besmetting uit te sluiten door voor elke interventie efficiënte en gecontroleerde was- en desinfectieprocedures uit te voeren. Alleen zorgvuldige controle kan deze professionele veiligheid garanderen.

WIST U DIT?

Een gevaarlijk product is geen garantie voor een product van hoge kwaliteit: de **Europese normen** stellen u in staat om de doeltreffendheid van uw producten te beoordelen. De testomstandigheden moeten zo nauw mogelijk aansluiten bij de werkelijke gebruiksomstandigheden en verder gaan dan alleen efficiëntietests in suspensie (in vloeibare staat).

“Je desinfecteert alleen goed wat schoon is”: alcohol, bleekmiddel, perazijnzuur, waterstofperoxide, caustische soda en veel ontsmettingsmiddelen hebben geen **reinigende eigenschappen**. Hun desinfectieprestaties worden beïnvloed door de aanwezigheid van eiwitafzetting of andere interfererende stoffen en door de temperatuur waarbij ze worden gebruikt.

Een medisch hulpmiddel moet worden gedesinfecteerd met een product dat de status van medisch hulpmiddel heeft (geregistreerd bij Eudamed) overeenkomstig de Europese verordening MDR 2017/745.

ONZE MISSIE

Expert in hoogwaardige biologische ontsmetting en desinfectie. Onze missie is om een feilloze desinfectie van alle pathogene flora te garanderen, zelfs in omstandigheden van interferentie (**bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën, sporen, naakte virussen en omhulde virussen**) zonder ongewenste neveneffecten te veroorzaken.

“Vervang een biologisch risico niet door een chemisch gevaar”



OPERATOR
VRIENDELIJK



PATIËNT
VRIENDELIJK



MATERIAAL
VRIENDELIJK



MILIEU
VRIENDELIJK

Onze producten zijn **zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar** en vormen **geen risico op corrosie, verbranding of giftige dampen**.

pH
neutraal

✓ **FORMULE ZONDER**
→ CMR-STOFFEN
→ HORMOONONTREGELAAR

We streven ernaar **onze Biociden volgens dezelfde eisen als onze Medische apparaten te produceren en te controleren**. Al onze biociden beantwoorden aan de **Europese Biocide regelgeving Nr. 528/2012**.

ONZE INZET VOOR HET MILIEU

Duurzame ontwikkeling is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van ons laboratorium.

We streven er vooral naar dat onze medewerkers zich houden aan de **waarden van ons familiebedrijf. Kwaliteit, gezondheid en ethiek staan centraal bij alles wat we doen.**

Van de niet-schadelijke aard van onze producten voor de OPMM (Operator, Patiënt, Materiaal, Milieu) tot vermindering van de milieupact als gevolg van onze activiteit.

Om milieurisico's te beheersen, volgen we **het pad van continue verbetering** want niets is voor altijd. We **analyseren, beoordelen, schatten en verbeteren de impact op het milieu.**



- ✓ Bij het productieproces ontstaat er **geen giftig en milieugevaarlijk afval**.
- ✓ **Milieuvriendelijk**.
- ✓ Formules op basis van **essentiële oliën** en geconcentreerde extracten van **medicinale planten**.
- ✓ Koude desinfectie voor **een gemakkelijke en snelle actie**.
- ✓ Gebruiksklare verstuivers **zonder gas**.
- ✓ Een **breed gamma** aan geconcentreerde producten.
- ✓ De verpakking is volledig recycleerbaar.
- ✓ Een bijdrage tot **de verwerking van gerecycleerd afval**.
- ✓ **Economische en automatische** meng- en doseersystemen ECONOMATIC.
- ✓ Consistente en traceerbare kwaliteit.

100%
RECYCLEERBARE
VERPAKKINGEN

RECYCLEERBARE
DOZEN, VERPAKKINGEN
EN DOEKJES. VERGEET
NIET UW AFVAL TE
SORTEREN!

INNOVATIE IN KOUDE DESINFECTIE



EEN ONTSMETTINGSMIDDEL Aangepast aan al uw NODEN

Er waren 38 pogingen nodig om de formule te verkrijgen die **prestatie, snelheid, stabiliteit en neutrale pH** combineert.



De formule van UMONIUM³⁸ toont een aanzienlijk breder activiteitspectrum aan. De **contacttijd is kort en realistisch**. De **gebruikconcentraties zijn laag**. De spanningsactieve aard van de formule zorgt zowel voor een **zeer krachtig** reinigende en desinfecterende werking als voor verwijdering van een laagje vet, eiwit of slijmafzetting, door onderdompeling, stromingscirculatie, met een vochtig doekje af te vegen, te vaporiseren, schuim te sprayen... Zowel koud als warm.



pH
neutraal

✓ FORMULE ZONDER
→ CMR-STOFFEN
→ HORMOONONTREGELAAR

Isopropyltridecyldimethylammonium

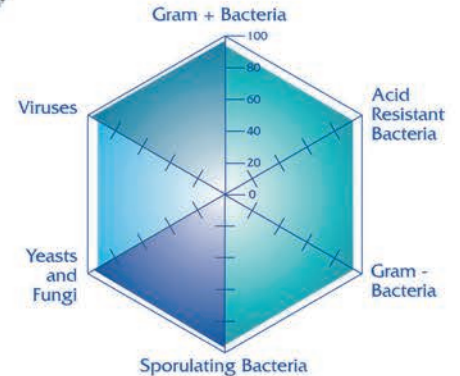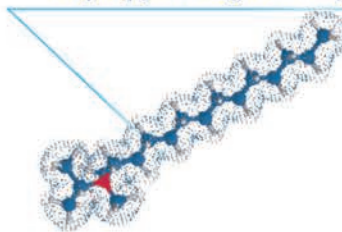

NIEUWE CERTIFICERING VOOR ONZE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Laboratoire Huckert's International doorloopt momenteel de certificeringsprocedure voor de **MDR-verordening (EU) 2017/745** betreffende medische hulpmiddelen. Het betreft een uitgebreid productgamma ten opzichte van de richtlijn 93/42/EEG en bevat nieuwe classificatieregels. De belangrijkste verbeteringen van deze nieuwe verordening zijn:

- ✓ een versterkte conformiteitsbeoordeling (klinische beoordeling)
- ✓ een toename van de post-marketing follow-up
- ✓ betere traceerbaarheid van producten door de invoering van de "UDI" (unique device identifier) codes
- ✓ verbeterd risicobeheer
- ✓ verhoogde transparantie door de oprichting van het Europese "EUDAMED" platform





NIEUWE CERTIFICERING VOOR ONZE BIOCIDEN

Laboratoire Huckert's International heeft de **certificering behaald onder de BPR (EU) 528/2012-verordening** inzake biociden. Deze verordening omvat een breder scala aan producten dan die welke zijn toegestaan onder nationale regelgeving. Om u de hoogste kwaliteit te garanderen, hebben wij ons altijd ingezet om onze biociden te produceren en te testen volgens dezelfde strenge eisen als onze producten voor medische hulpmiddelen.

Naleving van deze nieuwe regelgeving voor het kwaliteitssysteem van Laboratoire Huckert's International garandeert de uitmuntendheid van al onze producten voor de behandeling van uw medische hulpmiddelen en biociden.

BEWEZEN EFFECTIVITEIT

KADERNORM EN 14885: 2022

SITUATIES & OMSTANDIGHEDEN IN HET LABORATORIUM	VERMINDERING BACTERIËN	VERMINDERING SCHIMMELS	VERMINDERING VIRUSSEN	VERMINDERING MYCOBACTERIËN	VERMINDERDE SPOREN	DESINFECTIE-PRESTATIE
FASE 1 SCREENINGTEST 	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	PRESTATIE LAAG ★ Kunstmatige evaluatie
FASE 2 stap 1 TEST IN SUSPENSIE 	99.999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99.990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99.990% 4 log EN 14476 EN 14476 Poliovirus 1 Adenovirus 5 Norovirus murin Vaccinia virus	99.990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	3 log EN 13704 <i>Bacillus subtilis</i> 99.990% 4 log EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> & <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridioides difficile</i>	TUSSENLIJGENDE PRESTATIE ★★ Beperkte validatie
FASE 2 stap 2 TEST ONDER DROGE OMSTANDIGHEDEN 	99.990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> 99.999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	99.990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	99.990% 4 log N/A EN 16777 Adenovirus 5 Norovirus Vaccinia virus EN 17111 Adenovirus 5 Norovirus Vaccinia virus (Parvovirus > 40° C)	99.990% 4 log N/A EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	99.990% 4 log EN 17846 <i>Clostridioides difficile</i>	HOGE KWALITEIT ★★ Validatie dicht bij de praktijk-omstandigheden
FASE 3 TEST ONDER PRAKTIJK-OMSTANDIGHEDEN 	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	ZEER HOGE PRESTATIE ★★ Validatie in praktijkomstandigheden

EN = Europese Norm

EN XXX = DM/Instrumenten

EN XXX = Biociden

EN XXX = Mechanische werking

EN XXX = Niet Toepasbaar

NT = Niet Toepasbaar

WAAROM ONZE PRODUCTEN GEBRUIKEN?



UMONIUM³⁸
master in disinfection

ONZE DESINFECTERENDE OPLOSSINGEN VAN FIJNCHEMICALIËN



BREED SPECTRUM
BACTERICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTERICIDE,
VIRICIDE & SPORICIDE



VEILIG
ZONDER CMR-STOFFEN
OF
HORMOONONTREGELAARS



ZONDER RESIDU
NA HET SPOELEN



REALISTISCHE
CONTACTTIJD



STABIEL



NIET ONTVLAMBAAR



NIET CORROSIEF



ZONDER
GEVAARLIJKE DAMPEN



NIET VERVUILEND



OPPERVLAKTE-
ACTIEVE STOFFEN

ONZE DERMATOLOGISCHE OPLOSSINGEN UIT MEDICINALE PLANTEN



NIET VERVUILEND



NIET-KLEVENDE
TEXTUUR



HYDROALCOHOLISCHE GELS
DOELTREFFEND TEGEN MRSA
EN HET CORONAVIRUS



VEILIG
INGREDIËNTEN GESELECTEERD
UIT DE MEEST VEILIGE



FREQUENT
GEBRUIK



VOOR HET HELE
GEZIN



DERMATOLOGISCH
GETEST



100%
NATUURLIJKE GEUR



GEVOELIGE HUID



FORMULES MET
ESSENTIËLE OLIËN

IN DIENST VAN UW ACTIVITEITENSECTOR



De mondholte kan een reservoir zijn van pathogene en opportunistische micro-organismen die een risico op kruisbesmetting en systemische infectie kunnen vormen.

Tandheelkundige chirurgie of tandheelkundige ingrepen, die bijzonder invasief zijn, behoren tot de meest risicovolle operaties en de ontwikkeling van procedures zoals parodontologie en implantologie vereist meer aandacht voor hygiëne en desinfectieprocedures.

Ziekteverwekkers kunnen via de patiënt zelf (speeksel, bloed), het personeel (voornamelijk via de handen), een oppervlak, de zorgeneheid (aerosols), een apparaat of instrument dat niet goed gedesinfecteerd is, worden verspreid.

Bovendien, hoewel overdracht van ziekteverwekkers doorgaans in de richting van personeel/praktijk naar de patiënt toe wordt waargenomen, is het tevens belangrijk om rekening te houden met het risico van blootstelling van het personeel of arts aan een patiënt die drager is.

In een sterk concurrerende sector is het essentieel om te focussen op de normen en de werkelijke prestaties en rekening te houden met het chemische risico van producten die dagelijks worden gebruikt.



Het is verplicht om **goedgekeurde desinfectiemiddelen** te gebruiken voor het desinfecteren van uw medische hulpmiddelen in uw praktijk.

Geen corrosieve en gevaarlijke producten meer. **UMONIUM[®]** stelt u in staat uw hygiëne- en desinfectieprocedures te verbeteren en te vereenvoudigen op een volledig veilige manier voor uw hele team, uw meest gevoelige apparatuur en met inachtneming van de milieunormen



Al onze producten worden vervaardigd volgens de kwaliteitscriteria (traceerbaarheid en constante stabiliteit) die vereist zijn door **ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016**-certificeringen.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP

UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS



Medisch Apparaat Klasse IIa

UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY



Medisch Apparaat Klasse IIb

UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES



Medisch Apparaat Klasse IIb

UMONIUM³⁸ MASTER



Biocide TP2

OPPERVLAKKEN EN APPARATEN

VLOER

Onze reinigings- en ontsmettingsmiddelen met essentiële oliën zijn afkomstig van de fijnchemie en zorgen voor hoogwaardige desinfectie met korte contacttijden, eenvoudige werkwijzen en zuinige doseringen. Onze medische apparaten voldoen aan de regelgeving DE 93/42/CEE voor medische apparaten (bijlage II, excl. §4) en onze biociden zijn in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving Biocide BPR 528/2012.

Onze producten zijn perfect geschikt voor dagelijks gebruik en zijn stabiel, pH neutraal, veilig (niet vlambaar, zonder risico op corrosie, verbranding of giftige dampen) en zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar. Ze zijn effectief op de gehele pathogene flora, voldoen aan de hoogste Europese normen en laten geen resten achter na het spelen.

A52134 1 liter
Promo prijs: 62,00

A26205 5 liter
Promo prijs: 258,00

A26206 1 liter
Promo prijs: 32,00

A42538 100 tissues (20 x 20 cm)
Promo prijs: 44,00

A44268 95 tissues (15 x 15 cm)
Promo prijs: 19,90

A39244 1 liter
Promo prijs: 59,00

A21164 5 liter
Promo prijs: 249,00

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te weken of met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ Met 1 L concentraat wordt 200 L verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 L en 5 L

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Meubels
- ✓ Technische tafels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Behandelstoelen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische apparaten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD

Vanaf 5 minuten.

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Gebruiksklare spray met dubbele sproeikop (fijne straal of schuim) om met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ 500 ml is goed voor een oppervlak van 100 m².

VERPAKKINGEN

1 L

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Ontsmetten van vingerafdrukken
- ✓ Technische tafels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Behandelstoelen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische apparaten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD

Vanaf 30 seconden.

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Gebruiksklare vochtige doekjes.
- ✓ Een doekje (20 x 20 cm) is goed voor een oppervlakte van 3 m².

VERPAKKINGEN

Dispenserdoos met 100 (20 x 20 cm) en 95 doekjes (15 x 15 cm).

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Technische tafels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Behandelstoelen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische apparaten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD

Vanaf 30 seconden

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te weken of met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ Met 1 L concentraat wordt 200 L verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 L en 5 L

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Tegels
- ✓ PVC-vloeren
- ✓ Hars en gewaxt beton
- ✓ Kalksteen coating
- ✓ Parket

CONTACTTIJD

Vanaf 10 minuten.


UMONIUM³⁸
STERILY



Medisch Apparaat Klasse IIb


UMONIUM³⁸
INSTRUMENTS



Medisch Apparaat Klasse IIb

INSTRUMENTEN

Werkzame alternatieven voor enzymatische, zure en alkalische producten, **UMONIUM³⁸ STERILY** en **UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS** kunnen samen worden gebruikt voor het pre-desinfecteren en desinfecteren van instrumenten.

Overeenkomstig de **DE 93/42/EEG voor Medische apparaten** (bijlage II, excl. §4), **stabiel, pH neutraal, veilig** (niet vlambaar, zonder risico op corrosie, verbranding of giftige dampen) **en zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar**, ze laten **geen resten achter na het afspoelen**.

A42490 1 liter
Promo prijs: 41,50

A42491 5 liter
Promo prijs: 136,00

A28211 1 liter
Promo prijs: 68,00

A41922 5 liter
Promo prijs: 278,00

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% voor handmatige toepassing (weken + borstelen) of in een ultrasoon bad.
- ✓ Met 1 l. concentraat wordt 200 l. verdunde oplossing verkregen.

VERPAKKINGEN

1 l. en 5 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN PRE-DESINFECTIE)

- ✓ Instrumenten
- ✓ Roterende instrumenten
- ✓ Spuugbakjes
- ✓ Amalgaanafscheider
- ✓ Halfautomatische afzuiging

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te weken.
- ✓ Met 1 l. concentraat wordt 200 l. verdunde oplossing verkregen (0,5%).


VERPAKKINGEN

1 l. en 5 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Instrumenten
- ✓ Roterende instrumenten
- ✓ Spuugbakjes
- ✓ Amalgaanafscheider
- ✓ Halfautomatische afzuiging

CONTACTTIJD

 10 minuten.


UMONIUM³⁸
air control &
AIR CONTROL MATIC



GEUR VERDELGER

Op basis van essentiële oliën, **UMONIUM³⁸ air control** bestrijdt radicaal nare geuren.

Elke fles van 100 ml bevat minstens 20 kg gedroogde planten en gaat meer dan 900 verstuiwingen mee. Het is opmerkelijk effectief, zuivert de lucht en verwijdert geuren door enkel te sprayen.

Een versie voor de automatische verstuiver bestaat onder de naam **UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC**.

A21145 UMONIUM³⁸ air control 100 ml
Promo prijs: 72,00

A42488 UMONIUM³⁸ air control 10 ml
Promo prijs: 27,00

A10748 UMONIUM³⁸
 AIR CONTROL MATIC 250 ml
Promo prijs: 61,00

A10749 UMONIUM³⁸
 AIR CONTROL MATIC
 Automatische verstuiver
Promo prijs: 116,00

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Gebruiksklare spray voor atmosferisch gebruik.
- ✓ Een verstuiwing per 20 m³ (± 900 verstuiwingen per 100 ml).

VERPAKKINGEN

UMONIUM³⁸ air control :
 5 ml, 10 ml en 100 ml.

UMONIUM³⁸ air control matic: 250 ml.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
genesis

GEURLOOS

Biocide TP1



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
sanitizer

Biocide TP1



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
microbrush

Dermo-Cosmetica



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
nature

95,1%
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN
**

Dermo-Cosmetica

HANDHYGIËNE

Omdat onze handen onze eerste hulpmiddelen zijn, zijn het de belangrijkste overdrachtsvectoren van micro-organismen. Hun hygiëne speelt dus een essentiële rol bij het beheersen van risico op infectie.

Het zeer frequente gebruik van zeep en hydro-alcoholoplossingen droogt de huid echter uit en kan leiden tot dermatologische aandoeningen. dermatitis, allergieën, eczeem, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] biedt assortimenten verrijkt met essentiële oliën die uw huid respecteren, zelfs de droge huid en zorgt voor een perfecte hygiëne.



HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL

VERRIJKT MET VERZACHTENDE INGREDIËNTEN

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **sanitizer**, verrijkt met essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus en PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **genesis**, verrijkt met verzachtende actieve stoffen, hydrateert diep en zorgt voor hygiënische en chirurgische desinfectie.

Bovendien veroorzaakt de niet-plakkerige textuur geen ongemak bij het dragen van handschoenen en laat geen resten achter, zelfs na veelvuldig gebruik.



CHIRURGISCHE
DESINFECTIE

➔ Gevalideerd binnen
3 min.

VOOR WIE?

✓ Alle handen die gedesinfecteerd moeten worden.

VERPAKKINGEN

400 ml en 1 l.

HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL

VERRIJKT MET ESSENTIËLE OLIËN

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **sanitizer**, verrijkt met essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus en PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **genesis**, verrijkt met verzachtende actieve stoffen, hydrateert diep en zorgt voor hygiënische en chirurgische desinfectie.

Bovendien veroorzaakt de niet-plakkerige textuur geen ongemak bij het dragen van handschoenen en laat geen resten achter, zelfs na veelvuldig gebruik.



HYGIËNISCHE
DESINFECTIE

➔ Gevalideerd binnen
30 sec.

VOOR WIE?

✓ Voor alle handen die gedesinfecteerd moeten worden en die van de geur van essentiële oliën houden.

VERPAKKINGEN

400 ml en 1 l.

EXFOLIËRENDE ZEEP

ALLE HUIDTYPEN

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **microbrush** is speciaal ontwikkeld voor vuile handen, reinigt grondig en verwijdert onzuiverheden uit de groeven van de huidplooiën dankzij de stukjes olijfpit en een formule verrijkt met etherische oliën.

VOOR WIE?

✓ Alle zeer vuile handen (zoals die van prothesemakers bijvoorbeeld) die grondig gewassen moeten worden met essentiële olieverrijkte zeep.

VERPAKKINGEN

5 l.

DERMATOLOGISCHE ZEEP

ALLE HUIDTYPEN

De met essentiële oliën verrijkte en natuurlijk geperfumeerde PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **nature** reinigt zachtjes, respecteert de huidbarrière en beschermt de meest droge huid.

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **nature**, uw dagelijkse bondgenoot tegen huidagressie.

VOOR WIE?

✓ Alle handen die voorzichtig gewassen moeten worden met essentiële olieverrijkte zeep.

VERPAKKINGEN

400 ml, 1 l en 5 l.

* Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de grondstoffen. ** Volgens ISO 16128.

NAAM	FOTO(S)	ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	Prijs
		A52135	Fles 400 ml	Promo prijs: 27,00
		A52136	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	Promo prijs: 51,00
		A43712	Automatische wanddispenser	Promo prijs: 111,00
		A43711	Handmatige wanddispenser	Promo prijs: 65,00
		A46938	Fles 400 ml	Promo prijs: 27,50
		A42706	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	Promo prijs: 52,50
		A43712	Automatische wanddispenser	Promo prijs: 111,00
		A43711	Handmatige wanddispenser	Promo prijs: 65,00
		A48642	Fles 400 ml	Promo prijs: 27,50
		A49588	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	Promo prijs: 53,00
		A43712	Automatische wanddispenser	Promo prijs: 111,00
		A43711	Handmatige wanddispenser	Promo prijs: 65,00
		A21147	5 l.-fles met pomp	Promo prijs: 249,90
		A52133	5 l.-fles met pomp	Promo prijs: 210,00

Tot 29% korting

Package Deal PD0456

Koop **4 x** HUCKERT'S verpakkingen naar keuze uit de selectie
aan **promoprijs** en koop **UMONIUM³⁸ TISSUES** (95 stuks)
of **air control** (10 ml)
of **PHYTOGEL sanitizer** of **nature** (400 ml) aan **1 euro**



Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zelffouten voorbehouden.
Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie - en verzendkosten aangerekend.

Promoties geldig tot **30/09/2026** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldakens 2, 2550 Kontich, www.denta.be