

COMPOSITE HYBRIDE SUBMICRONIQUE UNIVERSEL

BRILLIANT EverGlow[®]

Un éclat durable – rendu brillant



NOUVELLES
TEINTES



DES RÉSULTATS BRILLANTS

Grâce au composite universel BRILLIANT EverGlow, des restaurations hautement esthétiques et de longue durée peuvent être obtenues sans effort.

Développé avec un accent particulier mis sur l'aspect esthétique et la facilité d'utilisation, il excelle par sa manipulation aisée, ses teintes d'une intégration exceptionnelle et son brillant de haute qualité.

BRILLIANT EverGlow est facile à polir. Grâce à une hausse de la résistance à l'abrasion et l'amélioration de la conservation du brillant, il permet aussi d'obtenir des résultats brillants à long terme.

- Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable
- Restaurations mono-teintes esthétiques
- Système de teintes polyvalent avec trois niveaux de translucidité
- Excellente sculptabilité et consistance lisse
- Bonne mouillabilité, très peu collant sur l'instrument




APTITUDE AU POLISSAGE EXCEPTIONNELLE ET BRILLANT DURABLE

UNE COMPOSITION DES CHARGES AXÉE SUR LE BRILLANT

Au vu de sa composition de charge submicronique, BRILLIANT EverGlow apporte immédiatement une surface exceptionnellement lisse, satinée et brillante dès la mise en place de l'obturation. Cela simplifie le polissage, permettant la réalisation de restaurations hautement esthétiques en un rien de temps. Même à long terme, BRILLIANT EverGlow convainc par son importante rétention du brillant.


ÉVALUATION DE L'APTITUDE AU POLISSAGE¹

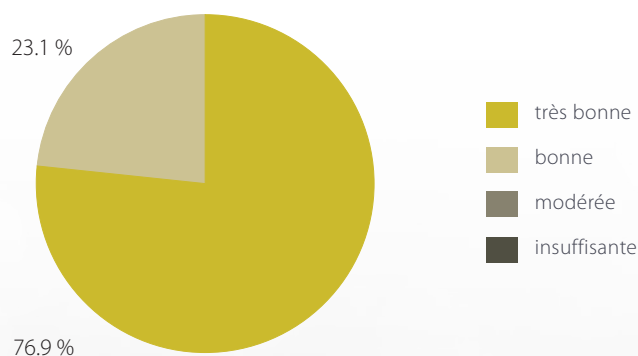

La bonne aptitude au polissage a été confirmée par des dentistes. Dans le cadre d'une étude menée parmi 39 dentistes en Europe et aux USA, **100 %** des dentistes ont fait état d'un score positif. 76,9 % ont même indiqué le meilleur score possible.

CONSERVATION DU BRILLANT¹

Après exposition dans un simulateur de brosse à dents, mesuré en unités de brillant (UB)

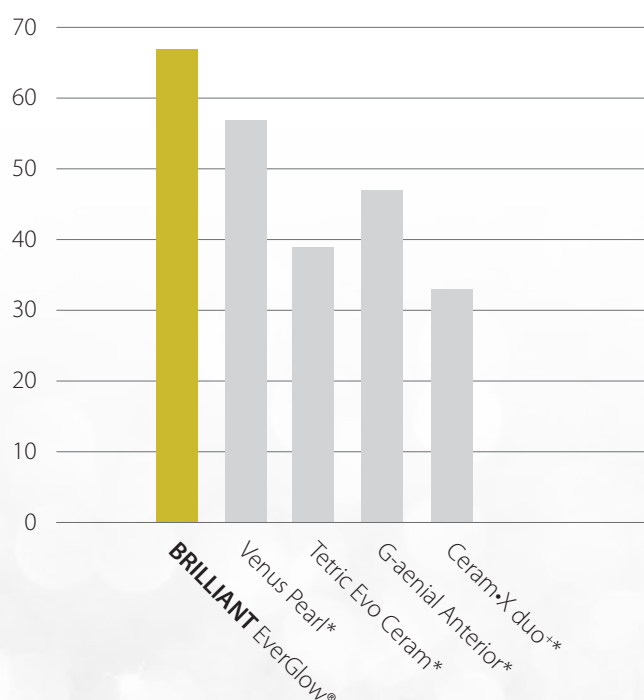

Même après une mise en charge pendant plus de 20 000 cycles de brosse à dents, BRILLIANT EverGlow conserve un niveau de brillant élevé.


¹ Source : données internes | * n'est pas une marque commerciale de COLTENE

RESTAURATIONS MONO-TEINTES ESTHÉTIQUES AVEC DES TEINTES UNIVERSELLES

COLTENE, UN PIONNIER EN MATIÈRE DE TEINTES ESTHÉTIQUES

BRILLIANT EverGlow offre des teintes universelles dans le cadre du système éprouvé Duo Shade inventé par COLTENE. Le système « Duo Shade » simplifie la gestion des teintes par la combinaison de deux teintes VITA* en une seule teinte (par exemple, A1/B1 ou A2/B2). Cela est rendu possible par les propriétés optiques du système « Duo Shade », ce qui permet une intégration harmonieuse parmi les dents adjacentes.

* VITA n'est pas une marque déposée de COLTENE

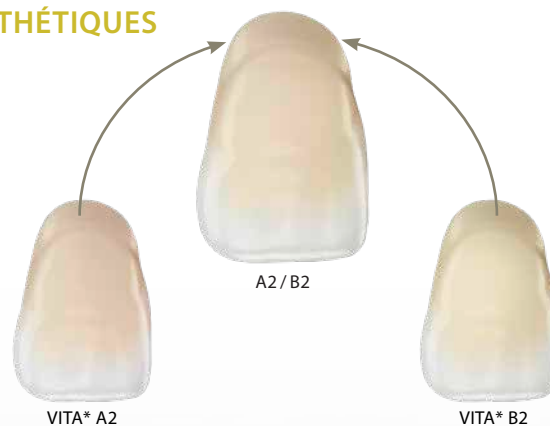

Cas clinique utilisant uniquement A3/D3

Situation initiale



Traitement



Traitement



Résultat final



LISEZ CE RAPPORT D'UTILISATEUR
DU DR MARKUS LENHARD
ET PLUS DE RAPPORTS D'UTILISATEUR

everglow.coltene.com/lit/fr


Avec BRILLIANT EverGlow, le concept « Duo Shade » est porté au niveau supérieur : les teintes universelles. L'utilisation d'une seule teinte universelle permet de réaliser des restaurations mono-teintes harmonieuses tout en éliminant la nécessité d'ajouter un émail translucide. L'obtention de résultats hautement esthétiques n'a jamais été si simple.



RECOMMANDATIONS SUR
LES COMBINAISONS DE
TEINTES



everglow.coltene.com/tips/fr

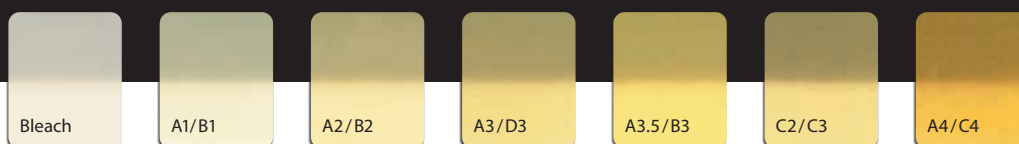

7 TEINTES UNIVERSELLES

- « Duo Shades » basées sur le teintier VITA*
- Pour des obturations des dents antérieures et postérieures
- Pour des restaurations mono-teintes esthétiques
- Pour le remplacement de la dentine dans des restaurations à teintes multiples

LE SYSTÈME DE TEINTES FLEXIBLE MÊME POUR LES CAS LES PLUS COMPLEXES

En plus des teintes universelles, huit teintes supplémentaires sont disponibles pour la personnalisation au moyen de la technique de stratification de teintes, ce qui permet l'obtention d'un résultat harmonieux, même dans les cas les plus complexes.

Les teintes translucides imitent les zones d'émail particulièrement prononcées, tandis que les cinq teintes opaques constituent la fondation de dents décolorées ou de tatouages à l'amalgame.

FACILE D'UTILISATION POUR LES CAS PRATIQUES QUOTIDIENS



Restaurations mono-teintes antérieures



Restaurations mono-teintes postérieures



Teinte opaque + teinte universelle

PROFESSIONNEL POUR LES CAS LES PLUS EXIGEANTS










Teinte universelle
+ couche de couverture translucide



Teinte opaque
+ teinte universelle



Teinte opaque + teinte universelle
+ couche de couverture translucide

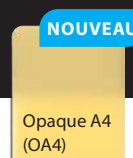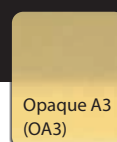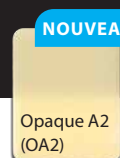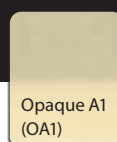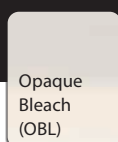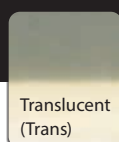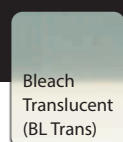

2 TEINTES TRANSLUCIDES

- Pour la caractérisation individuelle d'un émail particulièrement translucide

5 TEINTES OPAQUES

- Pour le masquage des écarts de saturation et des tatouages à l'amalgame

EXCELLENTE SCULPTABILITÉ ET CONSISTANCE LISSE

« *BRILLIANT EverGlow est l'un de mes composites favoris, il est facile à utiliser et à manipuler tout en permettant d'obtenir à tout moment un excellent effet poli.* »


Dr Monik Vasant
BChD MFGDP MSc



La consistance lisse et la stabilité dimensionnelle de BRILLIANT EverGlow en font un matériau d'obturation à la pointe de la technologie facile et pratique à appliquer dans les cavités. Les cuspidés minutieusement élaborés, les épaulements et les points de contact restent intacts et ne commencent pas à se déformer. Une résistance élevée à l'éclairage opératoire et une faible adhérence associées à une bonne mouillabilité complètent la facilité de manipulation.

ADHÉRENCE AUX INSTRUMENTS¹

Mesurée en newton

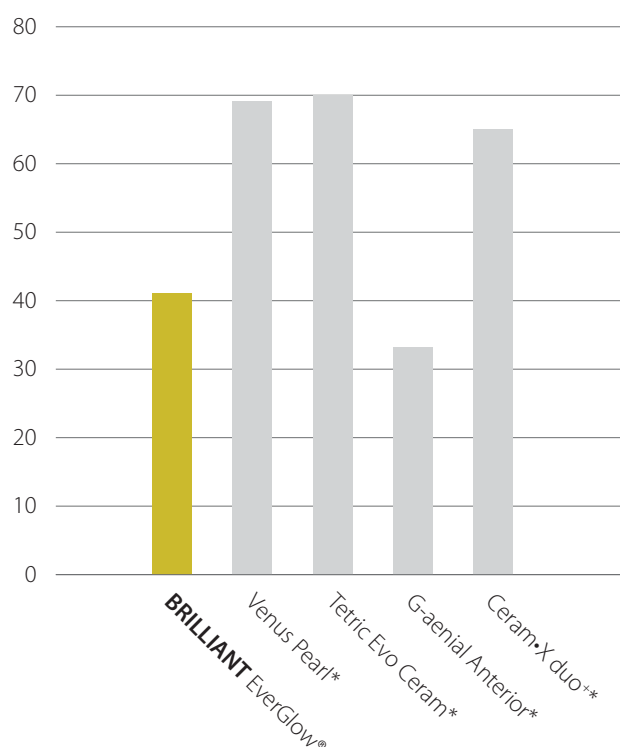


La consistance lisse et l'excellente mouillabilité de BRILLIANT EverGlow en font le produit idéal pour le scellement de restaurations indirectes, telles que des facettes en composite BRILLIANT COMPONEER de COLTÈNE.



Système de facettes composites en technique directe
BRILLIANT COMPONEER

Grâce à sa bonne mouillabilité, BRILLIANT EverGlow offre une excellente adhérence aux surfaces dentaires collées sans adhérer aux instruments. Cela a également été confirmé par une enquête internationale menée auprès des utilisateurs : plus de 90 % des participants ont jugé les propriétés d'adaptation aux parois « très bonnes » ou « bonnes ».

ADAPTATION SUR L'ADHÉSIF¹

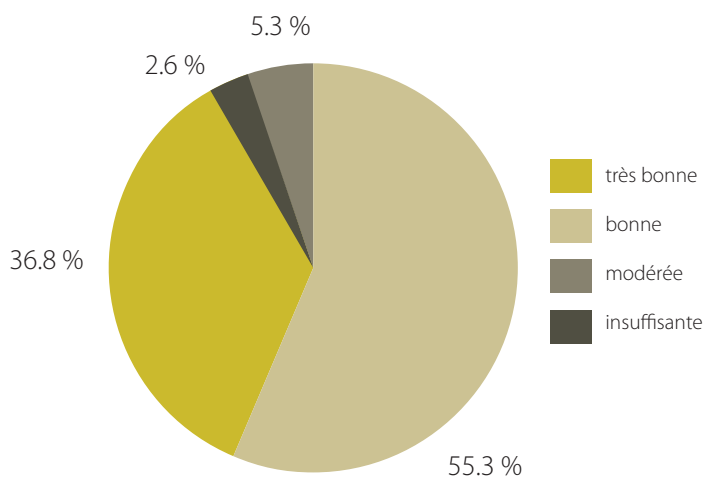


LA CLÉ POUR DES RESTAURATIONS BRILLANTES

TECHNOLOGIE DE CHARGES BRILLIANT EVERGLOW

La technologie de charges BRILLIANT EverGlow est conçue pour offrir une combinaison idéale caractérisée par une manipulation pratique, une bonne résistance mécanique et une esthétique durable. Des charges de verre submicro-techniques contribuent à une excellente aptitude au polissage et à une conservation du brillant optimale. Des charges pré-polymérisées supplémentaires affichant la même composition que celle du composite non polymérisé diminuent la réduction du volume et améliorent les propriétés de sculptage de la pâte. Les surfaces des charges sont spécialement traitées pour garantir une résistance optimale du composé dans la matrice de la résine. Ces caractéristiques réunissent les conditions préalables idéales à l'excellence de l'aptitude au polissage et de la conservation du brillant de BRILLIANT EverGlow. Le résultat obtenu est un composite à la pointe de la technologie qui permet des restaurations « brillantes ».


TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT

Image MEB de BRILLIANT EverGlow

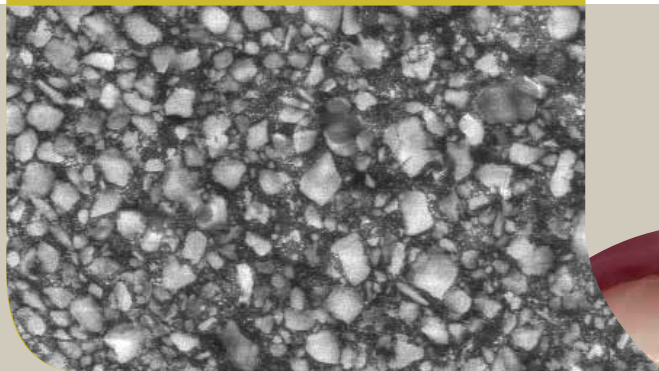

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ÉLEVÉE

Idéal pour les restaurations de dents postérieures en raison d'une résistance élevée aux forces masticatoires.

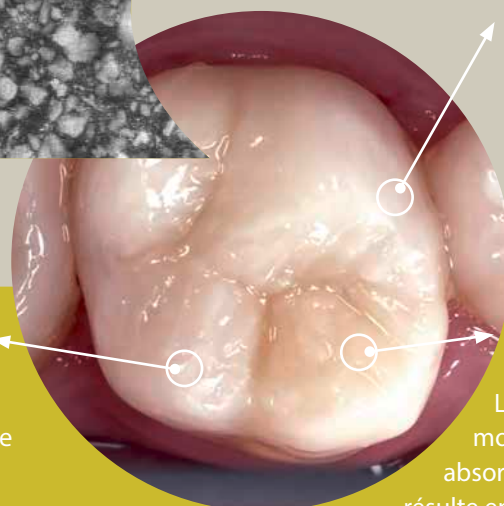

FAIBLE TAUX D'ABSORPTION D'EAU

La composition optimisée de monomères se traduit par une absorption d'eau plus faible, ce qui résulte ensuite en une excellente stabilité des teintes du composite à long terme.

COLLECTION D'ÉTUDES ET BIEN PLUS

Découvrez-en plus à propos des caractéristiques techniques et des résultats de mesure comparés aux concurrents dans le guide des produits.


TÉLÉCHARGER LA
BROCHURE PRODUIT



everglow.coltene.
com/guide/fr

ABRASION MINIME ¹

BRILLIANT EverGlow obtient des valeurs d'abrasion significativement inférieures à celles des composites conventionnels.

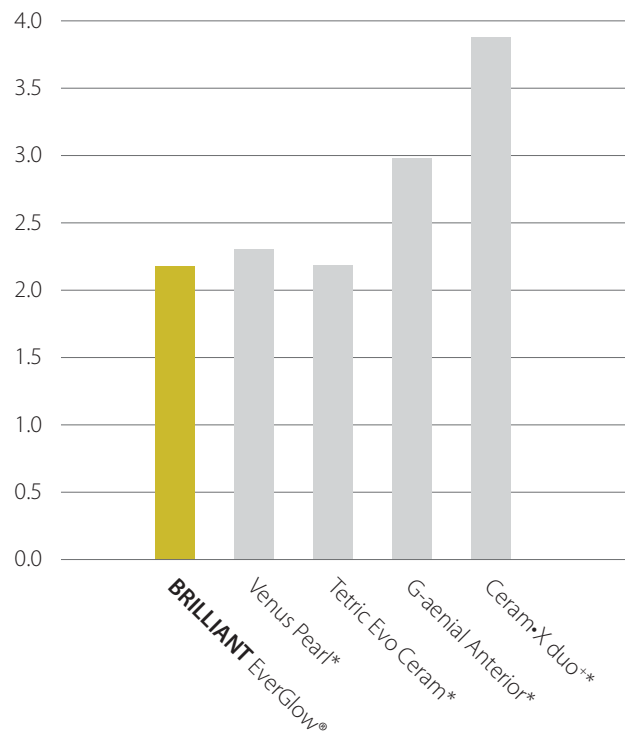

¹Source : données internes | * n'est pas une marque commerciale de COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW FLOW

LE COMPLÉMENT IDÉAL

Le composite hybride submicronique BRILLIANT EverGlow est aussi disponible dans une consistance fluidifiable. En plus des propriétés esthétiques du matériau, une attention particulière a aussi été accordée à l'obtention de propriétés de manipulation optimales.



«Il coule sans déborder !»

Dr Christoph G. Hüsken,
Suisse



HAUTEMENT STABLE, TOUT EN ÉTANT TRÈS FLUIDIFIABLE

Grâce à BRILLIANT EverGlow Flow, l'excellente stabilité et la bonne fluidité ne constituent plus une contradiction. BRILLIANT EverGlow Flow réussit à combiner ces propriétés en un seul matériau d'une utilisation extrêmement variée.

Affichant une haute stabilité et une parfaite thixotropie, BRILLIANT EverGlow Flow peut être utilisé à un niveau de précision absolu de manière contrôlée et simple.

« Cette thixotropie est parfaite et constitue une importante caractéristique ! Une application excellente sans étalement ni écoulement. Le matériau peut être déplacé là où l'on en a besoin et y reste suffisamment longtemps pour laisser le temps d'appliquer la lumière de polymérisation. »

Dr Ralph Schönemann,
Allemagne

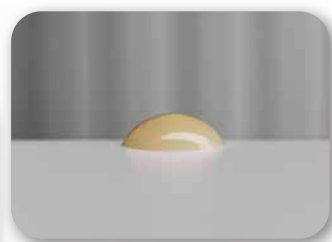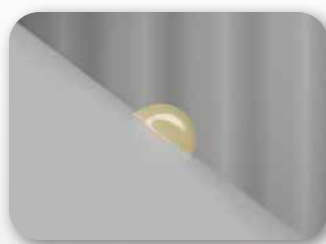

Stabilité initiale




Tandis que le comportement d'écoulement facilite un travail ciblé, la faible viscosité du matériau offre de bonnes

propriétés d'adaptation qui, par exemple, sont importantes en cas de revêtements de cavités et de petites obturations.



DEUX TAILLES D'AIGUILLE D'APPLICATION POUR PLUSIEURS INDICATIONS

Chaque seringue BRILLIANT EverGlow Flow est fournie avec deux tailles d'aiguille. Outre la taille standard à diamètre intérieur de 0,8 mm, une taille fine a été ajoutée aux accessoires fournis. Un diamètre interne de seulement 0,4 mm permet une précision d'application optimale.

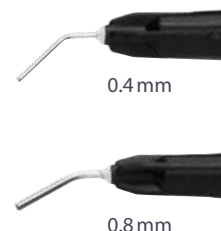

CONCEPT DE TEINTES FONCTIONNEL COMPRENANT UNE GAMME OPAQUE



BRILLIANT EverGlow Flow présente toutes les caractéristiques de qualité de la technologie de charges BRILLIANT EverGlow, telles que l'aptitude au polissage et la conservation du brillant. L'assortiment de teintes a aussi été adopté et offre les Duo Shades pratiques et trois niveaux de translucidité.

Bien que les teintes universelles et translucides servent dans la plupart des cas, les zones sombres et les écarts de saturation peuvent exercer une influence négative sur le résultat esthétique final d'une restauration et exigent un revêtement de cavités opaque. Les teintes opaques OA2 et OA3 ont été développées pour satisfaire cette exigence par la création de la base d'une restauration de teinte harmonieuse et esthétique.

Par conséquent, BRILLIANT EverGlow fournit des résultats esthétiques convaincants et constitue le partenaire parfait pour le composite universel BRILLIANT EverGlow.



RÉFÉRENCES PRODUITS

KITS

	Teintes universelles**							Teintes translucides***	
	Bleach (BL)	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3,5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Bleach Translucent (BL Trans)	Translucent (Trans)
Kit mono-teintes*									
60024151 7 × seringues de 3 g	1	1	1	1	1	1	1		
60024152 70 × tips de 0,2 g	10	10	10	10	10	10	10		
Kits d'extension*									
60024156 7 × seringues de 3 g								1	1
60024157 70 × tips de 0,2 g								10	10
Kit Flow									
60019760 4 × seringues de 2 g		1	1	1	1				

** Pour des restaurations mono-teintes ou la stratification de teintes. Voir page 4 pour obtenir de plus amples informations.

*** Teintes supplémentaires à combiner avec des teintes universelles dans le cadre de la stratification de teintes. Voir page 5 pour obtenir de plus amples informations.

RÉASSORTS

Seringues Tips

1 × 3 g 20 × 0,2 g

60019697	60019706	● Bleach (BL)
60019698	60019707	● A1 / B1
60019699	60019708	● A2 / B2
60019700	60019709	● A3 / D3
60019701	60019710	● A3.5 / B3
60019702	60019716	● C2 / C3
60019703	60019717	● A4 / C4
60019705	60019719	● Bleach Translucent (BL Trans)
60019704	60019718	● Translucent (Trans)
60019743	60019746	● Opaque Bleach (OBL)
60019744	60019747	● Opaque A1 (OA1)
60023819	60023823	● Opaque A2 (OA2)*
60019745	60019748	● Opaque A3 (OA3)
60023820	60023824	● Opaque A4 (OA4)*

FLOW Seringues

1 × 2 g + 10 aiguilles d'application

60019752	● Bleach (BL)
60019753	● A1 / B1
60019754	● A2 / B2
60019755	● A3 / D3
60019756	● A3.5 / B3
60019757	● A4 / C4
60019758	● Translucent (Trans)
60019751	● Opaque A2 (OA2)
60023825	● Opaque A3 (OA3)*

PACKS ÉCO

Seringues Tips

5 × 3 g 60 × 0,2 g

60024166	60024160	● A1 / B1
60024167	60024161	● A2 / B2
60024168	60024162	● A3 / D3
60024169	60024163	● A3.5 / B3



Flow

* Cette nouvelle teinte est disponible dans tous les pays d'Europe. Pour tous les autres marchés, veuillez consulter les représentants commerciaux locaux pour connaître l'assortiment de produits disponible et les kits existants.

Teintes opaques***					Accessoires					
					Teintier		Applicateur pour tip	Mini-bloc de papier	Aiguilles d'application	
Opaque Bleach (OBL)	Opaque A1 (OA1)	Opaque A2 (OA2)	Opaque A3 (OA3)	Opaque A4 (OA4)	Universal	Extension			Standard Ø 0,8 mm	Fine Ø 0,4 mm
					1			2		
					1		1	2		
1	1	1	1	1		1		2		
10	10	10	10	10		1	1	2		
								1	20	20

ACCESSOIRES

- 60024158** Teintier de teintes universelles
- 60024159** Extension de teintier avec teintes translucides + opaques
- 60022485** Applicateur pour tips de composite
- 8469** Aiguilles d'application Flow standard, 20 x Ø 0,8 mm
- 60022137** Aiguilles d'application Flow fines, 20 x Ø 0,4 mm



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adhésif autopolymérisable monocomposant pour les scellements adhésifs dans le cadre de la technique d'automordançage, de mordançage total ou sélectif.

60019538 Kit d'introduction

BRILLIANT COMPONEER

Facettes composites préfabriquées pour restauration de dents antérieures. Les facettes reposant sur la technologie de charges BRILLIANT EverGlow sont proposées en teintes Translucet et Bleach Translucet.

60023214 Kit d'introduction Seringues
60023215 Kit d'introduction Tips

ShapeGuard DIATECH

Polissoir en silicone pour le polissage préalable (rose) et le polissage hautement brillant (bleu) de restaurations composites. En raison de ses lamelles flexibles, le ShapeGuard DIATECH s'adapte à la structure superficielle.

60019916 Kit de polissage Plus pour composite



60023214



« J'ai été très impressionné par les performances de BRILLIANT EverGlow de COLTENE. Il n'adhère pas à vos instruments et cette propriété ainsi que sa compatibilité avec les mouvements de remplissage de l'opérateur garantissent son adaptation fiable à la forme de la cavité. Vous obtenez ainsi un résultat esthétique époustouflant qui n'exige aucun protocole de finition complexe et vous obtenez un résultat final lisse, brillant et naturel. Il présente une excellente adaptation en termes de teinte et je recommande vivement son ajout à l'arsenal de chaque dentiste. »

Dr Nalin Karunaratne, Royaume-Uni



« En qualité de leader d'opinion de nombreuses entreprises dentaires, j'ai eu la possibilité de travailler et de tester différents composites. Avec BRILLIANT EverGlow, ça a été un véritable coup de foudre. Il est très facile de correspondre à la teinte et de dissimuler les préparations des bords, malgré l'utilisation d'un nombre réduit de teintes, et d'obtenir des résultats prévisibles et de haute qualité au quotidien, aussi bien d'un point de vue esthétique que clinique. »

Dr Monaldo Saracinelli,
Style Italiano Group, Italie



LIEN VERS LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DU PRODUIT
BRILLIANT EVERGLOW

everglow.coltene.com/mov/fr



LIEN VERS LES RAPPORTS
D'UTILISATEUR

everglow.coltene.com/lit/fr



LIEN VERS DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS TECHNIQUES

everglow.coltene.com/guide/fr

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / É.-U.
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**