

Barcode Plus™ | Handwritten



- 1. VERIFIQUE** la identidad del paciente.
ESCRIBA los datos del paciente en las entradas de la banda con un bolígrafo.
NOTA No coloque el protector sobre los datos escritos en este momento.



- 2. ENVUELVA** la cola de la banda alrededor de la extremidad del paciente.
ABROCHE el botón para asegurarla.
CORTE el sobrante de cola de la banda con una tijera.



- 3. EXTRAIGA** la muestra previa a la transfusión según su protocolo.
QUITE la etiqueta con los datos del paciente escritos a mano de la banda.



- 4. COLOQUE** la etiqueta con los datos del paciente escritos a mano en el tubo de muestra en forma longitudinal.




- 5. QUITE** el revestimiento del protector.
CUBRA con el protector la copia de los datos del paciente que se escribieron a mano.
SELLE los bordes apretando con los dedos.



- 6. ETIQUETE** los formularios necesarios mientras está con el paciente según lo requiera su protocolo.
QUITE la cola de las etiquetas adhesivas de la banda en el lugar donde están perforadas.



- 7. QUITE** la lengüeta adhesiva en la parte de atrás de las etiquetas adhesivas sobrantes.
FIJE las etiquetas adhesivas sobrantes a la banda.
SAQUE las etiquetas sobrantes cortándolas con una tijera si no son necesarias según su protocolo.

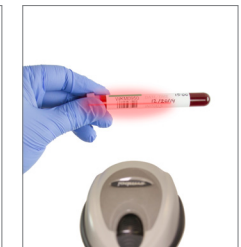

- 8. PEGUE** la cola de las etiquetas adhesivas en el tubo de muestra, si lo desea.
LLEVE la muestra al banco de sangre.
ESCANEE el identificador del banco de sangre (BBID) en el Sistema de información de laboratorio (LIS) o ingréselo de forma manual.

Para obtener más información, visite www.typenex.com o llámenos al 866.897.3639.