

Barcode Plus™ | Label



- PIDA** la etiqueta pre impresa según su protocolo.

VERIFIQUE la identidad del paciente.

COLOQUE una etiqueta de paciente en el área "COLOQUE DATOS DEL PACIENTE AQUÍ" de la banda.

QUITE el revestimiento del protector.

CUBRA la etiqueta de paciente con el protector.

SELLE los bordes apretando con los dedos sobre una superficie plana.



- ENVUELVA** la cola de la banda alrededor de la extremidad del paciente.

ABROCHE el botón para asegurarla.

CORTE el sobrante de cola de la banda con una tijera.



- EXTRAIGA** la muestra previa a la transfusión según su protocolo.

QUITE la etiqueta con los datos del paciente escritos a mano de la banda.

COLOQUE la etiqueta autoadhesiva en el tubo de muestra en forma longitudinal.



- COLOQUE** una etiqueta de paciente pre impresa sobre esta etiqueta autoadhesiva debajo de la línea discontinua.

FIRME/FECHE según lo requiera su protocolo.



- ETIQUETE** los formularios necesarios mientras está con el paciente según lo requiera su protocolo.

QUITE la cola de las etiquetas adhesivas de la banda en el lugar donde están perforadas.



- QUITE** la lengüeta adhesiva en la parte de atrás de las etiquetas adhesivas sobrantes.

FIJE las etiquetas adhesivas sobrantes a la banda.

SAQUE las etiquetas sobrantes cortándolas con una tijera si no son necesarias según su protocolo.



- PEGUE** la cola de las etiquetas adhesivas en el tubo de muestra, si lo desea.

LLEVE la muestra al banco de sangre.



- ESCANEE** el identificador del banco de sangre (BBID) en el Sistema de información de laboratorio (LIS) o ingréselo de forma manual.

Para obtener más información, visite www.typenex.com o llámenos al 866.897.3639.