

Original™ | Blood Band

La banda para muestras de sangre Original™ es la primera banda diseñada específicamente para pacientes de transfusión con identificador del banco de sangre (BBID, por sus siglas en inglés) exclusivo en un formato alfanumérico fácil de leer.



- 1. VERIFIQUE** la identidad del paciente.
ESCRIBA los datos del paciente en las entradas de la banda con un bolígrafo.
NOTA: Presione firmemente al escribir, ya que una copia de los datos escritos a mano quedará en la banda y se oscurecerá con el tiempo.

- 2. ENVUELVA** la cola de las etiquetas autoadhesivas BBID removibles alrededor de la extremidad del paciente, ajústela según sea necesario y alinee las dos tiras de plástico en el broche.
ASEGURE la banda cerrando el broche autocortante y presionando firmemente.

- 3. EXTRAIGA** la muestra previa a la transfusión según su protocolo.
QUITE la etiqueta con los datos del paciente escritos a mano de la banda.

- 4. COLOQUE** la etiqueta con los datos del paciente escritos a mano en el tubo de muestra en forma longitudinal.



- 5. ETIQUETE** los formularios necesarios mientras está con el paciente según lo requiera su protocolo.
QUITE la cola de las etiquetas adhesivas BBID removibles sosteniendo el broche autocortante y separándola.

- 6. PEGUE** la cola de las etiquetas adhesivas en el tubo de muestra, si lo desea.
LLEVE la muestra al banco de sangre.
INGRESE el identificador del banco de sangre (BBID) en el Sistema de información de laboratorio (LIS, por sus siglas en inglés).

Colores disponibles

- Rojo
- Verde
- Amarillo
- Azul
- Anaranjado

Para obtener más información, visite www.typenex.com o llámenos al 866.897.3639.