
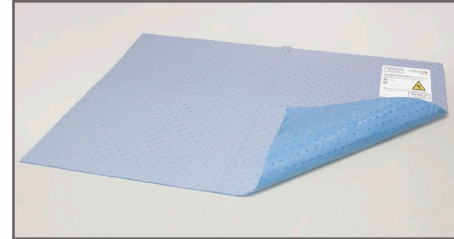


Absorbent Floor Mat | Waterproof Backsheet

La versión de la Alfombrilla absorbente de Typenex Medical con Lámina posterior impermeable está diseñada para ser colocada sobre un piso seco antes que este se moje con el fin de mantener seco el piso debajo de la alfombrilla y ayudar en el proceso de limpieza. Esta alfombrilla cuenta con una lámina posterior impermeable y antideslizante que se agarra al piso seco de la sala de operación.

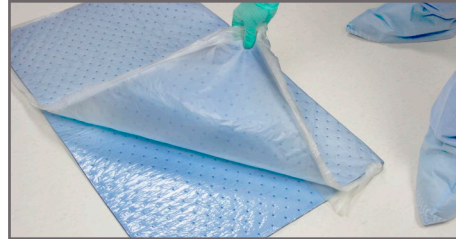

1. **SACAR** de la caja las bolsas que contienen las alfombrillas.

COLOCAR las bolsas de las alfombrillas en una ubicación de almacenamiento después de sacarlas de la caja.

2. **SACAR** la alfombrilla de la bolsa.
DESDOBLAR la alfombrilla para prepararla para su utilización.

3. **COLOCAR** la alfombrilla en el área deseada con la etiqueta boca arriba antes del procedimiento.

⚠ Tenga PRECAUCIÓN Tenga precaución al pararse o caminar sobre las alfombrillas.

4. **TRATE** la alfombrilla sucia con cuidado, siguiendo el protocolo de equipo de protección personal (EPP) de las instalaciones.

DESHACERSE de la alfombrilla replegándola y colocándola en un recipiente de residuos apropiado según el protocolo del hospital.

NOTA: Lo mejor sería mover el recipiente apropiado de residuos cerca de la alfombrilla sucia al momento de deshacerse de esta.