

Smearsafe™ | Dispensador de sangre

Smearsafe™ está destinado a proporcionar un medio seguro para obtener una gota de sangre de un tubo cerrado de recolección sin requerir que el usuario abra el tubo. Destinado a producir una gota de sangre adecuada para una citología manual, este dispositivo de uso único es compatible con los tubos Vacutainer® y Vacuette®.

Smearsafe es transparente, lo que le permite ver la gota de sangre cuando se dispensa.




1. Sostenga el tubo de muestra en posición vertical.

Coloque la cánula del dispositivo Smearsafe de forma tal que quede paralela al tubo de muestra. Inserte el dispositivo Smearsafe en el tabique del tubo de muestra hasta que la cánula ya no sea visible.


PRECAUCIÓN:

1. Use guantes al utilizar el Smearsafe.
2. Tenga cuidado al manipular el Smearsafe, ya que la cánula puede causar lesiones o rasgar los guantes si se maneja de manera inadecuada.
3. No inserte el Smearsafe cuando el tubo de muestra está hacia abajo.
4. Para tubos de muestra que han sido previamente abiertos y vueltos a tapar, asegúrese de que la tapa del tubo esté completamente asentada en el tubo para evitar que se dispense sangre en exceso en la superficie deseada.

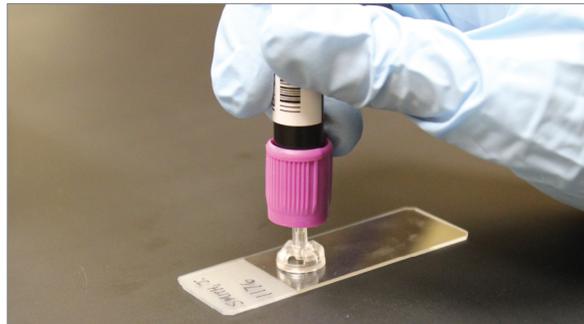

2. Invierta el tubo de muestra y coloque el Smearsafe en el medio de un portaobjetos de vidrio u otra superficie objetivo.

Presione suavemente el tubo hacia abajo hasta que se forme una gota de sangre en la punta del dispositivo Smearsafe.

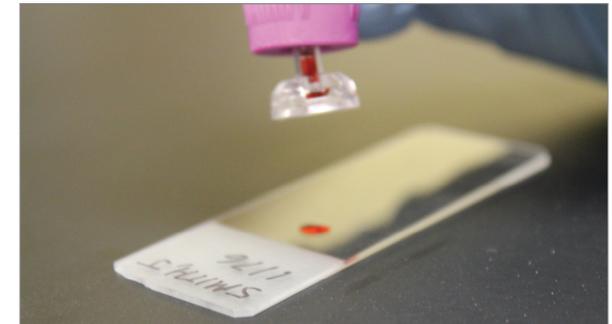

3. Una vez que la gota toca el portaobjetos de vidrio, libere la presión y levante el tubo del portaobjetos.

NOTA: El tamaño de la gota puede controlarse de acuerdo con la velocidad y presión aplicada al tubo.

Después de usar, deseche el dispositivo Smearsafe en un contenedor de desechos médicos filosos. Smearsafe puede desecharse mientras aún está en el tubo o retirarse del tubo y desecharse por separado. Si se desecha por separado, sostenga la tapa del tubo de muestra en su lugar mientras tira del Smearsafe hacia afuera.

Visite www.typhenex.com o contáctenos al 866.897.3639 para obtener más información.