

# Absorbent Floor Mat | Double-Sided

La versión con doble cara de la alfombrilla absorbente de Typenex Medical está diseñada para absorber líquidos en el piso de la sala de operaciones durante y después de las operaciones. El diseño modular permite que el facultativo médico personalice la alfombrilla en varias formas y tamaños para satisfacer las necesidades de uso específicos.



1. **SACAR** de la caja las bolsas que contienen las alfombrillas.

**COLOCAR** las bolsas de las alfombrillas en una ubicación de almacenamiento después de sacarlas de la caja.



2. **SACAR** la alfombrilla de la bolsa.  
**DESDOBLAR** la alfombrilla para prepararla para su utilización.




3. **PERSONALIZAR** el tamaño y forma de la alfombrilla, si se desea, sosteniéndola con firmeza y rasgando a lo largo de las perforaciones.



4. **COLOCAR** la alfombrilla en el área deseada con la etiqueta boca arriba antes del procedimiento.

**OPCIÓN:** Use las alfombrillas para absorber fluidos existentes una vez que ocurren.

**⚠ TENGA PRECAUCIÓN** al pararse o caminar sobre las alfombrillas.

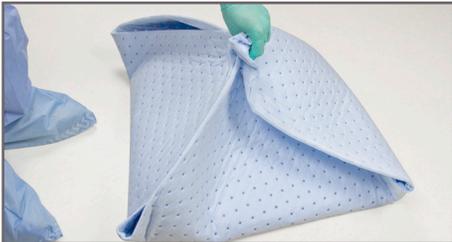

5. **TRATE** la alfombrilla sucia con cuidado, siguiendo el protocolo de equipo de protección personal (EPP) de las instalaciones.



6. **DESHACERSE** de la alfombrilla replegándola y colocándola en un recipiente de residuos apropiado según el protocolo del hospital.

**NOTA:** Lo mejor sería mover el recipiente apropiado de residuos cerca de la alfombrilla sucia al momento de deshacerse de esta.