

Å BRUKE PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL MED KATANA™ ZIRKONIUMBLOKKER

Retensjon av zirkonumbasert keramikk er avhengig av at overflaten rues opp med mekanisk bearbeiding og av kjemisk binding med adhesiv monomerer i resinsementen.

KATANA™ ZIRCONIA BLOCK

DEN INNOVATIVE MULTILAYER ZIRCONIABLOKKEN¹

SUPER TRANSLUCENT MULTI LAYERED ZIRCONIA FOR CEREC

KATANA™ Zirconia Block har overlegne mekaniske egenskaper og estetiske kvaliteter som etterligner naturlige tenner og sørger for at du får det beste fra begge verdener. Høy translucens, med høy bruddstyrke, resultatet er eksepsjonell estetikk og bedre mekaniske egenskaper enn glasskeramikk av litiumdisilikat.



FARGEGRADIENT

Den lagdelte KATANA Zirconiablokken består av fire sjikt med zirkonium i graderte nyanser. Produktet gjør det mulig å fremstille protetiske restaureringer i naturlige tannfarger på klinikken og man slipper den tidkrevende og vanskelige prosessen med innfarging av den protetiske restaureringen.



EFFEKTIV

Gir bedre mekaniske egenskaper enn glasskeramikk av litiumdisilikat

NATURLIG

Estetisk kvalitet som etterligner naturlige tenner gjennom forbedret translucens

RASK

Restaureringer som utføres i tannlegestolen i løpet av ett besøk. 15 min fresing^{4,5} + 18 min³ sintring

1. CL fargen er ikke en multisjikt-blokk
2. Hvis dette produktet brukes, følg disse retningslinjene: CEREC software 4.5.2 eller nyere er et krav. For 18 minutters sintring er kravet versjon 4.6.1 eller nyere. I USA er kravet 4.6 eller senere
3. For kasus med veggtykkelse mindre enn 6mm, må tørrfresing brukes
4. Tørrfresing anbefales. Hvis det brukes vannkjøling hvor vannet er kontaminert med silikabasert glasskeramikk (litium disilikat e.l.) kan translucensen av zirkonium bli redusert etter sintring. Før våtfresing utføres, må fresekammeret, vanntanken og filteret rengjøres. Kjølevannet må skiftes for å oppnå optimale resultater
5. For ett-ledds protetik

Datakilde Kuraray Noritake Dental Inc

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ SA Cement Universal passer til et bredt utvalg av indikasjoner for adhesjon, og kan brukes for kroner/broer, innlegg/onlays, stifter og til og med etsebroer. Takket være den kraftfulle bondingen i ett enkelt trinn, er sementering enklere enn noensinne.

- ✓ Egnet for protetiske restaureringer. Også for LiDiSi-sementering
- ✓ Enkel og skånsom fjerning av overskytende materiale
- ✓ Separate primere behøves ikke
- ✓ Oppbevares ved romtemperatur



ET GJENNOMBRUDD FRA OPPFINNERNE AV ADHESJON- OG SILANTEKNOLOGIEN



Den unike LCSi-monomeren skaper en sterk kjemisk binding til porselen, litiumdisilikat og komposittresin.




Den originale MDP- monomeren¹ skaper en sterk kjemisk binding til emalje, dentin, metallegeringer og Zirkonia.

PANAVIA™ SA Cement Universal er en innovasjon innen selvfestende resinsementer. Den inneholder den unike LCSi-monomeren som fester seg til praktisk talt alle materialer, inkludert glasskeramikk, uten behov for en separat primer. Ved bruk av det unike koblingsmiddelet LCSi-monomer som er integrert i pastaen, sørger sementen for en sterk, holdbar kjemisk binding til porselen, litiumdisilikat og komposittresin. Den originale MDP-monomeren finnes også i pastaen, og den muliggjør kjemisk reaksjon med Zirkonia, dentin og emalje.

EN ENKELT PROSEDYRE FOR ALLE ADHESIVE SEMENTERINGER

Eksempel single kroner

Uavhengig av kronematerialet trengs det ingen primer. En eneste prosedyre uansett kronemateriale.

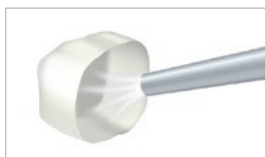

Forbehandling av kronen.*
*Rengjør og tørrlegg tannoverflaten. Prøv så den protetiske restaureringen og utfør den aktuelle forbehandling av kronen.



Apliser sementen i kronen.



Plasser kronen.



Lysherd i 2-5 sekunder eller la den selvherde i 2-4 minutter, og så fjernes sementoverskuddet.



Lysherd kroneavslutningene og hold tørt i 5 minutter.*

*For translusente restaureringer foretas en fullstendig lysherdning.

Before using the products, be sure to read the Instructions for Use supplied with the product. The specifications and appearance of the product are subject to change without notice. Printed color can be slightly different from actual color. "PANAVIA" and "CLEARFIL" are trademarks of Kuraray Co., Ltd. "KATANA" is a trademark of NORITAKE CO., LIMITED.