

233322

233323



MATÉRIEL



DOSAGE

Prêt à l'emploi

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection, des vêtements de protection.



PULVERISATION SUR UNE LINGETTE SECHE NON TISSEE

1



Porter des gants et pulvériser BACTI FOAM SURF sur une lingette sèche non tissée à usage unique.

2



Nettoyer minutieusement par essuyage mécanique la surface souillée avec la lingette imprégnée et en prenant soin de bien humidifier toute la surface à traiter.


3



Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

PULVERISATION DIRECTE SUR LA SURFACE

1

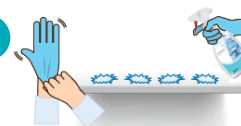

Porter des gants et pulvériser BACTI FOAM SURF directement sur une surface.

2



Nettoyer minutieusement par essuyage mécanique la surface souillée avec une lingette sèche non tissée à usage unique en prenant soin de bien humidifier toute la surface à traiter.

3



Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

4

Essuyer si besoin avec une lingette sèche non tissée. Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses.