

233328



233329



233330



MATÉRIEL



*

*233333 – Bacti Bac non autoclavable 10L
233334 – Bacti Bac autoclavable 15L

DOSAGE

Diluer le produit à 0,5%, soit 25 ml pour 5L d'eau.

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.



TRAITEMENT DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

PRÉPARATION DU BAIN A 0,5%

1



Utiliser les Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).

2



Préparer une solution de BACTI FIRST ENZYME à 0,5% dans un bac propre (une dose de 25 ml pour 5L d'eau).


PRÉ-DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

3




Immerger entièrement les instruments chirurgicaux souillés dans le bain de pré-désinfectant.

4

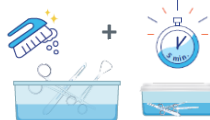

Frotter les instruments chirurgicaux (surtout les parties creuses). Couvrir le bac si possible. Laissez tremper 5 minutes.

5

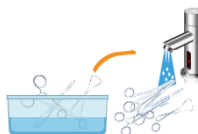

Sortir les instruments chirurgicaux du bac et les rincer abondamment à l'eau du réseau.

6

Passer à l'étape suivante selon le protocole interne de l'établissement.

233328



233329



233330



MATÉRIEL



*233333 – Bacti Bac non autoclavable 10L
233334 – Bacti Bac autoclavable 15L

DOSAGE

Diluer le produit à 1%, soit 50 ml pour 5L d'eau.

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.



TRAITEMENT DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX POUR UNE ACTIVITÉ TUBERCULOCIDE

PRÉPARATION DU BAIN A 1%

1



Utiliser les Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).


2



Préparer une solution de BACTI FIRST ENZYME à 1% dans un bac propre (une dose de 50 ml pour 5L d'eau).

PRÉ-DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

3

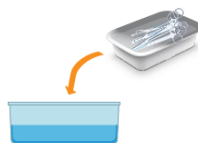

Immerger entièrement les instruments chirurgicaux souillés dans le bain de pré-désinfectant.

4



Frotter les instruments chirurgicaux (surtout les parties creuses). Couvrir le bac si possible. Laissez tremper 30 minutes.

5



Sortir les instruments chirurgicaux du bac et les rincer abondamment à l'eau du réseau.

6

Passer à l'étape suivante selon le protocole interne de l'établissement.

233328



233329



233330



MATÉRIEL



*

*233335 – Bacti Bac non autoclavable 40L

DOSAGE

Diluer le produit à 0,5%, soit 25 ml pour 5L d'eau.

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.



TRAITEMENT MANUEL DES ENDOSCOPES

PRÉPARATION DU BAIN A 0,5%

1



Utiliser les Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).

2



Préparer une solution de BACTI FIRST ENZYME à 0,5% dans un bac propre (une dose de 25 ml pour 5L d'eau).

1^{er} NETTOYAGE DES ENDOSCOPES

3



Après avoir réalisé un test d'étanchéité, immerger entièrement l'endoscope dans le bac de pré-désinfection. Ecouillonner et irriguer les canaux.

4



Après 10 minutes de contact, sortir l'endoscope du bac et rincer à l'eau du réseau. Irriguer tous les canaux.

2nd NETTOYAGE DES ENDOSCOPES

5



Préparer un second bain de BACTI FIRST ENZYME. Immerger l'endoscope et irriguer tous les canaux.

6



Après 5 minutes de contact, sortir l'endoscope du bac. Rincer à l'eau du réseau et purger les canaux.

DÉSINFECTION

7

Passer à l'étape de désinfection selon le protocole interne de l'établissement.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche technique du produit ou se référer à l'étiquette de l'emballage d'origine. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.