

233332



MATÉRIEL

DOSAGE

Prêt à l'emploi

PRÉCAUTIONS


Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.



i

Contrôler la stabilité du bain de BACTI FINAL avec une bandelette BACTI TEST au minimum tous les matins avant la première utilisation.

1

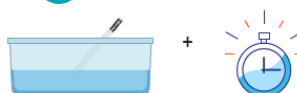


Plonger une bandelette BACTI TEST pendant 1 à 2 secondes dans le bain de BACTI FINAL. Et déclencher le chronomètre.

2



Sortir la bandelette. La secouer légèrement pour enlever l'excédent de la solution.

3

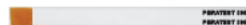

Noter le temps T au bout duquel la bandelette devient MARRON. Si $T \leq 45$ sec., alors le bain est ACTIF et peut être conservé. Si $T > 45$ sec., alors le bain est INACTIF et doit être changé.