

BACTI FOAM SURF

233322

233323

Mousse détergente désinfectante sans alcool prête à l'emploi pour le traitement des surfaces des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, non immergeables.

LES + PRODUITS

- + Solution à pH neutre
- + Sans phosphates, sans EDTA, sans colorant, sans parfum
- + Compatibilité avec un large panel de matériaux grâce à sa formulation sans chlorure
- + Efficace contre les virus enveloppés et vis-à-vis de Clostridioides difficile



MODE D'EMPLOI

Lors de la 1^{ère} utilisation : Porter des EPI adaptés et déverrouiller le pistolet.

Utilisation : 1- Pulvériser ou répartir uniformément BACTI FOAM SURF directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non tissée à usage unique. 2- Répartir la solution / mousse sur la surface avec la lingette. 3- Temps de contact : Selon l'activité antimicrobienne recherchée. 4- Ne pas rincer (ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires). 5- Jeter le support. 6- Renouveler l'opération si nécessaire.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricidie	EN 16615	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	2 min
	EN 13727		10 min
	EN 14561	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, E.coli	2 min
	EN 1276		5 min
	EN 13697		5 min
	EN 13727	Enterococcus faecium VRE	5 min
Levuricidie	EN 16615	Candida albicans	2 min
	EN 13624		5 min
	EN 1650		10 min
	EN 13697	Candida auris	5 min
	EN 14562		5 min
	EN 13624	Aspergillus brasiliensis	15 min
Fongicidie	EN 13624		15 min
	EN 13697		
	EN 1650		

BACTI FOAM SURF

233322

233323

*L'essai portant sur l'activité virucide contre virus enveloppés (Virus de la Vaccine) est représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, tels que : Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Herpesviridae (Herpès virus), Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole,...

**L'essai portant sur l'activité virucide à spectre limité est représentatif des virus enveloppés (Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111) et les norovirus, rotavirus et adenovirus.

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Virucide contre virus enveloppés*	EN 14476	Vaccinia Virus	2 min
Virucidie à spectre limité**		Norovirus, Adénovirus	15 min
Actif sur Rotavirus		Rotavirus	5 min
Tuberculocidie	EN 14348	Mycobacterium Terrae	30 min
Sporicidie vis-à-vis de Clostridioides difficile	EN 13704	Clostridioides difficile	15 min
	EN 17126		30 min
	EN 17846		30 min

REGLEMENTATION

Dispositif Médical de classe IIb.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide
pH	6
DENSITÉ	= 1
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Stocker entre 5°C et 35°C
DLU	24 mois

BACTI FOAM SURF

233322

233323

PRECAUTIONS
D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233322	Colis de 12 flacons de 750 ml	50 colis par palette
233323	Colis de 2 bidons de 5L	96 colis par palette