

BACTI FIRST

233325

233326

233327

Détergent désinfectant neutre pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux. Compatible avec un large panel de matériaux, il s'utilise en bloc, endoscopie, ophtalmologie et contactologie.

LES + PRODUITS

- + Efficacité prouvée sur biofilm de *Pseudomonas aeruginosa*
- + Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage
- + Compatible avec un large panel de matériaux
- + Utilisation en bac à ultrasons



MODE D'EMPLOI

Préparation du bain : Porter des Equipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité). Diluer le volume requis de BACTI FIRST pour 5 litres d'eau du réseau et homogénéiser la solution (voir tableau de dilution).

Utilisation : 1- Immerger entièrement les dispositifs médicaux souillés dans le bain. 2- Brosser les dispositifs médicaux et les écouvillonner si nécessaire. 3- Temps de contact : selon l'activité antimicrobienne recherchée (voir propriétés désinfectantes). 4- Rincer abondamment.

Renouveler le bain pour chaque utilisation (ou suivre les recommandations locales en vigueur). Selon l'Instruction française DGS du 1^{er} décembre 2011 (hors endoscopie et ATNC), le bain doit être renouvelé au moins toutes les 24 heures et chaque fois qu'il est macroscopiquement souillé.

Concentration de la solution

	0,5%	2%	5%
Dosage pour 5L	25 ml	100 ml	250 ml

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

*L'essai portant sur l'activité virucide contre virus enveloppés (Virus de la Vaccine) est représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, tels que : Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Herpesviridae (Herpès virus), Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole...

Activités	Normes	Souches	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	0,5%	5 min
	EN 14561			15 min
	EN 13697	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia Coli	0,5%	5 min
	EN 1276		0,25%	5 min
	EN 13727	Enterococcus faecium VRE	0,5%	5 min

BACTI FIRST

233325

233326

233327

*L'essai portant sur l'activité virucide contre virus enveloppés (Virus de la Vaccine) est représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, tels que : Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Herpesviridae (Herpès virus), Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole...

Activités	Normes	Souches	Concentration	Temps de contact
Levuricidie	EN 13624	Candida albicans	0,5%	5 min
	EN 14562		0,5%	15 min
	EN 1650		0,25%	5 min
	EN 13697		0,5%	5 min
	EN 13624	Candida auris	0,5%	5 min
Virucidie contre virus enveloppés*	EN 14476 EN 17111	Vaccinia virus	0,5%	15 min
Actif sur PRV, Herpès virus	EN 14476	Virus PRV (virus modèle de l'Hépatite B), Herpès virus	0,5%	5 min
Actif sur HIV, DBV	EN 14476	Virus DBV (virus modèle de l'Hépatite C), HIV	0,5%	15 min
Tuberculocidie	EN 14348	Mycobacterium terrae	2%	60 min
			5%	15 min
	EN 14563	Mycobacterium terrae	2%	60 min
			5%	15 min

REGLEMENTATION

Dispositif Médical de classe IIb.


0459

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide
pH	7,2
DENSITÉ	>1
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Conserver le récipient bien fermé. Stocker entre 5°C et 35°C
DLU	24 mois

BACTI FIRST

233325

233326

233327

PRECAUTIONS
D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233325	Colis de 250 doses de 25 ml	63 colis par palette
233326	Colis de 12 flacons de 1L	42 colis par palette
233327	Colis de 2 bidons de 5L	96 colis par palette