

BACTI FIRST ENZYME

233328

233329

233330

Détergent désinfectant enzymatique pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux. Son complexe tri-enzymatique combiné à des tensioactifs performants assure un nettoyage haute performance.

LES + PRODUITS

- + Complexe tri-enzymatique (lipase, amylase et protéase) combiné à des tensioactifs performants
- + Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage
- + Bactericide, levuricide et virucide contre virus enveloppés en 5 minutes
- + Efficacité prouvée sur biofilm *Pseudomonas aeruginosa*



MODE D'EMPLOI

Préparation du bain : Porter des Equipements de Protection Individuelle appropriés. Diluer le volume requis de BACTI FIRST ENZYME pour 5 litres d'eau du réseau et homogénéiser la solution (voir tableau de dilution).

Concentration de la solution

	0,5%	1%
Dosage pour 5L	25 ml	50 ml

Utilisation : 1- Immerger entièrement les dispositifs médicaux souillés dans le bain. 2- Brosser les dispositifs médicaux et les écouvillonner si nécessaire. 3- Temps de contact : selon l'activité antimicrobienne recherchée (voir propriétés désinfectantes). 4- Rincer abondamment.

Renouveler le bain pour chaque utilisation (ou suivre les recommandations locales en vigueur). Selon l'Instruction française DGS du 1^{er} décembre 2011 (hors endoscopie et ATNC), le bain doit être renouvelé au moins toutes les 24 heures et chaque fois qu'il est macroscopiquement souillé.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

*L'essai portant sur l'activité virucide contre virus enveloppés (Virus de la Vaccine) est représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, tels que : Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Herpesviridae (Herpès virus), Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole...

Activités	Normes	Souches	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	0,5%	5 min
	EN 14561		0,5%	5 min

BACTI FIRST ENZYME

233328

233329

233330

*L'essai portant sur l'activité virucide contre virus enveloppés (Virus de la Vaccine) est représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, tels que : Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Herpesviridae (Herpès virus), Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole...

Activités	Normes	Souches	Concentration	Temps de contact
Levuricidie	EN 13624	Candida albicans	0,5%	5 min
	EN 14562		0,5%	5 min
Virucidie contre virus enveloppés*	EN 14476	Vaccinia virus	0,5%	5 min
	EN 17111			
Tuberculocidie	EN 14348	Mycobacterium terrae	1%	30 min
	EN 14563			

REGLEMENTATION

Dispositif Médical de classe IIb.



0459

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide
pH	8,30
DENSITÉ	>1
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Stocker entre 5°C et 35°C
DLU	24 mois

BACTI FIRST ENZYME

233328

233329

233330

PRECAUTIONS
D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233328	Colis de 250 doses de 25 ml	63 colis par palette
233329	Colis de 12 flacons de 1L	42 colis par palette
233330	Colis de 2 bidons de 5L	96 colis par palette