

BACTI FINAL

233331

**MADE IN
FRANCE**

Désinfectant prêt à l'emploi à base d'acide peracétique. Idéal pour la désinfection de haut niveau de l'instrumentation médico-chirurgicale, du matériel d'endoscopie et des dispositifs médicaux thermosensibles.



LES + PRODUITS

- + Prêt à l'emploi (sans activateur)
- + Désinfection de haut niveau en 10 minutes
- + Compatibilité avec les matériaux constituant les paillasse de désinfection d'endoscopes et en particulier le corian
- + Formulé sans aldéhydes : pas de fixation de protéines

MODE D'EMPLOI

Préparation du bain : Porter des gants à manchettes longues réutilisables, des lunettes, un tablier et un masque. Verser la quantité nécessaire de la solution prêt à l'emploi dans un bac de façon à immerger entièrement le matériel à désinfecter.

Utilisation : 1- Immerger les dispositifs médicaux dans la solution en respectant le temps de contact indiqué (pour les endoscopes faire circuler la solution dans les canaux). 2- Immerger les dispositifs médicaux dans un bain de rinçage avec une eau microbiologiquement maîtrisée (ou stérile en fonction des recommandations locales en vigueur). 3- Pour les endoscopes, faire circuler la solution de rinçage dans les canaux pendant 5 minutes minimum. 4- Essuyer avec un champ à usage unique et/ou sécher à l'air médical.

Renouveler le bain tous les 14 jours maximum. Vérifier la stabilité du bain tous les matins avant la première utilisation puis toutes les 4 heures avec une bandelette de contrôle adaptée au taux d'acide peracétique (BACTI TEST). En France (selon la réglementation française en vigueur) renouveler le bain tous les 7 jours maximum. Vérifier la stabilité du bain au minimum tous les matins avant la première utilisation avec une bandelette de contrôle adaptée au taux d'acide peracétique (BACTI TEST).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	5 min
	EN 14561		
Fongicidie	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 14562		
Virucidie	EN 14476	Norovirus, Adénovirus, Poliovirus	5 min
	EN 17111	Norovirus, Adénovirus	

BACTI FINAL

233331

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Mycobactéricidie	EN 14348	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	10 min
	EN 14563		
Sporicidie vis-à-vis de Clostridium difficile	EN 17126	Clostridium difficile	5 min
Sporicidie	EN 17126	Bacillus subtilis, Bacillus cereus	10 min

REGLEMENTATION

Dispositif Médical de classe IIb.



0459

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide
pH pur	2,5
DENSITÉ	>1
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Stocker en position verticale. Conserver entre 5°C et 25°C
DLU	12 mois

BACTI FINAL

233331

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233331	Colis de 4 bidons de 5L	40 colis par palette