

BACTI TEST

233332

Bandelettes de contrôle des bains de désinfection du BACTI FINAL. Permet la détection quantitative de l'acide peracétique. S'utilise au bloc et en endoscopie.

LES + PRODUITS

- + Détection quantitative de l'acide peracétique du BACTI FINAL pour validation du bain
- + Utilisation rapide
- + Interprétation aisée des résultats du test, à l'aide d'un code couleur et d'un chronomètre



MODE D'EMPLOI

Utilisation : 1- Immerger les dispositifs médicaux dans la solution. Plonger la bandelette BACTI TEST pendant 1 à 2 secondes dans le bain de BACTI FINAL tenu à 20°C +/- 5°C. 2- Déclencher le chronomètre. 3- Sortir la bandelette, la secouer légèrement pour enlever l'excédent de solution et laisser agir. 4- Noter le temps « T » au bout duquel la coloration MARRON apparaît uniformément sur la zone de test :

Si $T \leq 45$ sec., alors le bain est actif et peut être conservé.

Si $T > 45$ sec., alors le bain est inactif et doit être changé.

Fréquence d'utilisation : Vérifier la stabilité du bain de BACTI FINAL avec une bandelette BACTI TEST au moins une fois par jour, le matin avant la première utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Bandelettes papier
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Stocker entre 5°C et 35°C
DLU	24 mois

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
233332	Colis 72 tubes de 100 bandelettes	15 colis par palette