

AVANTAGES



SÉCURITÉ et PERFORMANCE

- Tous nos mini-collecteurs de déchets à risque infectieux possèdent un niveau d'homologation élevé, Européen et Français, et sont conformes à la norme NF X 30-511
- Système anti-reflux breveté empêchant le déversement des liquides.
- Deux positions de fermeture : provisoire et définitive avec contrôle visuel. Lorsque la languette de fermeture est rentrée dans son logement, le collecteur est définitivement fermé.
- Embases larges pour une meilleure stabilité

PRATICITÉ

- Encoches de désolidarisation permettant de séparer aisément chaque déchet de son appareil.
- Poignet ergonomique présente sur le flanc du collecteur favorisant la prise en main sans gêner son ouverture
- Collecteurs compacts et empilables.
- Manipulation du collecteur à une main grâce à son ergonomie optimale.

FLEXIBILITÉ

- Large choix de supports permettant de s'adapter à chaque utilisation.



Réf. 674575 - Colis de 70

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme Essentia est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier (DASRI)

Utilisable pour tous types de déchets piquants, coupants ou tranchants (PCT) liés à l'administration des soins.

CARACTERISTIQUES

Composition : Polypropylène

Couleur : Jaune et blanc

Dimensions : 117 x 73 x 125 mm

Capacité nominale : 0,6 L

Capacité utile : 0,51 L

Poids : 91 g

Stérilisation : autoclave à 134°C pendant 18 minutes

CERTIFICATIONS ET NORMALISATION



DEVELOPPEMENT DURABLE



Favorisant les produits et savoir-faire locaux, tous nos mini-collecteurs sont fabriqués en France, près de Grenoble (38)

Collecteurs pour déchets DASRI

Mini-collecteurs Essentia

0,6 L - POLYPROPYLENE

674575

MODE D'EMPLOI



MONTAGE

Clipper le couvercle sur la cuve avec la charnière du côté de la poignée.



FERMETURE PROVISoire

Appuyer sur le dessus de la trappe (côté languette), languette de préhension à l'extérieur : 3 'crans' de coincement.




FERMETURE DÉFINITIVE

1. Plier la languette vers le bas
2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement
3. Puis presser fortement sur la trappe côté languette, le « clic » assure la fermeture définitive

ZOOM PRODUIT

Opercule pour gros embouts vissés type stylos à insuline

Opercule pour embouts seringues vissés

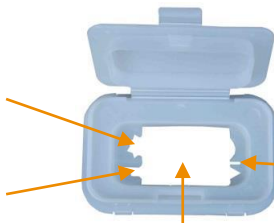

Opercule pour embouts seringues éjectables

Grande ouverture pour déchets larges

PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
					
Collecteurs DASRI 	✓	✗	✗	✗	de 0,25 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
Sacs et cartons DASRI 	✗	✓	✗	✗	de 15 L à 110 L
Jericanes DASRI 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
Caisses anatomiques 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants