

BROCHIER TEXTILES SANTE

FICHE TECHNIQUE

MASQUE BARRIERE

02/06/2020

Nous proposons suite à la crise sanitaire rencontrée actuellement avec le Covid-19 et à la pénurie de masques associée, un masque barrière en tissu type AFNOR. Ce masque ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR,...). Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Le masque fourni a fait l'objet d'une homologation par la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour un **usage de catégorie 1** (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public) et **catégorie 2** (masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques).

Rapport d'essai DGA RP/20-3227/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 : Efficacité de protection aux aérosols : 93% ; perméabilité à l'air : 320 L/m².s⁻¹.

Vous trouverez ci-dessous les conditions d'entretien de ce masque barrière.

- Reference article : 9031 Composition : 65% coton 34% polyester 1% élasthanne

- Masque constitué de 3 couches :

- 2 couches coton + 1 couche polyester molletonnée gonflant
- Fil de couture : 100% Polyester

- Poids du masque : 12 g

- Code d'entretien :



- Conditions d'utilisation :

- Avant la première utilisation, laver le masque à 60°C cycle délicat (30 minutes minimum) avec une lessive classique. L'usage d'un filet à linge est fortement recommandé. Le séchage doit être réalisé dans les 2 heures après le lavage.
- Après chaque utilisation, laver le masque à 60°C cycle délicat (30 minutes minimum) avec une lessive classique. L'usage d'un filet à linge est fortement recommandé. Le séchage doit être réalisé dans les 2 heures après le lavage.
- Limite d'utilisation : inférieure à 4 heures sur une seule journée
- Nombre de lavage garantie jusqu'à 20 lavages.



- **Instructions d'ajustement**

Avant d'ajuster le masque, veuillez à vous laver les mains.



- **Avertissements et limites d'utilisation**

- Assurez-vous toujours que son application est complète :
 - convient à l'application pour laquelle il est utilisé ;
 - est correctement ajusté ;
 - est porté pendant toutes les périodes d'exposition ;
 - est remplacé dès que nécessaire.
- Si l'utilisateur ne suit pas toutes les instructions relatives au masque barrière et/ou s'il ne porte pas correctement le produit complet pendant toutes les périodes d'exposition, il s'expose à des risques sanitaires susceptibles d'entraîner des maladies graves ou mortelles, ou un handicap permanent.
- Le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection des produits chimiques
- N'utilisez pas ce produit si vous portez une barbe ou toute autre pilosité faciale susceptible d'empêcher un contact parfait entre le visage et le bord du masque
- Jetez et remplacez le masque s'il est endommagé
- N'altérez, ne modifiez et ne réparez jamais ce produit.

Ce masque est tissé et confectionné en France.

**** Les conditions d'hygiène de base à savoir se laver les mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique avant chaque manipulation du masque restent évidemment essentielles pour une protection optimale face au Covid-19.***