

# CARTON HOSPITALIER

25 L Haut – Lien cranté

830532 – Paquet de 10 cartons

## AVANTAGES

### PRACTICITÉ

- Caisse à fond automatique - montage facile et rapide
- Encoches facilitant le pliage intuitif du carton
- Dessin de montage présent sur le carton et représentation des conseils d'utilisation
- Nouveau design épuré facilitant la lecture d'information et l'identification des cartons

### SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

- Nouveau système de fermeture plus intuitif et sécurisant par rabats crantés colorés (témoin de fermeture)
- Fermeture par double poignées pour une grande facilité de manipulation et plus de sécurité
- Nouveau design général et bords renforcés pour un stockage optimisé des cartons et un empilage en toute sécurité **1**
- Carton DASRI conforme à la nouvelle version de la norme NFX30-507 de Juillet 2018 et issu de sources responsables



Réf. 830532 – Jaune et blanc – paquet de 10



## CARACTÉRISTIQUES

Matières : carton de 410 g/m<sup>2</sup> + sac PEMD 55 µm  
Capacité nominale : 25 L  
Capacité réelle : 26,23 L  
Capacité utile : 23,70 L  
Hauteur limite de remplissage : 436 mm  
Poids : 380 g  
Résistance en charge : 7 kg  
Dimensions : 240x240x481 mm  
Épaisseur de sac intérieur : 55 µm

## DOMAINE D'APPLICATION

La gamme DASRI est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier.

Utilisable pour tous types de déchets mous liés à l'administration des soins.

## CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATION



BVT 342357

## CONDITIONNEMENT

- Paquet de 10 cartons

### CONSEIL D'UTILISATION


#### MONTAGE DU CARTON

OUVRIR LÉGEREMENT LA BOÎTE EN INTRODUISANT L'AVANT-BRAS À L'INTÉRIEUR DU SAC

EXERCER UNE PRESSION SUR LES DEUX CÔTÉS DU CARTON POUR LA MISE EN PLACE AUTOMATIQUE DU FOND

RABATTRE LES 4 PARTIES SUPÉRIEURES DU CARTON PUIS RETOURNER LE SAC PLASTIQUE DE FAÇON À HABILLER ET PROTÉGER LE CARTON

**FERMETURE PROVISOIRE**

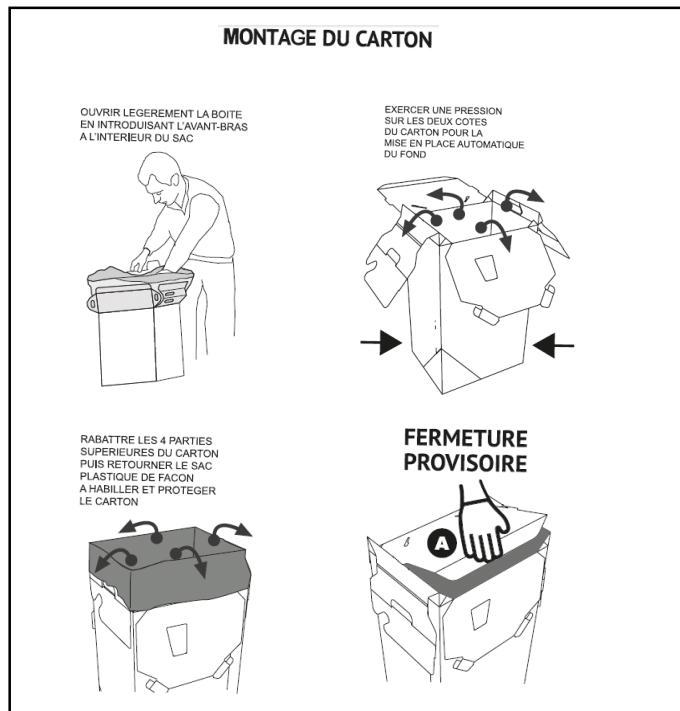

#### FERMETURE DU CARTON

FERMER LE SAC PLASTIQUE À L'AIDE DU LIEN CRANTÉ

**FERMETURE DÉFINITIVE**

1 REPLIER LA PARTIE "A" VERS L'INTÉRIEUR


2 REPLIER LES 2 PARTIES LATÉRALES "B" VERS L'INTÉRIEUR COMME INDIQUE SUR LE DESSIN

3





4

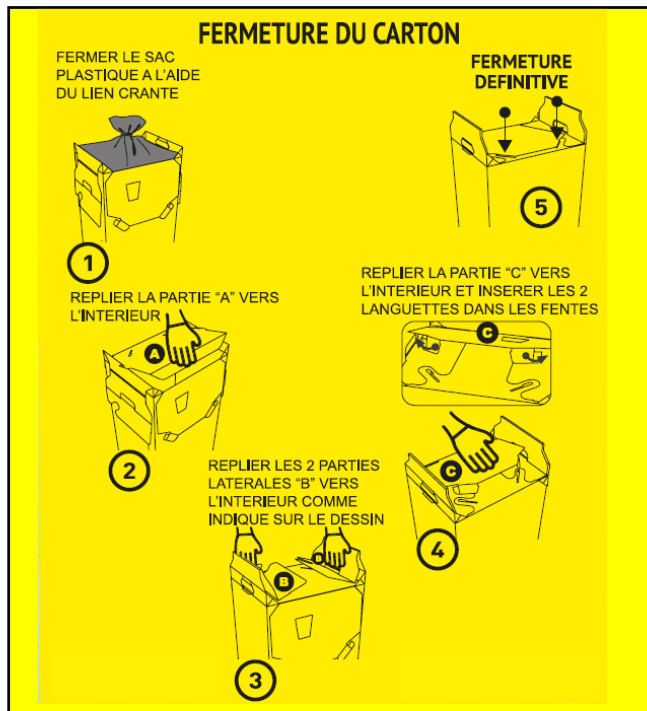5

REPLIER LA PARTIE "C" VERS L'INTÉRIEUR ET INSÉRER LES 2 LANGUETTES DANS LES FENTES



### PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
<b>Collecteurs DASRI</b> 	✓	✗	✗	✗	de 0,6 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
<b>Sacs et cartons DASRI</b> 	✗	✓	✗	✗	de 12 L à 110 L
<b>Jericanes DASRI</b> 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
<b>Caisse anatomiques</b> 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

\* Piquants, Coupants, Tranchants