

# CARTON HOSPITALIER

50 L Haut – Lien cranté

830534 – Paquet de 10 cartons

## AVANTAGES

### PRACTICITÉ


- Caisse à fond automatique - montage facile et rapide
- Encoches facilitant le pliage intuitif du carton
- Dessin de montage présent sur le carton et représentation des conseils d'utilisation
- Nouveau design épuré facilitant la lecture d'information et l'identification des cartons

### SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

- Nouveau système de fermeture plus intuitif et sécurisant par rabats crantés colorés (témoin de fermeture)
- Fermeture par double poignées pour une grande facilité de manipulation et plus de sécurité
- Nouveau design général et bords renforcés pour un stockage optimisé des cartons et un empilage en toute sécurité **1**
- Carton DASRI conforme à la nouvelle version de la norme NFX30-507 de Juillet 2018 et issu de sources responsables



Réf. 830534 – Jaune et blanc – paquet de 10

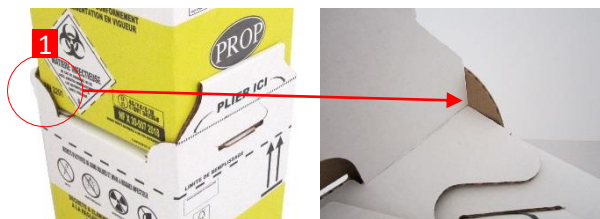

## CARACTÉRISTIQUES

Matières : carton de 410 g/m<sup>2</sup> + sac PEEMD 55 µm  
Capacité nominale : 50 L  
Capacité réelle : 51,20 L  
Capacité utile : 47,60 L  
Hauteur limite de remplissage : 605 mm  
Poids : 575 g  
Résistance en charge : 13,5 kg  
Dimensions : 290x290x650 mm  
Épaisseur de sac intérieur : 55 µm

## CONDITIONNEMENT

- Paquet de 10 cartons

## DOMAINE D'APPLICATION

La gamme DASRI est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier.

Utilisable pour tous types de déchets mous liés à l'administration des soins.

## CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATION



BVT 342356

### CONSEIL D'UTILISATION


#### MONTAGE DU CARTON

OUVRIR LÉGEREMENT LA BOÎTE EN INTRODUISANT L'AVANT-BRAS À L'INTÉRIEUR DU SAC

EXERCER UNE PRESSION SUR LES DEUX CÔTÉS DU CARTON POUR LA MISE EN PLACE AUTOMATIQUE DU FOND

RABATTRE LES 4 PARTIES SUPÉRIEURES DU CARTON PUIS RETOURNER LE SAC PLASTIQUE DE FAÇON À HABILLER ET PROTÉGER LE CARTON

**FERMETURE PROVISOIRE**

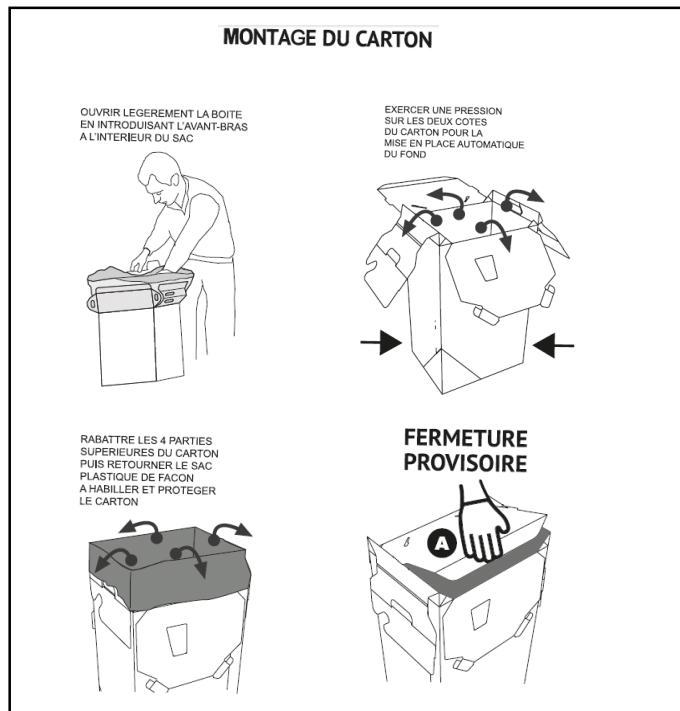

#### FERMETURE DU CARTON

FERMER LE SAC PLASTIQUE À L'AIDE DU LIEN CRANTÉ

**FERMETURE DÉFINITIVE**

1 REPLIER LA PARTIE "A" VERS L'INTÉRIEUR


2 REPLIER LES 2 PARTIES LATÉRALES "B" VERS L'INTÉRIEUR COMME INDIQUE SUR LE DESSIN

3





4

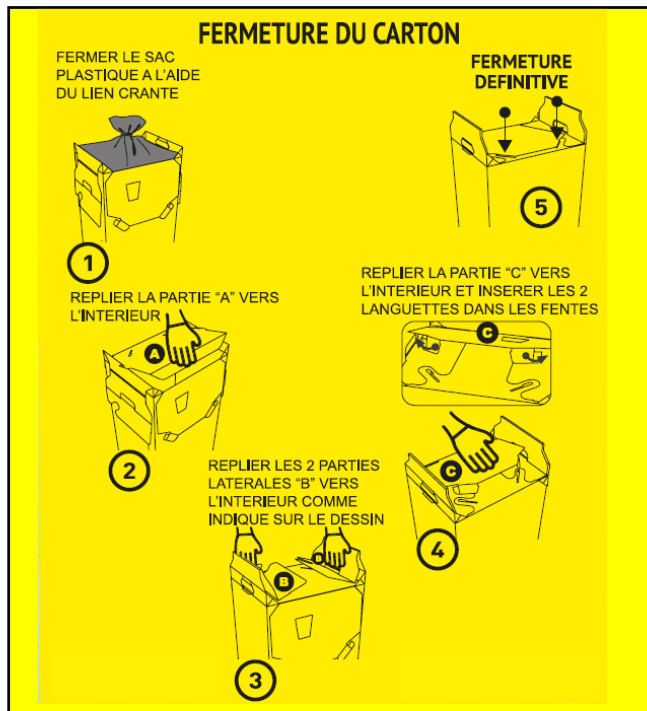5

REPLIER LA PARTIE "C" VERS L'INTÉRIEUR ET INSÉRER LES 2 LANGUETTES DANS LES FENTES



### PRODUITS DE LA GAMME DASRI

|   | DECHETS PCT * | DECHETS MOUS | DECHETS LIQUIDES | PIECES ANATOMIQUES | LITRAGES                                 |
|---|---------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| <b>Collecteurs DASRI</b><br>     | ✓             | ✗            | ✗                | ✗                  | de 0,6 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts) |
| <b>Sacs et cartons DASRI</b><br> | ✗             | ✓            | ✗                | ✗                  | de 12 L à 110 L                          |
| <b>Jericanes DASRI</b><br>       | ✗             | ✗            | ✓                | ✗                  | de 10 L à 20 L                           |
| <b>Caisses anatomiques</b><br>   | ✗             | ✗            | ✗                | ✓                  | de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)         |

\* Piquants, Coupants, Tranchants