



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Lave-œil pour l'élimination rapide de corps étrangers

Cette lave-œil est un chlorure de sodium stérile à 0,9 % solution qui soulage l'inconfort et prévient suite à des complications causées par des corps étrangers dans les yeux

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Élimine efficacement la poussière et la saleté dans les yeux
- Facile à manipuler - facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide
- Solutions flexibles - flacons pour une utilisation mobile et stations pour montage mural
- Diverses applications - des postes de travail industriels aux laboratoires, en passant par les trousse de premiers soins
- Haute fiabilité fonctionnelle - flacons conformes à la norme EN 15154-4
- Marquage CE selon les directives de classification du MDD 93/42/CEE
- Durée de conservation de 3,5 ans



Les produits portent le marquage CE conformément aux règles de classification de la Directive relative aux dispositifs médicaux (MDD 93/42/CEE).

info@plum.eu
+45 6916 9600

Combinez Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate pour les lieux de travail présentant un risque d'accidents chimiques

Connaître vos produits chimiques et assurer les premiers secours les mieux adaptés

La cause d'un accident détermine quel lave-œil est nécessaire. Lorsqu'un accident se produit, il est essentiel de déterminer s'il est causé soit par un corps étranger, soit par des acides ou des alcalins - et si possible, quelle est la valeur pH de la substance en question.

Lorsque le pH est soit fortement acide soit alcalin, commencez à rincer et neutraliser avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate jusqu'à ce que le flacon soit vide. Jetez le flacon et continuer le rinçage avec Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à consultation d'un médecin.

Lorsque le pH est neutre, rincez avec Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à ce que le flacon soit vide et jetez le après utilisation.



4921 - Plum iBox 2 avec
200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
et 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

ŒILLERES ERGONOMIQUES

Les flacons sont équipés de différents types d'œillères ergonomiques pour garantir la correcte application de la solution dans un débit uniforme. Pressez doucement le flacon pour générer un flux de liquide fin et régulier.

ŒILLERE



Œillère flexible et ergonomique qui maintient la paupière ouverte pendant l'utilisation

ŒILLERE DUO



Œillère flexible et ergonomique qui permet de rincer les deux yeux en même temps

TAILLES DISPONIBLES

| Réf. | 4691 | 4604 | 4707 | 4861 | 4800 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Contenu | 200 ml | 500 ml | 1000 ml | 500 ml | 1000 ml |
| Conditionnement | 10 x 200 ml | 12 x 500 ml | 6 x 1000 ml | 6 x 500 ml | 6 x 1000 ml |

info@plum.eu
+45 6916 9600

