

AVANTAGES

SÉCURITÉ et PERFORMANCE

- Tous nos collecteurs de déchets à risque infectieux possèdent un niveau d'homologation élevé, Européen et Français, et sont conformes à la norme NF X 30-511
- Système anti-reflux breveté empêchant le déversement des liquides.
- Deux positions de fermeture : provisoire et définitive avec contrôle visuel. Lorsque la languette de fermeture est rentrée dans son logement, le collecteur est définitivement fermé.
- Embases larges pour une meilleure stabilité

PRATICITÉ

- Encoches de désolidarisation permettant de séparer aisément chaque déchet de son appareil.
- Poignet ergonomique présente sur le flanc du collecteur favorisant la prise en main sans gêner son ouverture
- Collecteurs compacts et empilables.
- Manipulation du collecteur à une main grâce à son ergonomie optimale.

FLEXIBILITÉ

- Large choix de supports permettant de s'adapter à chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Composition : Polypropylène

Couleur : Jaune et blanc

Dimensions : 189 x 133 x 700 mm

Capacité nominale : 13 L

Capacité utile : 10 L

Poids : 911 g

Stérilisation : autoclave à 134°C pendant 18 minutes



PAROLAI
STIL'ECO

Réf. 675130 – Colis de 12

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme Essentia est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier (DASRI)

Utilisable pour tous types de déchets piquants, coupants ou tranchants (PCT) liés à l'administration des soins.

CERTIFICATIONS ET NORMALISATION



DEVELOPPEMENT DURABLE



Favorisant les produits et savoir-faire locaux, tous nos mini-collecteurs sont fabriqués en France, près de Grenoble (38)

MODE D'EMPLOI



MONTAGE

1. Assembler la cuve et son(s) extension(s) à l'envers pour plus de facilité.
2. Retourner ensuite l'ensemble
3. Ajouter ensuite le couvercle en exerçant une pression sur les coins



FERMETURE PROVISoire

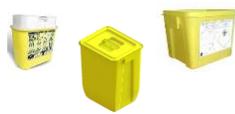
1. Appuyer sur le dessus de la trappe (côté languette), languette de préhension à l'extérieur.
2. Actionner la languette vers le bas pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)



FERMETURE DÉFINITIVE

1. Plier la languette
2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement
3. Puis presser fortement sur la trappe côté languette, le « clic » assure la fermeture définitive

PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
Collecteurs DASRI 	✓	✗	✗	✗	de 0,25 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
Sacs et cartons DASRI 	✗	✓	✗	✗	de 15 L à 110 L
Jericanes DASRI 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
Caisnes anatomiques 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants