

AVANTAGES

SÉCURITÉ et PERFORMANCE

- Tous nos collecteurs de déchets à risque infectieux possèdent un niveau d'homologation élevé, Européen et Français, et sont conformes à la norme NF X 30-511
- Système anti-reflux breveté empêchant le déversement des liquides.
- Deux positions de fermeture : provisoire et définitive avec contrôle visuel. Lorsque la languette de fermeture est rentrée dans son logement, le collecteur est définitivement fermé.
- Embases larges pour une meilleure stabilité

PRATICITÉ

- Encoches de désolidarisation permettant de séparer aisément chaque déchet de son appareil.
- Poignet ergonomique présente sur le flanc du collecteur favorisant la prise en main sans gêner son ouverture
- Collecteurs compacts et empilables.
- Manipulation du collecteur à une main grâce à son ergonomie optimale.

FLEXIBILITÉ

- Large choix de supports permettant de s'adapter à chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Composition : Polypropylène

Couleur : Jaune et blanc

Dimensions : 190 x 129 x 278 mm

Capacité nominale : 4,5 L

Capacité utile : 3,45 L

Poids : 343 g

Stérilisation : autoclave à 134°C pendant 18 minutes

PAROLAI
STIL'ECO



Réf. 674946 – Colis de 42

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme Essentia est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier (DASRI)

Utilisable pour tous types de déchets piquants, coupants ou tranchants (PCT) liés à l'administration des soins.

CERTIFICATIONS ET NORMALISATION



NF X 30-511
ISO 23907



CONFORMITE
ADR



DEVELOPPEMENT DURABLE



Favorisant les produits et savoir-faire locaux, tous nos mini-collecteurs sont fabriqués en France, près de Grenoble (38)

MODE D'EMPLOI



MONTAGE

Clipper le couvercle sur la cuve en exerçant une pression sur les 4 coins du couvercle



FERMETURE PROVISOIRE

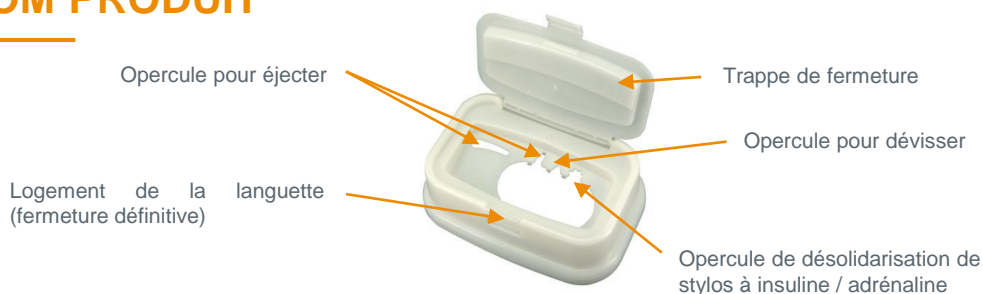
Appuyer sur le dessus de la trappe (côté languette), languette de préhension à l'extérieur : 3 'crans' de coincement.







FERMETURE DÉFINITIVE

1. Plier la languette vers le bas
2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement
3. Puis presser fortement sur la trappe côté languette, le « clic » assure la fermeture définitive

ZOOM PRODUIT



PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
 <p>Collecteurs DASRI</p>	✓	✗	✗	✗	de 0,25 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
 <p>Sacs et cartons DASRI</p>	✗	✓	✗	✗	de 15 L à 110 L
 <p>Jericanes DASRI</p>	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
 <p>Caisses anatomiques</p>	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants