

# Medi-Prop SR

Désinfectant bactéricide, fongicide, virucide  
**SANS RINÇAGE**

256025 / 256026

## AVANTAGES

- **EFFICACITÉ D'ACTION** : MEDI-PROP SR est un Spray désinfectant destiné à la désinfection « **SANS RINÇAGE** » des surfaces et matériels. Il est efficace en condition de propreté et de saleté, et dispose d'un large spectre d'action actif sur *Aspergillus Niger*, *Norovirus*, *Tuberculosis*.
- **PRACTICITÉ** : Ce produit est prêt à l'emploi, après utilisation il est actif dès 30 secondes. De plus, son séchage est rapide et sans traces.
- **POLYVALENT** : pour tout type de surfaces (sauf plexiglas).
- Efficacité prouvée en laboratoire **COFRAC**.

## COMPOSITION

Alcool éthylique CAS n° 64-17-5 (66,01% m/m).

## CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore  
Odeur : alcoolisée  
pH (pur) : 7,5 – 8,5  
Densité : ~ 0,87

## PROPRIÉTÉS BIOCIDES

\*Norme réalisée en conditions de propreté - \*\*Norme réalisée en conditions de saleté

Actif sur	Normes	Temps de contact
<b>Bactéricidie</b>	• EN 1040	30 s
	• EN 1276* + sur Listeria, Salmonelle et EN 1276**	30 s
	• EN 13697* et EN 13697**	2 min
	• EN 13697* Actif sur Listeria et Salmonelle	2 min
	• EN 13727+A2* et EN 13727+A2**	30 s
<b>Mycobactéricidie</b>	• EN 14348* et EN 14348** sur M.avium et M.terrae	30 s
	• EN 14348* sur M.avium et M.terrae	30 s
<b>Levuricidie/fongicide</b>	• EN 1275 sur Candida albicans et Aspergillus niger	30 s - 1 min
	• EN 1650+A1* et EN 1650+A1** sur Candida albicans	30 s
	• EN 1650+A1* sur Aspergillus brasiliensis	1 min
	• EN 13697* et EN 13697** sur Candida albicans et Aspergillus brasiliensis	5 min
	• EN 13624* et EN 13624** sur Candida albicans et Aspergillus niger	30 s – 1 min
<b>Virucidie</b>	• EN 14476+A1** sur Norovirus et EN 14476+A1* sur Adénovirus	1 min
	• EN 14476+A1** sur Rotavirus, Herpès, PRV, BVDV	30 s



Réf. 256025 Colis de 6 flacons de 750 ml  
Réf. 256026 Colis de 2 bidons de 5 L

## APPLICATION

Milieu médical, paramédical et pharmaceutique :  
- Désinfection de surfaces, matériaux, équipements et mobilier, de locaux ayant reçus, hébergés, ou soignés des malades, de véhicules de transport sanitaire,  
Milieu agroalimentaire :  
Traitement d'entrepôts, locaux et matériel de transformation de denrées alimentaires pour la consommation humaine, de locaux et matériel de cuisines centrales collectives et de restauration (évier, plan de travail, réfrigérateur...).

# Medi-Prop SR

Désinfectant bactéricide, fongicide, virucide  
**SANS RINÇAGE**

256025 / 256026



## CONSERVATION

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, se conserve pendant 3 ans.

## REGLEMENTATION

Produit répondant à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Produit biocide, TP2 et TP4.

## PRÉCAUTIONS

Usage externe sur peau saine seulement.

Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits. Utilisation exclusivement professionnelle.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé. Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement.

## MODE D'EMPLOI

Diffuser uniformément à 30 cm environ les surfaces à traiter de façon à bien les recouvrir (environ 30mL/m<sup>2</sup>). Laisser agir entre 30s et 5min en fonction de l'action microbiologique recherchée.

Ne pas rincer, essuyage facultatif. Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.

## HOMOLOGATION

Produit homologué par le ministère de l'Ecologie, traitement bactéricide et fongicide 100% POA/POV.