

Collecteurs pour déchets DASRI

Mini-collecteurs pocket - 0,25 L - Polypropylène

674552 - Colis de 100

AVANTAGES

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

- Tous nos mini-collecteurs de déchets à risque infectieux possèdent un niveau d'homologation élevé, Européen et Français, et sont conformes à la norme NF X 30-511.
- Grâce à sa taille compacte et son ergonomie, le collecteur pocket offre un haut de niveau de protection et de sécurité à l'utilisateur par un système de fermeture adapté et des parois épaisses.
- Deux positions de fermeture : provisoire et définitive avec contrôle visuel. Lorsque la languette de fermeture est rentrée dans son logement, le collecteur est définitivement fermé et inviolable.

PRATICITÉ

- Nombreuses encoches de désolidarisation permettant de séparer aisément chaque déchet de son appareil.
- Collecteur particulièrement compact et étudié pour une manipulation aisée et un transport facilité.
- Limite de remplissage facilement visible sur la paroi extérieure du collecteur, permettant ainsi un contrôle visuel rapide.
- Mini-collecteurs empilables pour un transport et stockage optimisés.



● Réf. 674552 - Jaune - le colis de 100

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme de mini-collecteurs Paredes est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier, mais aussi lors d'interventions extérieures (DASRI)

Utilisable pour tous types de déchets piquants, coupants ou tranchants (PCT) liés à l'administration des soins.

CERTIFICATIONS ET NORMALISATION



CARACTERISTIQUES

Composition : Polypropylène
Couleur : Jaune
Dimensions : 130 x 60 x 34 mm
Capacité nominale : 0,25 L
Capacité utile : 0,22 L
Poids : 50 g
Autoclavage: 134°C pendant 20 minutes

DEVELOPPEMENT DURABLE



Favorisant les produits et savoir-faire locaux, tous nos mini-collecteurs sont fabriqués en France, près de Grenoble (38)

Collecteurs pour déchets DASRI

Mini-collecteurs pocket - 0,25 L - Polypropylène

674552 - Colis de 100

MODE D'EMPLOI



MONTAGE

Clipper le couvercle sur la cuve et exercer plusieurs pressions sur celui-ci avec le plat de la main pour assembler tout son périmètre à la cuve.



FERMETURE PROVISOIRE


1. Fermer la trappe
2. La languette de manipulation reste visible et accessible sur l'extérieur de la cuve.




FERMETURE DÉFINITIVE

1. Fermer la trappe
2. Appuyer sur la languette de la trappe pour la condamner.
3. Contrôler visuellement le verrouillage de la trappe.

ZOOM PRODUIT

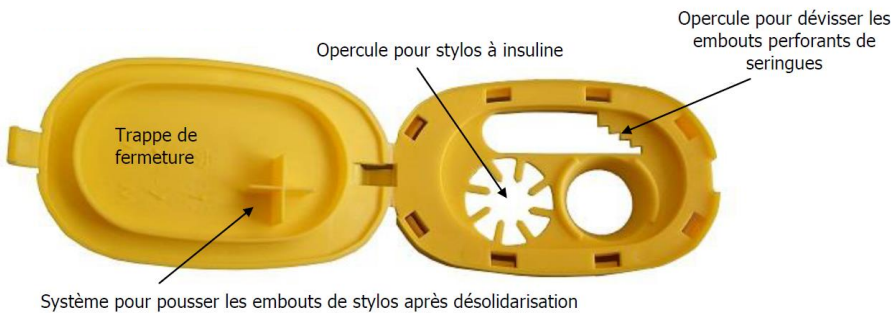

PRODUITS DE LA GAMME DASRI

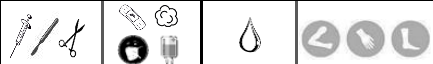	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
					
Collecteurs DASRI 	✓	✗	✗	✗	de 0,25 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
Sacs et cartons DASRI 	✗	✓	✗	✗	de 15 L à 110 L
Jericanes DASRI 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
Caisses anatomiques 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants