



MASQUE MÉDICAL HEAUME + MASQUE TYPE IIR BLEU 942623



DESCRIPTION

Masque médical à élastiques, hypoallergique avec face interne en polypropylène. Deux élastiques auriculaires. Une barrette nasale sans nickel. Non -tissé, multicouches, très confortable et résistant à la projection des liquides humains sous une pression de 120 mmHg. Pliage limitant les fuites au visage.

PRÉCONISATIONS

Utilisation par le personnel médical présentant un risque de projections de liquides biologiques. Adapté aux ports de longue durée. Pour atelier, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique, etc. sans poussière.

AVANTAGES

La combinaison des fonctions de la protection de la tête et du masque protège parfaitement la tête et le visage. Elle constitue une excellente protection contre la pénétration de corps étrangers indésirables. En même temps, elle permet à l'air de circuler.

La barrette nasale ajuste parfaitement le masque sur le nez, et la bande élastique maintient et stabilise l'ensemble de la cagoule sur la tête. Heaume + Masque type IIR convient également aux travailleurs ayant les cheveux longs. Parfait pour l'industrie alimentaire et par les personnels de santé.

MODE D'EMPLOI

- Lavez-vous les mains avec du savon ou réalisez une friction hydroalcoolique avant de mettre le heaume.
- Enfilez le heaume en passant la tête dans l'encolure.
- Positionnez correctement le masque : il doit couvrir le nez, la bouche, le menton. Puis ajustez le masque en plaçant la barrette sur le nez.
- Ne touchez pas le devant du masque avec les mains. Si vous le touchez par accident, lavez-vous les mains.
- Ne mettez pas votre masque en position d'attente sur le menton ou le cou pour éviter de contaminer l'intérieur du masque.
- Retirer le heaume en saisissant les bords de l'encolure au niveau de cou et faite le passer par dessus votre tête. Ne touchez pas la partie avant du masque.
- Jetez le heaume après chaque utilisation ou dès qu'il est souillé dans une poubelle munie d'un sac plastique.
- Lavez-vous les mains avec du savon ou réalisez une friction hydroalcoolique après avoir jeté le heaume.



Photo non contractuelle

MASQUE MÉDICAL HEAUME + MASQUE TYPE IIR

BLEU

942623

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de masque	Type IIR
Dimension du masque	17,5 x 9,5 cm
Durée de port du masque	4 heures max
Composants	3 plis, Spunbond PP 30 g/m ² + Filtre Meltblow PP 25 g/m ² + intérieur Spunbond PP 25 g/m ² . Non stérile
Dimensions du Heaume	33 x 35 cm
Pays de fabrication	Chine
Matières	Polypropylène

CERTIFICATIONS



Dispositif médical de classe I, conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 2017/745. NF EN ISO 14683+AC:2019 TYPE IIR

EN 14683:2019 TYPE IIR

BFE (filtration bactérienne) > 99,2% (Nelson test 957829-S01 du 10/04/2017)

DELTA-P (résistance respiratoire) < 29 Pa/cm² (Nelson test 957829-S01 du 10/04/2017)

Splash test (antiprojection liquide biologique) : conforme ((Nelson test 947953-S01 du 22/02/2017)

Propreté microbienne (Nelson test 1348518-S01 29/10/2020)



Sans Latex



Article à usage unique



Non stérile

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	TAILLE	COLISAGE
942623	Unique	Carton de 10 sachets de 50 pcs