

Medi-Prop DSR

Désinfectant sans rinçage

256035 / 256036

AVANTAGES

- **EFFICACITÉ D'ACTION** : MEDI-PROP DSR est un spray désinfectant destiné à la désinfection rapide « **SANS RINÇAGE** » des surfaces et matériels.
- **PRACTICITÉ** : Ce produit est prêt à l'emploi, après utilisation il est actif dès 30 secondes. De plus, son séchage est rapide et sans traces.
- **POLYVALENT** : pour tout type de surfaces (sauf plexiglas).
- Efficacité prouvée en laboratoire **COFRAC**.



Réf. 256035 Colis de 6 flacons de 750ml
Réf. 256036 Colis de 2 bidons de 5L

APPLICATION

- Surfaces et matériels en restauration, cuisines centrales, collectivités, locaux et entrepôts crèches et garderies....
- Désinfection des locaux ayant reçus ou hébergés des malades et ceux où sont donnés des soins médicaux ou paramédicaux.
- Désinfection des véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps.

COMPOSITION

Alcool éthylique CAS n° 64-17-5 (66,01% m/m).

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore
Odeur : alcoolisée
pH (pur) : 7,5 – 9
Densité : ~ 0,87

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	• EN 1276* sur Listeria, Salmonelle et EN 1276*	30 s
	• EN 13697*	2 min
	• EN 13697* sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis et thyphimurium	2 min
	• EN 13727+A2*	30 s
	• EN 16615* sur P.aeruginosa, S. aureus, E.hirae	2 min
Mycobactéricidie	• EN 14348* sur M.avium et M.terrae	1 min
Levuricidie/ fongicidie	• EN 1650+A1* sur Candida albicans	30 s
	• EN 1650+A1* sur Aspergillus brasiliensis	1 min
	• EN 13624* sur Candida albicans	30 s
	• EN 13624* sur Aspergillus brasiliensis	5 min
	• EN 13697*+A1 sur Candida albicans et Aspergillus brasiliensis	5 min
	• EN 16615* sur Candida albicans	2 min
Virucidie	• EN 14476+A2** sur Norovirus	1 min
	• EN 14476+A2* sur Adénovirus	1 min
	• EN 14476+A2* sur Rotavirus	30 s
	• EN 14476+A2* sur H1N1	30 s
	• EN 14476+A2* sur Coronavirus BCoV (virus modèle)	30 s

CONSERVATION

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, se conserve pendant 3 ans.

REGLEMENTATION

Produit répondant à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Produit biocide, TP2 et TP4, à usage professionnel, prêt à l'emploi.

PRÉCAUTIONS

Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Craint le gel. Ne pas avaler

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Usage professionnel.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement.

Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignement se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter l'hôpital le centre antipoison le plus proche.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser 10 à 30ml/m² directement sur la surface à traiter préalablement nettoyée.

Laisser agir entre 30s et 5 min suivant l'effet recherché.

Ne pas rincer, essuyer si nécessaire.

Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.