

CARTON HOSPITALIER

50 L Bas – Lien cranté

830533 – Paquet de 10 cartons

AVANTAGES

PRACTICITÉ


- Caisse à fond automatique - montage facile et rapide
- Encoches facilitant le pliage intuitif du carton
- Dessin de montage présent sur le carton et représentation des conseils d'utilisation
- Nouveau design épuré facilitant la lecture d'information et l'identification des cartons

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

- Nouveau système de fermeture plus intuitif et sécurisant par rabats crantés colorés (témoin de fermeture)
- Fermeture par double poignées pour une grande facilité de manipulation et plus de sécurité
- Nouveau design général et bords renforcés pour un stockage optimisé des cartons et un empilage en toute sécurité **1**
- Carton DASRI conforme à la nouvelle version de la norme NFX30-507 de Juillet 2018 et issu de sources responsables



Réf. 830533 – Jaune et blanc – paquet de 10

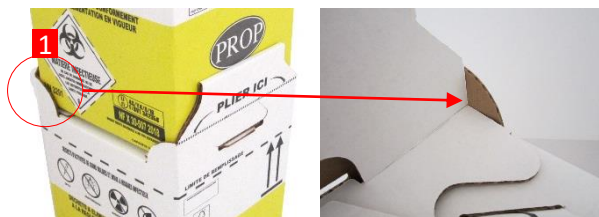

CARACTÉRISTIQUES

Matières : carton de 410 g/m² + sac PEMD 55 µm

Capacité nominale : 50 L

Capacité réelle : 52,16 L

Capacité utile : 47,90 L

Hauteur limite de remplissage : 515 mm

Poids : 560 g

Résistance en charge : 13,5 kg

Dimensions : 270x355x560 mm

Épaisseur de sac intérieur : 55 µm

DOMAINE D'APPLICATION

La gamme DASRI est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier.

Utilisable pour tous types de déchets mous liés à l'administration des soins.

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATION



BVT 342364

CONDITIONNEMENT

- Paquet de 10 cartons

CONSEIL D'UTILISATION


MONTAGE DU CARTON

OUVRIR LÉGEREMENT LA BOÎTE EN INTRODUISANT L'AVANT-BRAS À L'INTÉRIEUR DU SAC

EXERCER UNE PRESSION SUR LES DEUX CÔTÉS DU CARTON POUR LA MISE EN PLACE AUTOMATIQUE DU FOND

RABATTRE LES 4 PARTIES SUPÉRIEURES DU CARTON PUIS RETOURNER LE SAC PLASTIQUE DE FAÇON À HABILLER ET PROTÉGER LE CARTON

FERMETURE PROVISOIRE

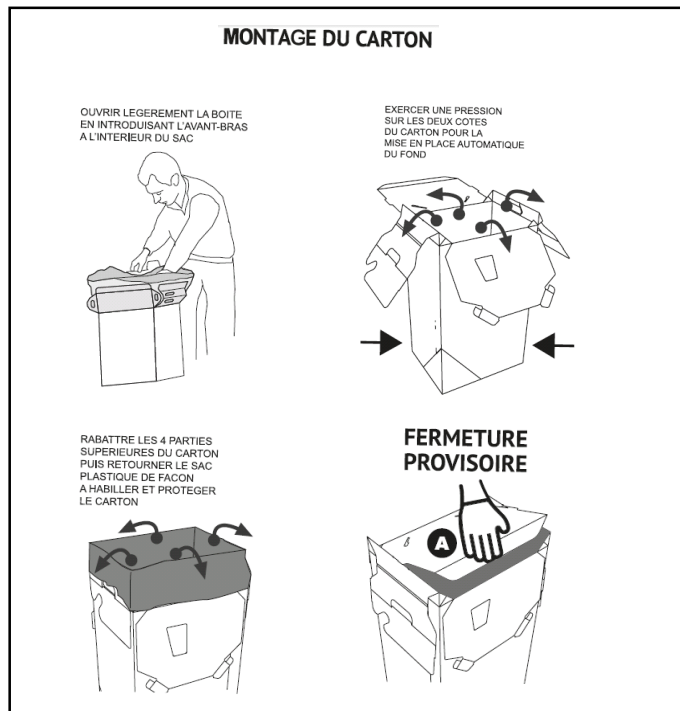

FERMETURE DU CARTON

FERMER LE SAC PLASTIQUE À L'AIDE DU LIEN CRANTÉ

FERMETURE DÉFINITIVE

1 REPLIER LA PARTIE "A" VERS L'INTÉRIEUR


2 REPLIER LES 2 PARTIES LATÉRALES "B" VERS L'INTÉRIEUR COMME INDIQUE SUR LE DESSIN

3





4

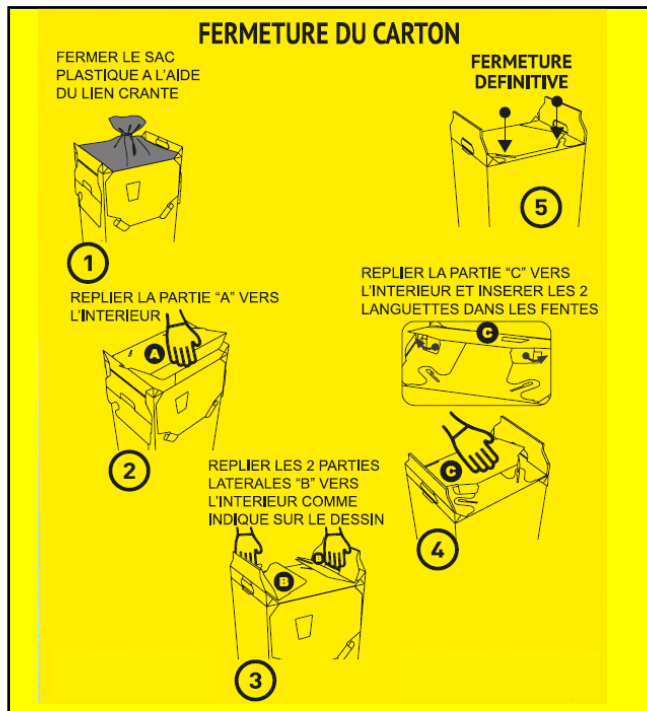5

REPLIER LA PARTIE "C" VERS L'INTÉRIEUR ET INSÉRER LES 2 LANGUETTES DANS LES FENTES



PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
Collecteurs DASRI 	✓	✗	✗	✗	de 0,6 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
Sacs et cartons DASRI 	✗	✓	✗	✗	de 12 L à 110 L
Jericanes DASRI 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
Caisses anatomiques 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants